



Технические публикации

Документ 5453550-145, на русском языке

Ред. 3



LOGIQ F Руководство пользователя

R1.x.x

Техническая документация

© General Electric Co., 2013

Нормативные требования

Данное изделие удовлетворяет нормативным требованиям Европейской директивы 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам.



Данное руководство является справочным пособием для пользователей системы LOGIQ F. Оно относится ко всем версиям программного обеспечения R1.x.x ультразвуковой системы LOGIQ F.



GE
P.O. Box 414, Milwaukee, Wisconsin 53201 U.S.A.
(Азия, Тихоокеанский регион, Латинская Америка,
Северная Америка)

GE Ultraschall Deutschland GmbH & Co. KG
Beethovenstrasse 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen GERMANY
ТЕЛ.: 49 212 28 02 208; ФАКС: 49 212 28 02 431

Список редакций

Причина изменения

РЕД.	ДАТА ГГГГ/ММ/ДД	ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ
Ред. 1	2013/01/04	Первоначальный выпуск
Ред. 2	2013/05/18	Обновление для датчика 8C-RS
Ред. 3	2013/10/11	Обновлена табличка с техническими данными

Перечень страниц с изменениями

НОМЕР СТРАНИЦЫ	НОМЕР РЕДАКЦИИ	НОМЕР СТРАНИЦЫ	НОМЕР РЕДАКЦИИ
Титульный лист	Ред. 3	Глава 2	Ред. 3
Список редакций	Ред. 3	Глава 3	Ред. 3
Нормативные требования	Ред. 3	Глава 4	Ред. 3
Содержание	Ред. 3	Глава 5	Ред. 3
Глава 1	Ред. 3	алфавитный указател	Ред. 3

Убедитесь, что вы используете последнюю редакцию настоящего документа. Информацию, относящуюся к данному документу, см. в системе MyWorkshop/ePDM (Система управления данными об электронных продуктах GE). Чтобы получить сведения о последней версии, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании GE. Если вы находитесь в США, позвоните в центр GE Ultrasound Clinical Answer Center по телефону 1 800 682 5327 или 1 262 524 5698.

Страница оставлена пустой намеренно.

Нормативные требования

Соответствие стандартам

Следующие классификационные параметры соответствуют требованиям стандарта IEC/EN 60601-1.

- Согласно директиве ЕС по медицинским устройствам 93/42/ЕЕС, это медицинское устройство соответствует классу IIa.
- Согласно требованиям стандарта IEC/EN 60601-1,
 - это оборудование соответствует классу I с контактными элементами типа BF или CF.
 - непрерывный режим работы.
- Согласно требованиям стандарта CISPR 11,
 - это оборудование относится к типу ISM, группа 1, класс A;
- Согласно требованиям стандарта IEC 60529,
 - педальный переключатель класса IPx8 подходит для применения в операционных.
 - Головка датчика (погружаемая часть) имеет влагозащиту класса IPX7.

Разъем датчика не водонепроницаемый.

Данное изделие соответствует нормативным требованиям следующих стандартов и норм:

- Директива ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам — о соответствии этой директиве свидетельствует этикетка CE на изделии.

Расположение знака CE указано в главе о технике безопасности настоящего руководства.

Официальное представительство в ЕС

Европейское представительство зарегистрировано по адресу:

GE Medical Systems Information Technologies GmbH
(GEMS IT GmbH)

Munzinger Strasse 5, D-79111 Freiburg, GERMANY

Тел.: +49 761 45 43 -0; факс: +49 761 45 43 -233



Соответствие стандартам (продолжение)

- Международная электротехническая комиссия (МЭК)
 - IEC/EN 60601-1 - Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности.
 - IEC/EN 60601-1-2 - Электромагнитная совместимость: требования и испытания.
 - IEC 62366 - Эксплуатационная пригодность, EN 1041 - Общие требования к информации изготовителя, прилагаемой к медицинским изделиям.
 - IEC/EN 60601-2-37: Частные требования безопасности к ультразвуковому медицинскому оборудованию для диагностики и мониторинга.
- Международная организация по стандартизации (ISO)
 - ISO 10993-1 - Оценка биологическая медицинских изделий.

Сертификаты

- Продукция General Electric Medical Systems сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 13485.

Исходная документация

- Исходный документ издан на английском языке.

Официальные разрешения для конкретных стран

- ЯПОНИЯ
Номер соответствия MHLW:

Информация об импортере

- Турция

İTHALATÇI
PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL
SİSTEMLER SAN. VE TİC. A.Ş.
HOŞDERE CAD. FUAR SOK. 5 / 3
Y. AYRANCI / ANKARA

Содержание

Соответствие стандартам	i-3
Сертификаты	i-4
Исходная документация	i-4
Официальные разрешения для конкретных стран	i-4
Информация об импортере	i-4

Содержание

Глава 1 — Начало работы

Обзор системы

Внимание!	1-2
Противопоказания	1-3
Предписание для данного оборудования	1-3
Показания к применению	1-4
Требования к рабочему месту	1-5
Схема элементов консоли	1-8
Подключение периферийных/дополнительных устройств	1-9
Схема панели управления	1-11
Сенсорная панель (устанавливается дополнительно)	1-14
Дисплей монитора	1-17

Перемещение системы

Операции, которые необходимо выполнить перед перемещением системы	1-18
Колеса	1-20
Перемещение системы	1-22

Запуск системы

Подключение системы	1-24
Включение питания	1-28
Отключение питания	1-29
Инструкции по восстановлению системы после сбоя	1-30

Датчик

Подсоединение датчика	1-31
Использование кабелей	1-34
Включение/выключение датчика	1-34
Отсоединение датчика	1-34

Начало исследования

Экран архивирования данных	1-35
Сканирование нового пациента	1-38
Начало нового обследования зарегистрированного пациента	1-41
Сканирование без ввода сведений о пациенте	1-42
Изменения статуса пациента с "текущего" на "существующий" (с/без	

идентификационного кода пациента)-	1-43
Глава 2 — Выполнение обследования	
Оптимизация изображения	
Элементы управления В-режима-	2-2
Элементы управления режима ЦДК	2-6
Элементы управления М-режима	2-9
М-режим с ЦДК	2-9
Элементы управления доплеровского режима-	2-10
Упрощенный режим (дополнительная функция)	2-13
Режим 3D/4D (дополнительная функция)	2-14
Эластография (дополнительная функция)-	2-17
Другие элементы управления	2-21
Измерение и анализ	
Введение	2-40
Местоположение элементов управления измерением	2-41
Измерения в В-режиме	2-42
Измерения в доплеровском режиме	2-51
Измерения в М-режиме	2-55
Просмотр и редактирование рабочих таблиц-	2-57
Погрешность клинических измерений	2-61
Установка автономного принтера для печати на бумаге	2-64
Глава 3 — После завершения обследования	
Предварительные настройки	
Обзор	3-2
Предварительная настройка системы	3-4
Резервное копирование данных	3-8
Настройка подключения	3-26
Замечание по антивирусному ПО	3-27
Электронная документация	
Работа с документацией на ПК	3-28
Данные о системе	
Функции/Технические характеристики	3-29
Уход за системой и техническое обслуживание	
Проверка системы-	3-34
Очистка системы-	3-36
Чистка воздушных фильтров-	3-40
Предотвращение возникновения помех, связанных со статическим электричеством-	3-41
Утилизация	3-41
Поиск и устранение неисправностей	3-42
Помощь	3-43
Контактная информация	
Контактная информация компании GE Ultrasound	3-45
Производитель	3-51
Глава 4 — Меры безопасности	
Ответственность владельца	
Недопустимость самостоятельных модификаций	4-2

Меры предосторожности	
Уровни опасности - - - - -	4-3
Знаки, предупреждающие об опасности - - - - -	4-4
Безопасность пациента - - - - -	4-7
Безопасность оборудования и персонала - - - - -	4-11
ЭМС (электромагнитная совместимость)- - - - -	4-20
Устройства, используемые вблизи пациента - - - - -	4-31
Мощность акустического выходного сигнала - - - - -	4-33
Общие предупреждения - - - - -	4-37
Содержание опасных веществ в системе LOGIQ F согласно директиве RoHS- - - - -	4-38
Наклейки на устройстве - - - - -	4-40
Расположение предупреждающих наклеек - - - - -	4-45
Глава 5 — Датчики и биопсия	
Обзор датчиков	
Эргономика - - - - -	5-2
Использование кабелей - - - - -	5-2
Ориентация датчика - - - - -	5-3
Маркировка - - - - -	5-3
Принципы присвоения наименований датчикам - - - - -	5-4
Эксплуатация датчиков - - - - -	5-5
Безопасность эксплуатации датчиков - - - - -	5-7
Особые инструкции - - - - -	5-10
Использование датчиков и инфекционный контроль - - - - -	5-13
Процедура очистки датчика- - - - -	5-15
Контактные гели - - - - -	5-21
Пояснения по работе с датчиками	
Введение - - - - -	5-23
Область применения- - - - -	5-24
Функции - - - - -	5-25
Технические характеристики - - - - -	5-26
Изображение датчика - - - - -	5-27
Особые типы рисков, связанные с биопсией	
Меры предосторожности при выполнении процедуры биопсии - - -	5-29
Подготовка к проведению биопсии	
Отображение направления биопсии - - - - -	5-31
Подготовка к подсоединению направляющего устройства для биопсии - 5-34	
Выбор пути иглы для биопсии 4D-датчика - - - - -	5-45
Проверка траектории иглы для биопсии - - - - -	5-45
Процедура биопсии - - - - -	5-46
Действия после процедуры биопсии - - - - -	5-47
Использование в хирургии/в интраоперационных процедурах	
Подготовка к проведению хирургических/интраоперационных процедур 5-48	
Алфавитный указатель	

Глава 1

Начало работы

*Обзор элементов управления пульта оператора,
перемещение системы, запуск системы, датчики
и начало обследования*

Обзор системы

Внимание!

Данное руководство пользователя предназначено для систем LOGIQ F3, LOGIQ F6 и LOGIQ F8.

В данном руководстве содержится необходимая и достаточная информация для безопасной эксплуатации системы. Специалисты по оборудованию, прошедшие обучение на заводе, могут обучить навыкам работы с оборудованием в оговоренные сроки.

Перед использованием системы LOGIQ F внимательно изучите и осмыслите все инструкции, содержащиеся в данном руководстве пользователя.

Всегда храните руководство рядом с оборудованием. Периодически просматривайте инструкции по соблюдению мер безопасности и эксплуатации оборудования.

Пренебрежение информацией по технике безопасности рассматривается как неправильная эксплуатация.

Не все функции системы, изделия, датчики или периферийные устройства, описанные в данном руководстве, могут иметься в наличии или быть разрешенными к продаже на всех рынках. За свежей информацией обращайтесь к представителю компании GE Ultrasound.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Обратите внимание на то, что заказы выполняются на основе индивидуально запрошенных технических характеристик и могут не включать в себя все функции, перечисленные в данном руководстве.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Все ссылки на стандарты и нормативы и их редакции имеют силу на момент опубликования данного руководства пользователя.*

Внимание! (продолжение)



Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с инструкциями по безопасности.

Руководства по эксплуатации системы LOGIQ F предназначены для пользователей, знакомых с основными принципами и методами работы с ультразвуковым оборудованием. В них не предусмотрено обучение ультразвуковому сканированию или подробное описание клинических процедур.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цветовое исполнение системы может варьироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компакт-диск с электронной документацией содержит материалы на английском языке и переводы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения экранов в данном руководстве приведены только в справочных целях. Фактическое изображение может отличаться.

Противопоказания

Ультразвуковая система LOGIQ F не предназначена для исследования органов зрения или любого другого применения, при котором возможно попадание акустического пучка в глаза.

Предписание для данного оборудования



ВНИМАНИЕ: в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки данное устройство разрешается продавать или использовать только врачам или по назначению врача.

Показания к применению

Система LOGIQ F предназначена для использования квалифицированным врачом в целях проведения ультразвукового исследования.

Частота использования

Ежедневно (обычно 8 часов)

Профиль оператора

- Квалифицированные и обученные врачи или специалисты по ультразвуковой эхографии, обладающие хотя бы основными знаниями в области ультразвука.
- Оператор должен прочитать и осмыслить данное руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ультразвуковое сканирование пациентов в диагностических целях должны выполнять только квалифицированные врачи или специалисты в области сонографии. В случае необходимости обратитесь за помощью в обучении.

Клинические приложения

Возможны следующие клинические исследования:

- Брюшная полость
- Акушерство
- Гинекология
- Поверхностно расположенные органы
- Васкулярные исследования/исследования периферических кровеносных сосудов
- Транскраниальный
- Педиатрия
- Исследование костно-мышечных тканей
- Урология
- Кардиология
- Трансвагинальное исследование
- Биопсия

Получение изображений в диагностических целях, включая измерения на полученных изображениях.



Данное устройство должно использоваться в соответствии с законодательством. Ряд законодательств запрещает использовать оборудование в определенных целях, например, для определения пола.

Требования к рабочему месту

Введение

Не пытайтесь устанавливать систему самостоятельно. Устанавливать и настраивать систему должны инженеры по монтажу и специалисты по прикладным программам компании General Electric, дочерней компании или компании-дистрибьютора. Более подробную информацию см.: 'Контактная информация' на *стр. 3-45*.

Система LOGIQ F не имеет внутренних компонентов, требующих обслуживания со стороны пользователя. Необходимо избегать любых манипуляций с оборудованием со стороны персонала, не имеющего соответствующих полномочий.

Регулярно выполняйте профилактическое техническое обслуживание системы. Более подробную информацию см.: 'Уход за системой и техническое обслуживание' на *стр. 3-34*.

Соблюдайте чистоту в местах использования оборудования. Перед чисткой устройство необходимо выключить и отключить от сети питания. Более подробную информацию см.: 'Очистка системы' на *стр. 3-36*.

Запрещается помещать емкости с жидкостью на поверхность оборудования во избежание попадания жидкости внутрь оборудования или панели управления.

Информация, которую необходимо принять к сведению до того, как оборудование будет доставлено

Данную ультразвуковую систему следует эксплуатировать в надлежащих окружающих условиях и в соответствии с требованиями, описанными в этом разделе. Перед использованием системы обеспечьте удовлетворение этих требований.

Потребляемая мощность

- Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 6,5 А.
- Частота: 50/60 Гц
- 100 В - 240 В переменного тока (+/-10%)

Электромагнитные помехи

Данное медицинское оборудование аттестовано на предмет защиты от радиопомех при работе в больницах, клиниках и других учреждениях, относящихся к соответствующей категории. Применение данного оборудования в ненадлежащих условиях может привести к созданию электромагнитных помех для радиосистем и телевизионных приемников, расположенных вблизи оборудования.

Для надлежащего функционирования новой системы требуются следующие условия:

- Примите меры предосторожности по обеспечению защиты панели управления от электромагнитных помех.

Меры предосторожности:

- Пульт оператора должен размещаться на расстоянии минимум 5 метров от двигателей, печатающих устройств, лифтов и других мощных источников электромагнитного излучения.
- Установка системы в замкнутом пространстве (с деревянными, оштукатуренными или бетонными стенами, полами и потолками) способствует снижению уровня электромагнитных помех.
- Если предполагается эксплуатировать систему вблизи радио- или телевещательного оборудования, может потребоваться специальное экранирование.

Требования к окружающей среде

При эксплуатации, хранении и транспортировке системы следует соблюдать требования, указанные ниже. Условия эксплуатации должны строго соблюдаться. В противном случае устройство следует выключить.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от скорости вращения вентилятора может появиться сообщение о перегреве. Обеспечьте достаточную вентиляцию системы/кабинета.

Таблица 1-1: Требования к окружающей среде для системы

	Эксплуатация (с датчиком)	Хранение (LOGIQ F)	Транспортировка (LOGIQ F)
Температура	3 - 40° C 37 - 104° F	-5 - 50° C 23 - 122° F	-5 - 50° C 23 - 122° F
Влажность	30—80%, без конденсации	10—90%, без конденсации	10—90%, без конденсации
Давление	От 700 до 1060 гПа	От 700 до 1060 гПа	От 700 до 1060 гПа



Убедитесь, что температура поверхности датчика не превышает нормальный рабочий температурный диапазон.

Условия эксплуатации

Обеспечьте достаточный поток воздуха вокруг стационарной ультразвуковой системы.



Не закрывайте вентиляционные отверстия системы LOGIQ F.



Система LOGIQ F и соединитель датчика не являются водонепроницаемыми. Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Схема элементов консоли



Рис. 1-1. Система LOGIQ F - пример

- | | |
|--|--|
| 1. ЖК-монитор | 8. Держатель для датчика |
| 2. Сенсорная панель (устанавливается дополнительно) | 9. Держатель для бутылки с гелем |
| 3. Панель управления | 10. Динамик |
| 4. Печатное устройство (устанавливается дополнительно) | 11. Гибкий манипулятор (устанавливается дополнительно) |
| 5. Колеса | 12. Задняя ручка |
| 6. Подставка для кабелей (устанавливается дополнительно) | 13. Порты USB |
| 7. Разъем датчика | 14. Задняя панель |

Подключение периферийных/дополнительных устройств

Панель разъемов для подключения периферийных/дополнительных устройств

Периферийные устройства и принадлежности системы LOGIQ F можно подключить надлежащим образом с помощью специальной панели разъемов.



С целью обеспечения совместимости следует использовать только датчики, периферийные устройства и принадлежности, одобренные компанией GE.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать любые датчики и принадлежности без одобрения компании GE.



Подключение оборудования или сетей передачи данных, отличных от описанных в настоящем руководстве, может привести к поражению электрическим током. При изменении подключения специалист, выполняющий монтаж, обязан проверять оборудование на совместимость с системой и на соответствие требованиям стандарта IEC/EN 60601-1.



При использовании периферийных устройств следуйте всем предостережениям и предупреждениям, приведенным в руководствах по эксплуатации соответствующих устройств.

Панель разъемов для подключения периферийных/дополнительных устройств (продолжение)

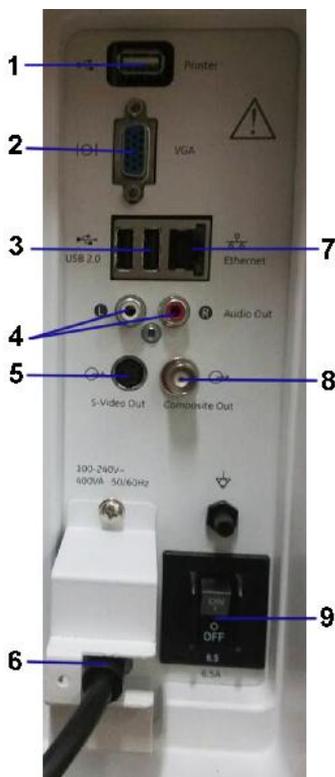


Рис. 1-2. Панель разъемов для подключения периферийных/дополнительных устройств

1.	Порт USB	Порт для подключения принтера, работающего от сети переменного тока.
2.	Порт VGA	Выход VGA-видео
3.	Порт USB	USB 2.0
4.	Аудио порт	Линейный аналоговый стереовыход
5.	Порт S-Video	Выход S-Video
6.	Вход питания переменного тока	100-240 В
7.	Ethernet	ЛВС для соединения InSite (RJ45)
8.	Порт композитного видео	Выход композитного видеосигнала
9.	Автоматический выключатель	6,5 А

Схема панели управления

Элементы управления сгруппированы вместе для упрощения использования системы.

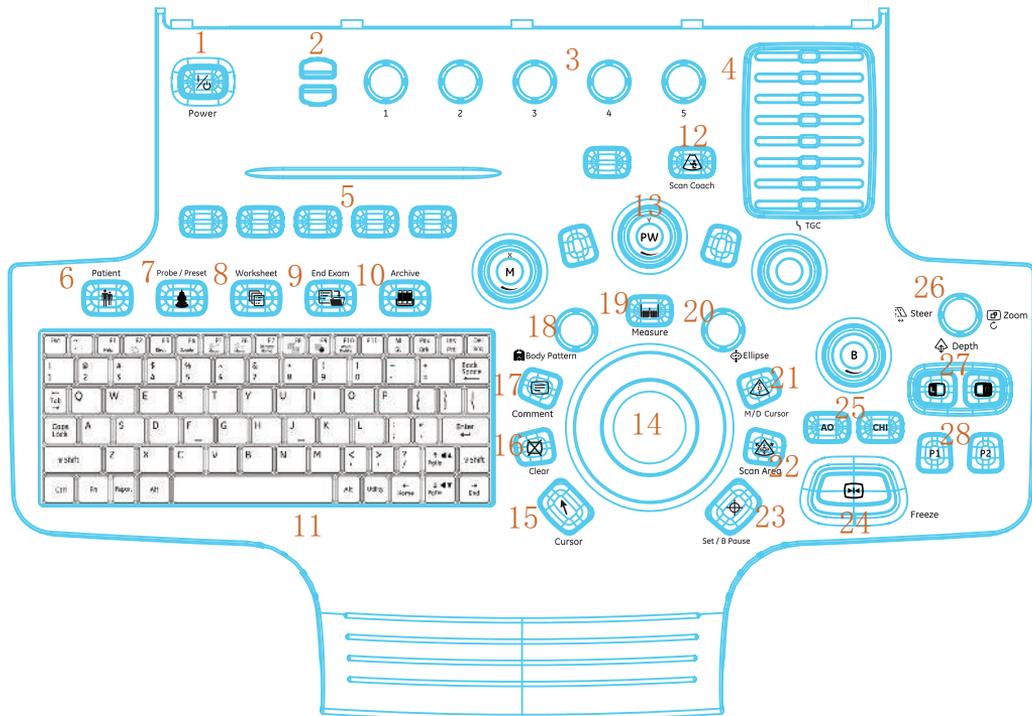


Рис. 1-3. Схема панели управления

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Включение/выключение питания | 11. Буквенно-цифровая клавиатура | 20. Клавиша "Ellipse" (Эллипс) |
| 2. Клавиши "Page Up" (Страница вверх) / "Down" (Страница вниз) | 12. Клавиша "Scan Coach" (Консультант) (дополнительная клавиша) | 21. Клавиша управления курсором в M/D-режиме |
| 3. Поворотная кнопка | 13. Элементы управления режимами/усилением/XYZ | 22. Клавиша "Scan Area" (Сканирование заданной области) |
| 4. КУ (Компенсация усиления) | 14. Трекбол | 23. Клавиша "Set" (Настройка В-режима) / "B Pause" (Пауза В-режима) |
| 5. Клавиши, назначаемые пользователем | 15. Клавиша управления курсором | 24. Клавиша "Freeze" (Стоп-кадр) |
| 6. Клавиша "Patient" (Пациент) | 16. Клавиша "Clear" (Очистить) | 25. Клавиши "AO" (Акустическая мощность) и "THI" (Гармоническая визуализация тканей) |
| 7. Клавиши "Probe" (Датчик) / "Preset" (Установка параметров) | 17. Клавиша "Comment" (Комментарий) | 26. Клавиша "Steer" (Регулировка) / "Zoom" (Приближение) / "Depth" (Глубина) |
| 8. Клавиша "Worksheet" (Рабочая таблица) | 18. Клавиша "Body Pattern" (Пиктограмма) | 27. Клавиша влево/вправо |
| 9. Клавиша "End Exam" (Завершение исследования) | 19. Клавиша "Measure" (Измерить) | 28. Клавиши "P1" и "P2" |
| 10. Клавиша "Archive" (Архивирование) | | |

Схема панели управления (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы CWD, ЭД, 4D, ЦДК и Сенсорная панель не поддерживаются системой LOGIQ F3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки по умолчанию для клавишей, назначаемых пользователем (слева направо) — "TVI" (Анализ движения тканей), "Elasto" (Эластография), LOGIQView, 3D/4D и "Report" (Отчет). Настройки можно изменить в меню "Utility" (Утилиты) -> "System" (Система) -> "User Configurable Key" (Пользовательские клавиши).

Клавиатура

	Стандартная буквенно-цифровая клавиатура имеет несколько специализированных функций.
Esc	Выход из текущего экрана дисплея.
Справка (клавиша "F1")	Доступ к интерактивной справке / руководству пользователя.
Стрелка (клавиша "F2")	Стрелка комментария.
Извлечение (клавиша "F3")	Извлечение носителя.
Диспетчер очереди (клавиша "F4")	Активация экрана диспетчера очереди заданий DICOM.
Создание клавиши быстрого доступа (клавиша "F5")	Создание клавиши быстрого доступа.
Воспроизведение процедуры быстрого доступа (клавиша "F6")	Воспроизведение процедуры быстрого доступа.
Исходное положение/ Задать исходное положение (клавиша "F7")	Перемещение курсора аннотаций в исходное положение; установка текущего положения курсора аннотаций в качестве исходного с помощью одновременного нажатия клавиши и "shift".
Текст 1/Текст 2 (клавиша "F8")	Переключение между уровнями текста аннотаций пользователя.
Захват последнего (клавиша "F9")	Активация последних выбранных данных для редактирования.
Удаление слова (клавиша "F10")	Удаление слова, связанного с курсором комментариев.
Сочетание клавиш "Alt+D"	Сбор файлов журналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранение файлов журнала возможно только при подключении внешних устройств хранения и осуществляется нажатием сочетания клавиш Alt+D.

Сенсорная панель (устанавливается дополнительно)

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорная панель является дополнительным устройством для LOGIQ F, и не поддерживается системой LOGIQ F3.

Сенсорная панель включает функцию обследования и специализированные элементы управления для каждой функции или режима.

Регуляторы функций исследования

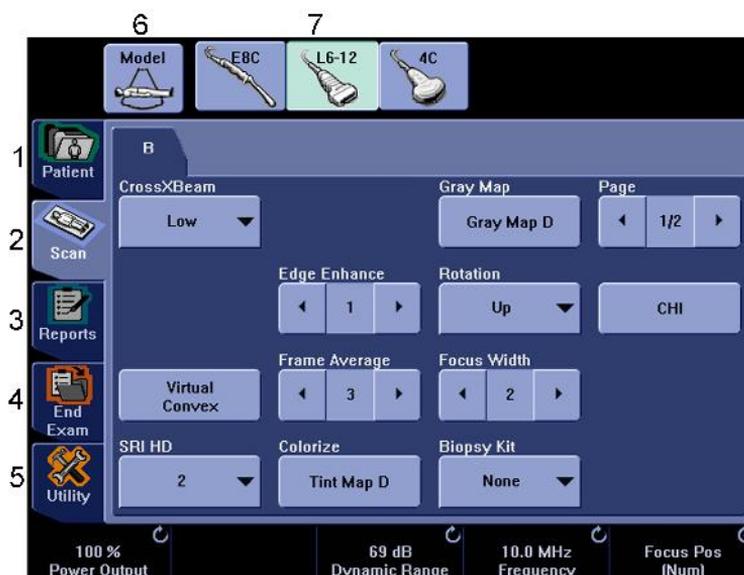


Рис. 1-4. Регуляторы функций исследования

1. Patient (Пациент): выбор экрана "Patient" (Пациент).
2. Scan (Сканирование): выбор экрана режима сканирования.
3. Reports (Отчеты): вызов отчета по умолчанию и Сенсорная панель для нескольких отчетов.
4. End Exam (Завершение исследования): включение управления изображениями и Сенсорная панель с параметрами завершения исследования.
5. Utility (Утилиты): вызов меню конфигурации системы.
6. Model (Модель): выбор приложения.
7. Индикатор датчика: индикация и выбор датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Меню отображаются в зависимости от того, какое меню Сенсорная панель выбрано.

Регуляторы функций исследования (продолжение)

Внизу сенсорной панели расположены пять регулировочных рукояток/кнопок. Функции рукояток зависят от меню, которое отображается в настоящее время. Для переключения и настройки параметров, а также включения/выключения различных функций нажмите кнопку. Для настройки параметра поверните рукоятку.



Рис. 1-5. Регулировочные рукоятки/кнопки

Элементы управления конкретного режима/конкретной функции

Как правило, название клавиши указывается сверху нее. Существуют различные типы клавиш Сенсорная панель (см. ниже):

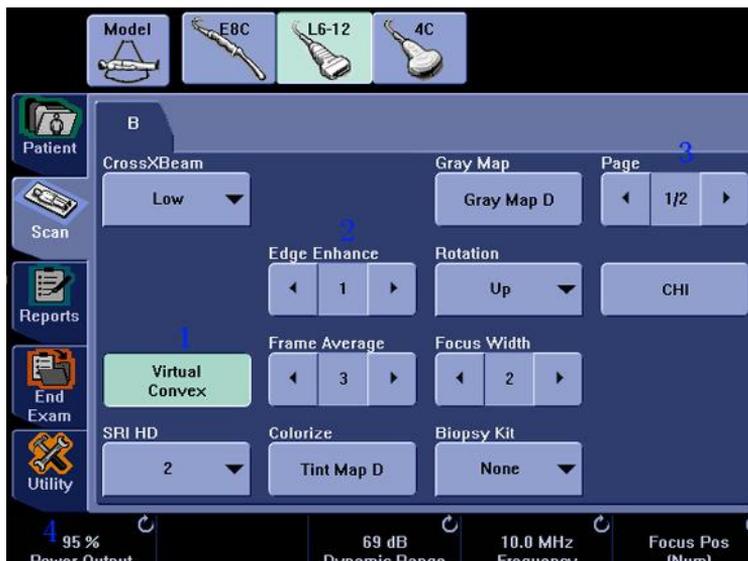


Рис. 1-6. Элементы управления конкретного режима/ конкретной функции

1. Нажмите, чтобы включить или выключить элемент управления.
2. Клавиши изменения/выбора используются в качестве элементов управления с тремя и более вариантами выбора.
3. Нажмите, чтобы перейти к следующей странице сенсорной панели.
4. Ручки двойного действия (под Сенсорная панель): регулируйте настройки при помощи нажатия (точка) или поворота (закругленная стрелка).

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только сенсорная панель будет подключена к системе, системное меню будет отображаться только на сенсорной панели.

Дисплей монитора

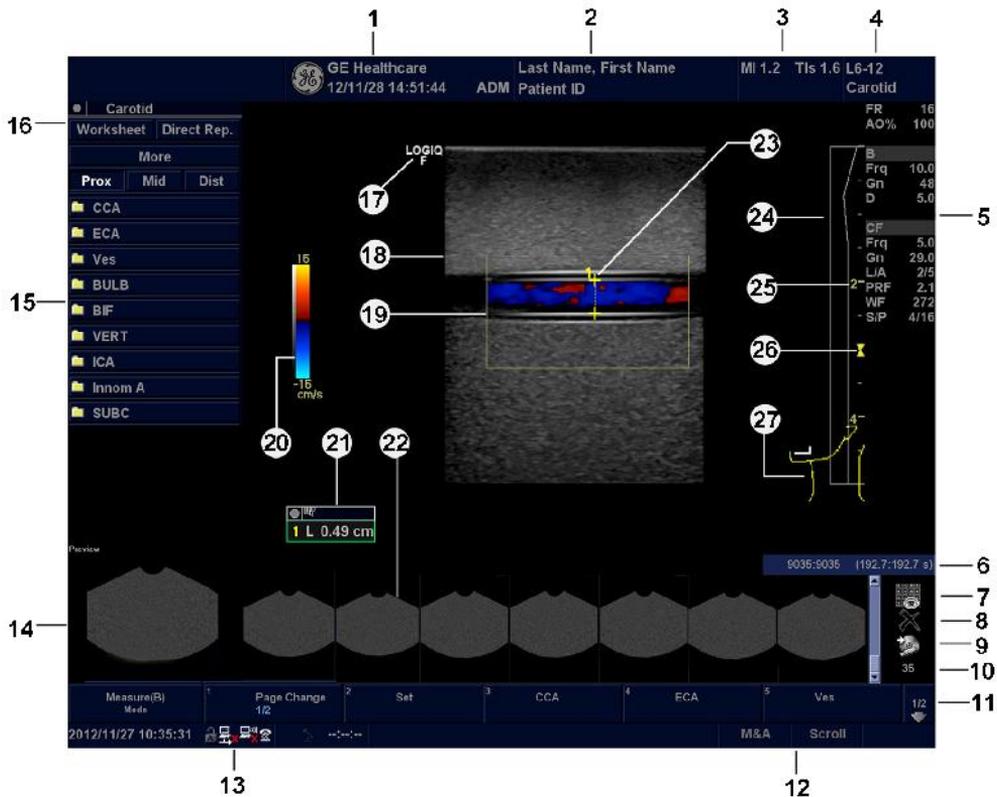


Рис. 1-7. Обзор дисплея монитора

1. Название медицинского учреждения, дата, время, идентификатор оператора.
2. Фамилия пациента, идентификатор пациента.
3. Значение выходной мощности.
4. Идентификатор датчика Предустановка обследования.
5. Параметры формирования изображений в зависимости от режима
6. Индикатор положения кинопетли
7. Страница с активными изображениями.
8. Удалить изображение.
9. Меню "Save as" (Сохранить как).
10. Число изображений в исследовании
11. Индикатор количества страниц.
12. Функциональное состояние трекбола
13. Текущие дата и время, "Caps Lock" (горит, когда включен), индикатор сетевого подключения (значок компьютера — подключено, перечеркнутый компьютер — не подключено), дисплей системных сообщений, состояние InSite, элементы управления InSite.
14. Предварительный просмотр изображения.
15. Окно сводки измерений.
16. Рабочая таблица/Прямой отчет.
17. Маркер ориентации датчика.
18. Изображение.
19. Область исследования.
20. Шкала серого/Цветовая шкала.
21. Окно результатов измерений.
22. Буфер изображений.
23. Измерители.
24. TGC (Компенсация усиления).
25. Шкала глубины
26. Индикатор фокусной зоны.
27. Шаблон.

Перемещение системы

Операции, которые необходимо выполнить перед перемещением системы

При перемещении и транспортировке системы соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности в целях максимально эффективного обеспечения безопасности персонала, системы и прочего оборудования.



Если система не используется И/ИЛИ предстоит ее перемещение/транспортировка, необходимо перевести монитор в горизонтальное положение во избежание его повреждения.



При перемещении системы **НЕ** кладите датчики или педальный выключатель в боковой лоток. Он не предназначен для хранения датчиков, педального выключателя и периферийных устройств.



Данное оборудование не предназначено для работы во время транспортировки (например, в машинах скорой помощи, самолетах).

Операции, которые необходимо выполнить перед перемещением системы (продолжение)

1. Отключите питание с помощью **выключателя питания**. Более подробную информацию см.: 'Отключение питания' на *стр. 1-29*.
2. Отсоедините шнур питания.
3. Обмотайте кабель питания вокруг задней ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Чтобы предотвратить повреждение кабеля питания, **НЕ** тяните за него слишком сильно и не сгибайте его под острыми углами при сматывании.*

4. Все кабели внешних периферийных устройств и Ethernet-соединения должны быть подключены к панели управления.
5. Убедитесь, что на консоли нет посторонних предметов.
6. Подсоедините все датчики, которые должны использоваться после перемещения. Убедитесь в том, что кабели датчиков не мешают передвижению тележки и не выступают за пределы пульта оператора. Для дополнительного закрепления кабелей датчиков используйте крючки, расположенные под панелью управления.
7. Во избежание повреждений храните все остальные датчики в оригинальной упаковке, в мягкой ткани или пенопластовой упаковке.
8. Храните достаточное количество геля и другие необходимые принадлежности в специально предназначенном для этого отсеке.
9. Переведите ЖК-монитор в горизонтальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с ЖК-монитором на перемещающемся кронштейне, опустите монитор в самое низкое возможное положение, закрепите кронштейн и сложите монитор в горизонтальном положении.

10. Отсоедините pedalный переключатель от панели управления.
11. Разблокируйте колеса.

Колеса

Часто проверяйте колеса на предмет явных дефектов, которые могут привести к поломке или защемлению.

Каждое из колес имеет тормозную педаль.



Рис. 1-8. Фиксирование колес

1. Разблокировано
2. Заблокировано

Колеса (продолжение)



Опасность при
перемещении
оборудования

Никогда не перемещайте систему с заблокированными колесами.



ВНИМАНИЕ!

Если блокировка колес снимается с помощью передней и задней педалей не одним человеком, следует соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить неожиданное перемещение тележки, которое может привести к травме пальцев ног.



ВНИМАНИЕ!


При использовании или остановке системы на скользкой поверхности НЕОБХОДИМО включить тормоза на колесах.

Перемещение системы

1. При перемещении системы беритесь только за ручку.

Перемещение системы по ровной поверхности

Перемещение системы по наклонной поверхности

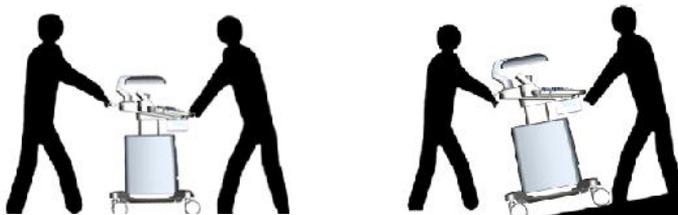

2. При перемещении системы на большие расстояния или по наклонной поверхности соблюдайте особую осторожность. При необходимости воспользуйтесь помощью.

Во избежание опрокидывания системы не перемещайте ее по поверхности с уклоном больше 10° . Пользуйтесь помощью других сотрудников и соблюдайте особую осторожность при перемещении системы по поверхности с уклоном, превышающим 5 градусов, или при погрузке системы в транспортное средство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кресло на колесах можно перемещать только по поверхности, уклон которой составляет менее 5° .



НЕ пытайтесь перемещать пульт оператора, взявшись за кабели или крепления, например за разъемы датчиков.

3. При необходимости используйте тормоз (педальный), размещенный в передней нижней части системы.
4. Не допускайте ударов системы о стены или дверные проемы.
5. При перемещении системы через дверной проем или пороги лифта соблюдайте особую осторожность.
6. По прибытии на место выполнения исследования заблокируйте колеса.

Перемещение системы (продолжение)



Вес системы составляет приблизительно 65 кг без учета датчиков и периферийных устройств. Во избежание получения травм и повреждения оборудования:

- убедитесь, что на пути нет препятствий;
- перемещайте оборудование медленно и осторожно;
- при перемещении оборудования по наклонной поверхности или на большое расстояние передвигайте его по меньшей мере вдвоем.



При перемещении системы с ЖК-монитором НЕ пытайтесь тянуть ее за кабели или ремни, расположенные вокруг монитора и/или его гибкой подставки.

Запуск системы

Подключение системы

Подключение системы к источнику электропитания:

1. Убедитесь, что используется сетевая розетка подходящего типа.
2. Убедитесь, что автоматический выключатель (b) выключен.
3. Размотайте сетевой кабель. Убедитесь, что имеется достаточный запас длины кабеля, благодаря которому вилка не будет выдернута из розетки в случае небольшого перемещения системы.



Используйте совместимый с данной системой шнур питания, входящий в комплект поставки устройства, либо рекомендованный GE.

4. Подсоедините вилку питания к системе и зафиксируйте ее с помощью зажима (a).

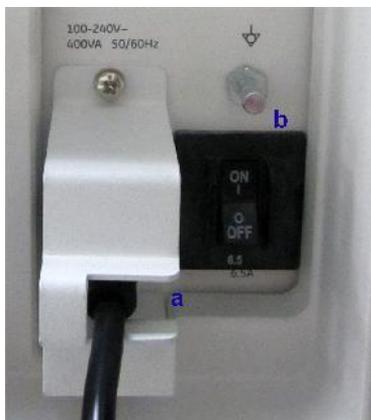


Рис. 1-9. Выключатель и вилка питания

ПРИМЕЧАНИЕ:

5. Плотно вставьте вилку питания в сетевую розетку. *Запрещается использовать удлинительный шнур и вилку-переходник.*
6. Убедитесь, что выключатель включен (b). Индикатор питания загорится синим цветом.

Подключение системы (продолжение)



Во избежание риска возгорания систему следует подсоединить к отдельной стенной розетке соответствующего номинала. Более подробную информацию см.: 'Информация, которую необходимо принять к сведению до того, как оборудование будет доставлено' на *стр. 1-6*.

Ни при каких обстоятельствах не допускается заменять, модифицировать или адаптировать вилку сетевого шнура для подключения к сети с номинальными параметрами, отличными от указанных. Запрещается использовать удлинительный шнур и вилку-переходник.

Для обеспечения надежного заземления используйте только заземленную сетевую розетку класса "для больниц" или "только для больниц".



Следите за тем, чтобы в процессе эксплуатации системы кабель питания не отсоединялся от розетки.

Неожиданное отключение системы от сети питания может привести к потере данных.



Отсутствие заземления может вызвать поражение электрическим током, приводящее к тяжелым травмам.

В большинстве случаев не требуется подключать дополнительные провода заземления или провода для выравнивания потенциалов. Такая мера рекомендуется при работе с несколькими устройствами в условиях повышенного риска, поскольку она обеспечивает равенство потенциалов и ограничивает значение тока утечки. Примером условий повышенного риска может служить, в частности, процедура, в ходе которой отведения кардиостимулятора создают токопроводящий путь к сердцу пациента.

Подключение системы (продолжение)

Проверка уровня напряжения

Проверьте наклейку с номинальными параметрами на задней стороне системы. Проверьте диапазон напряжения, указанный на наклейке.

Подключение к электрической розетке



МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕБОЙ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Для ультразвуковой системы требуется отдельная цепь питания. Чтобы избежать перегрузки в сети и возможной порчи реанимационного оборудования, убедитесь в том, что никакое другое оборудование НЕ подключено к этой же цепи.



В случае экстренной ситуации выньте вилку из настенной розетки. Обеспечьте свободный доступ к сетевой розетке.

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель размещен на задней панели системы. Если выключатель установлен в положение On (Вкл.), питание подается на все внутренние компоненты устройства. Если выключатель установлен в положение Off (Выкл.), подача питания прекращается. В случае перегрузки сети питания автоматический выключатель прерывает подачу питания на систему.

При возникновении перегрузки сети питания:

1. Выключите все периферийные устройства.
2. Вновь включите автоматический выключатель.



Рис. 1-10. Автоматический выключатель (размещенный на задней панели системы)

Автоматический выключатель должен оставаться в положении **On** (Вкл.); **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** принудительно удерживать выключатель в положении **On** (Вкл.). Если автоматический выключатель остается в положении **On** (Вкл.), выполните процедуру включения питания системы.

1. Положение "On" (Вкл.)
2. Положение "Off" (Выкл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автоматический выключатель **не** остается в положении **On** (Вкл.) или вновь выключается, выполните следующие операции:

1. Отсоедините сетевой шнур.
2. Немедленно обратитесь в сервисный центр.

НЕ используйте систему.

Включение питания



Включите питание с помощью выключателя **Power On/Off** (Питание вкл./выкл.). Автоматический выключатель также должен находиться в положении "On" (Вкл.).
Дополнительная информация по расположению автоматического выключателя приведена в 'Автоматический выключатель' на *стр. 1-27*.

После успешной загрузки системы цвет индикатора питания сменится с синего на зеленый.

Вход в систему

LOGIQ F позволяет создавать личные идентификаторы с паролями.

Если параметр User Auto Logon (Автоматический вход в систему) не установлен, появится запрос на вход в систему.



Рис. 1-11. Окно "Operator Login" (Входа оператора в систему)

- **Operator** (Оператор): выберите оператора.
- **Password** (Пароль): введите пароль оператора (дополнительно).
- Выберите тип входа в систему или отмените вход.
 - **OK**: обычный вход в систему.
 - **Cancel** (Отмена): отмена входа в систему.

Отключение питания

Отключение питания системы

1. При завершении работы системы войдите в экран сканирования и один раз слегка нажмите на **выключатель питания** на передней панели системы. Отобразится окно выхода из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: *НЕ нажимайте и НЕ удерживайте выключатель Power On/Off (Питание вкл./выкл.), чтобы отключить систему.*

2. Выберите Shutdown (Выключение) с помощью **трекбола**.

Процесс выключения системы занимает несколько секунд и полностью завершается, когда цвет индикатора питания меняется с зеленого на синий.

ПРИМЕЧАНИЕ: *НЕ пытайтесь использовать для выключения опцию Exit (Выход). Опция Exit доступна только для работников Отдела технического обслуживания.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если система не отключилась полностью в течение 60 секунд, нажмите и удерживайте выключатель "On/Off" (Вкл./Выкл.) до тех пор, пока она не отключится.*

3. Отсоедините датчики.

При необходимости очистите или продезинфицируйте все датчики. Храните их в фабричной упаковке или другой подходящей системе хранения датчиков во избежание повреждений.



НЕ отключайте автоматический выключатель пока монитор не выключится.

Отключение автоматического выключателя до выключения системы может привести к потере данных или неисправности программного обеспечения.

4. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Инструкции по восстановлению системы после сбоя

В случае обнаружения внутренней ошибки система может перезагрузиться самостоятельно. В случае перезагрузки система автоматически запускает стартовый экран. Все изображения и результаты измерений, кроме общих рабочих таблиц, сохраняются в системе.

Система автоматически заканчивает проведение текущего обследования и сохраняет все изображения и результаты измерений. При перезагрузке системы убедитесь, что все изображения и результаты измерений были сохранены. Чтобы произвести стандартную процедуру отключения системы, просто нажмите и удерживайте выключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если после запуска системы содержимое экрана не обновляется надлежащим образом, выключите систему еще раз.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Общие рабочие таблицы не восстанавливаются, если системный сбой происходит до сохранения данных.*



Системный сбой может привести к повреждению внутреннего жесткого диска. Не используйте внутренний жесткий диск для постоянного хранения данных. Регулярно выполняйте резервное копирование данных.

Датчик

Подсоединение датчика

Используйте только разрешенные к применению датчики.

Проверяйте датчик до и после использования на предмет наличия повреждений или дефектов корпуса, снижения упругости, потери целостности линзы и разъема, а также на герметичность. **НЕ** используйте датчик, имеющий видимые повреждения, до тех пор, пока не убедитесь в его правильной работе и безопасности. Внимательно осматривайте датчик в процессе чистки.



Удалите всю пыль и остатки пены со штырьков датчика.



Ненадлежащее обращение с датчиком может привести к поражению электрическим током. Не касайтесь поверхности разъемов датчика, к которым открывается доступ при удалении датчика. Не прикасайтесь к пациенту при подсоединении или отсоединении датчика.

Подсоединение датчика (продолжение)

Датчики можно подсоединить в любой момент независимо от того, включен или не включен пульт оператора. Для того чтобы порты не были активными, переведите систему в режим стоп-кадра.

Для подсоединения датчика выполните следующие действия.

1. Положите футляр с датчиком на ровную поверхность и откройте его.
2. Осторожно извлеките датчик из футляра и размотайте шнур датчика.
3. Поместите датчик в держатель для датчика.



НЕ допускайте подвешивания головки датчика в незакрепленном положении. Удар по головке может привести к неустранимой неисправности датчика.

4. Держите разъем датчика вертикально кабелем вверх.
5. Передвиньте разъем влево (разблокированное положение).

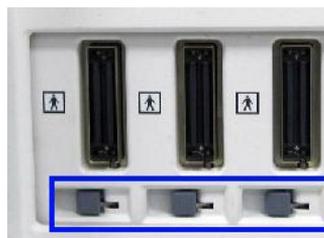


Рис. 1-12. Разблокированное положение

6. Совместите разъем с портом датчика и аккуратно зафиксируйте его на месте.



Рис. 1-13. Подсоединение датчика

Подсоединение датчика (продолжение)

7. Передвиньте разъем вправо для блокировки разъема датчика.



Рис. 1-14. Заблокируйте разъем датчика.

8. Аккуратно разместите шнур датчика так, чтобы датчик можно было свободно перемещать и шнур не касался пола.



Рис. 1-15. Подключения датчика кабеля

Использование кабелей

При использовании кабелей соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Следите за тем, чтобы колеса тележки не наезжали на кабели.
- Не допускайте сгибания кабелей под острыми углами.
- Избегайте перекрещивания кабелей разных датчиков.

Включение/выключение датчика

Для включения датчика выберите соответствующий датчик из списка индикаторов на экране "Probe" (Датчик) / "Preset" (Установка параметров).

Для отключения датчика выберите другой датчик или нажмите кнопку **Freeze** (Стоп-кадр) для перехода в режим попеременной съемки.

Для выбранного режима и обследования автоматически используются настройки датчика по умолчанию.



Убедитесь, что названия датчика и приложения, отображаемые на экране, соответствуют фактически выбранному датчику и приложению.

Отсоединение датчика

Датчики можно отсоединить в любое время. Однако при отсоединении датчик должен быть обязательно выключен.

1. Отключение датчика.
2. Передвиньте разъем влево для разблокирования датчика.
3. Осторожно потяните за разъем датчика по направлению от порта датчика.
4. Освободите кабель.
5. Прежде чем поместить датчик в футляр для хранения или в настенную секцию, убедитесь, что датчик чистый.

Начало исследования

Экран архивирования данных

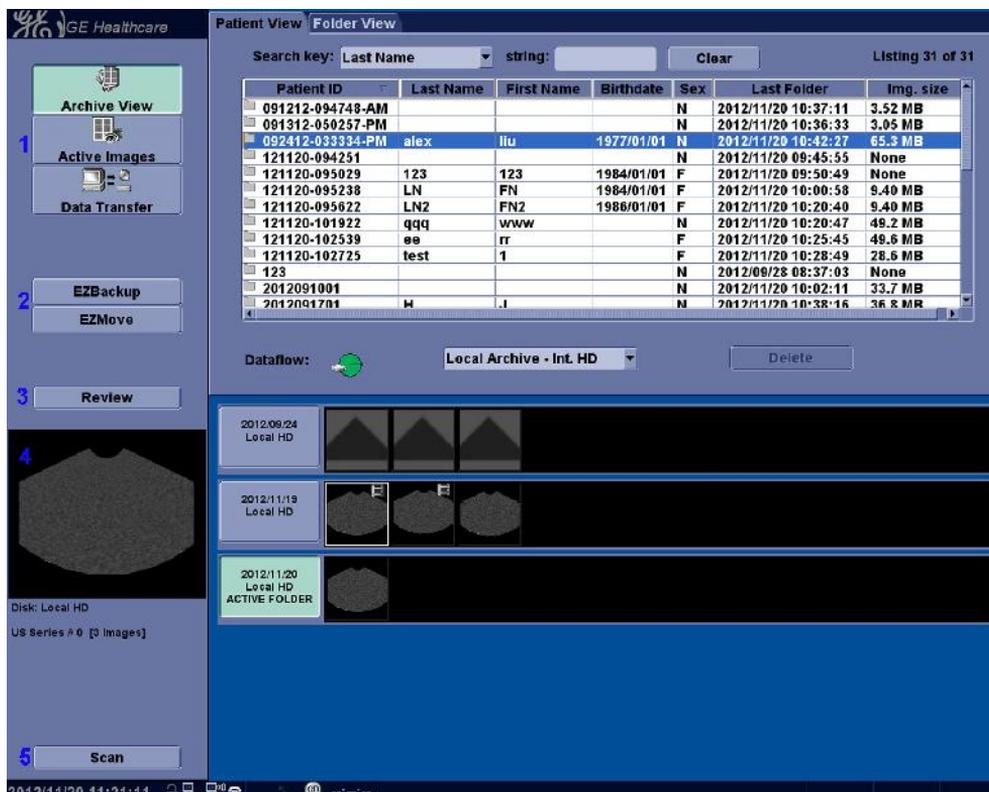


Рис. 1-16. Экран архивирования данных 1

1. Управление изображениями: выберите изображение для обработки.
2. EZBackup/EZMove - простой способ резервного копирования (перемещения и удаления) изображений пациента на внешний носитель в один прием.
3. Просмотр: выберите изображение для просмотра.
4. Эскиз: предоставляет пользователь эскиз выбранного изображения.
5. Сканирование: выберите изображение для сканирования.

Экран архивирования данных (продолжение)

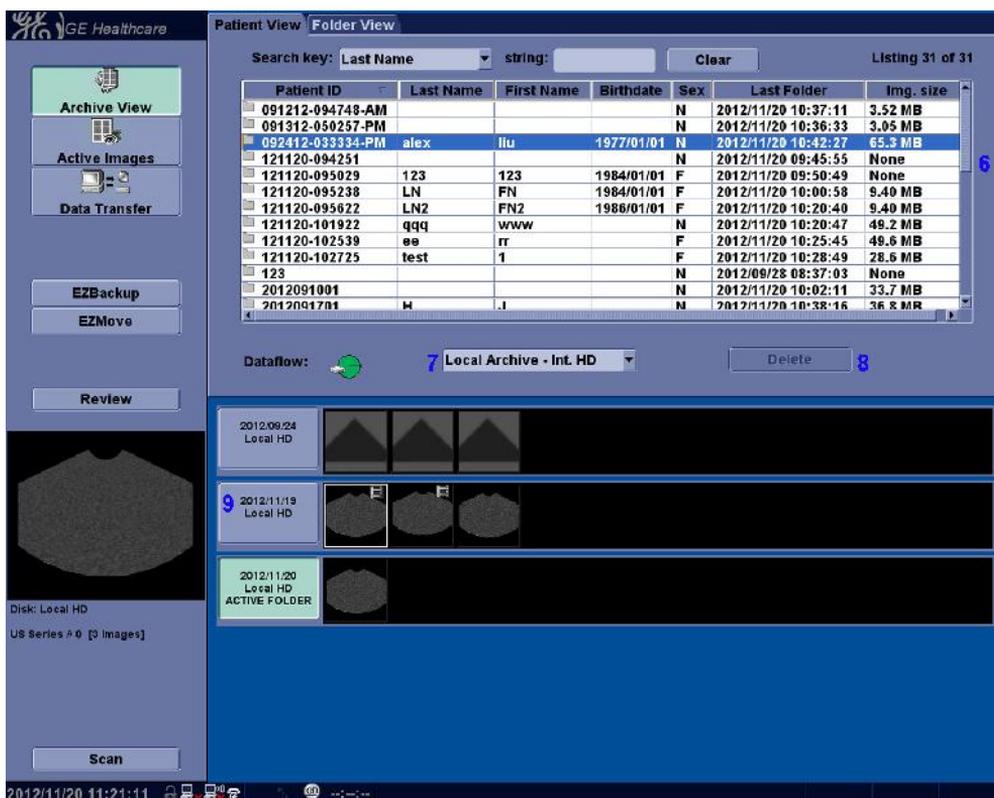


Рис. 1-17. Экран архивирования данных 2

6. Просмотр пациентов: позволяет просмотреть список пациентов из базы данных.
7. Выбор потока данных: позволяет выбрать соответствующие данные о пациента из памяти системы, карты памяти USB или DVD-диска.
8. Удалить: позволяет удалить выбранного пациента.
9. Информация об исследовании: отображает историю исследований выбранного пациента.

Экран архивирования данных (продолжение)



Для обеспечения максимальной производительности и для сохранения конфиденциальности данных пациентов общее число пациентов в базе данных должно быть менее 1000.

Для сокращения общего количества пациентов в базе данных, примените функции "EZBackup" и "Backup" (выберите пункты "Patient Archive" (Архив пациентов) и "Report Archive" (Архив отчетов)), и затем удалите пациентов из системы.

Сканирование нового пациента



Функция визуализации могут быть утрачена без уведомления. Разработайте план действий в аварийных ситуациях, чтобы предварительно подготовиться к ним.



Убедитесь, что поток данных выбран. Если выбран пункт "No Archive" (Не архивировать), данные пациента не сохраняются. Будет отображен следующий поток данных:



Чтобы избежать ошибок в ходе идентификации пациентов, обязательно проводите верификацию идентификации пациента. Убедитесь, что правильный идентификатор пациента присутствует на всех экранах и на распечатках.



Для получения приемлемых изображений в соответствии с действующими рекомендациями и нормативами всегда используйте минимально необходимую мощность.



Всегда устанавливайте систему на плоской поверхности.



Во время исследования следите за тем, чтобы руки пациента не касались системы.

Положение оператора и пациента зависит от сканируемой области.

В большинстве случаев оператор сидит (стоит) непосредственно перед панелью управления, а пациент лежит на кушетке справа (или слева) от системы.

Сканирование нового пациента (продолжение)

Перед началом исследования нового пациента необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Patient** (Пациент) на панели управления или контрольной панели.

Рис. 1-18. Создание записи о новом пациенте

2. Идентификационный номер пациента будет автоматически создан системой. У оператора есть возможность редактировать идентификационный номер и вносить информацию о пациенте.
3. Выберите датчик и приложение.
4. Нажмите кнопку **Scan** (Сканирование) для начала сканирования.
5. Выполните исследование.

При необходимости изменения информации о пациенте во время сканирования заново нажмите кнопку **Patient** (Пациент). При необходимости изменения информации о датчике или изменения параметров во время сканирования заново нажмите кнопку **Probe** (Датчик) / **Preset** (Установка параметров).

Сканирование нового пациента (продолжение)

6. Для сохранения статического изображения или анимационной последовательности, сохраненной в буфер при проведении исследования, нажмите кнопку **P1** или **P2**.
7. При завершении исследования нажмите кнопку **End Exam** (Завершение исследования) на панели управления или сенсорной панели для завершения работы с текущим пациентом. Система автоматически сохраняет все изображения, присвоенные пациенту.

Для хранения изображений пациента система создает новую папку и новый профиль пациента на экране архивирования. Каждому пациенту присваивается только одна папка в день вне зависимости от количества проведенных исследований.

Начало нового обследования зарегистрированного пациента

1. Нажмите кнопку **Archive** (Архивирование) на панели управления.
2. Выберите пациента из списка пациентов.
3. Нажмите кнопку **Scan** (Сканирование) для начала сканирования, проведите исследование.

При необходимости изменения информации о пациенте во время сканирования нажмите кнопку **Patient** (Пациент).

4. Для выбора датчика и приложения нажмите кнопку **Probe** (Датчик) / **Preset** (Установка параметров) на панели управления

При необходимости изменения информации о датчике или изменения параметров во время сканирования заново нажмите кнопку **Probe** (Датчик) / **Preset** (Установка параметров).

5. Для сохранения статического изображения или анимационной последовательности, сохраненной в буфер при проведении исследования, нажмите клавишу **P1** или **P2**.

6. При завершении исследования нажмите кнопку **End Exam** (Завершение исследования) на панели управления или сенсорной панели для завершения работы с текущим пациентом. Система автоматически сохраняет все изображения, присвоенные пациенту.

В случае отсутствия папки для хранения изображений на текущий день, система автоматически создаст новую.

Сканирование без ввода сведений о пациенте

Для осуществления сканирования без ввода сведений о пациенте до завершения исследования:

1. Нажмите кнопку **End Exam** (Завершение исследования) на панели управления или Сенсорная панель для завершения последнего исследования. Система автоматически сохраняет все изображения, присвоенные пациенту.
2. Осуществите сканирование пациента и сохраните изображения в буфер обмена без включения информации о пациенте. Система отобразит предупредительное сообщение "Warning: A patient must be selected for permanent storage of image" ("Внимание: для сохранения изображения необходимо выбрать пациента") Нажмите **OK**.
3. Для создания нового пациента нажмите кнопку **Patient** (Пациент) на панели управления или Сенсорная панель. Данное диалоговое окно будет отображено в том случае, если данные исследования не были сохранены.

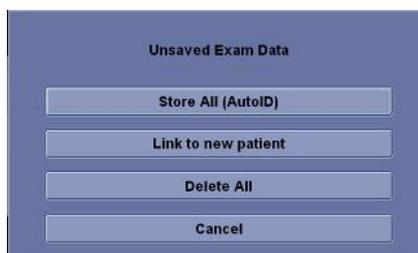


Рис. 1-19. Несохр. данные!

- a. **Store All (Auto ID) (Сохранить все (Автоматическая идентификация))** Присваивает несохраненные данные пациенту, который был автоматически создан системой, и отображает экран с данными нового пациента.
- b. **Link to new patient (Связать с новым пациентом).** Отображает экран с данными нового пациента, связывает несохраненные изображения с новым пациентом.
- c. **Delete All (Удалить все).** Удаляет все несохраненные изображения и отображает экран с данными нового пациента.
- d. **Cancel (Отмена).** Оставляет несохраненные данные без изменения, возвращается к процедуре сканирования.

Изменения статуса пациента с "текущего" на "существующий" (с/без идентификационного кода пациента)

Для изменения статуса пациента с "текущего" на "существующий" (с/без идентификационного кода пациента) при наличии несохраненных изображений текущего пациента в буфере обмена:

Выберите существующего пациента из списка на экране **Archive** (Архивирование). Отобразится следующее диалоговое окно.



Рис. 1-20. Unsaved Exam Data (Archive) (Несохраненные данные исследования (Архив))

1. Диалоговое окно будет различаться, если текущий пациент имеет либо не имеет идентификационный код.
 - a. Пациент имеет идентификационный код: **Store All (xxx) (Сохранить все (xxx))**. Идентификатор пациента указывает идентификатор, на котором хранятся несохраненные данные; он должен совпадать с текущим идентификатором пациента.
Нажмите кнопка **Scan** (Сканирование) для начала сканирования. Система отобразит диалоговое окно "Current Patient will be changed to ID: xxx. ("Текущий пациент будет заменен на ID:xxx.") Do you want to continue?" ("Идентификатор текущего пациента будет изменен на идентификатор:xxx. Продолжить?"). Нажмите "Yes" (Да) для изменения выбранного пациента и "No" (Нет) для сохранения текущего пациента.
 - b. Пациент не имеет идентификационный код: **Store All (Auto ID) (Сохранить все (Автоматическая идентификация))**. Присваивает несохраненные данные пациенту, который был автоматически создан системой.
2. **Review Images (Просмотр изображений)**. Позволяет просматривать несохраненные изображения на вкладке **Active Image** (Активное изображение).
Нажмите кнопку **Scan** (Сканирование) для начала сканирования текущего пациента.

Изменения статуса пациента с "текущего" на "существующий" (с/ без идентификационного кода пациента) (продолжение)

3. **Delete All (Удалить все)**. Позволяет удалить все несохраненные изображения.
Нажмите кнопка **Scan** (Сканирование) для начала сканирования. Система отобразит диалоговое окно "Current Patient will be changed to ID: xxx. ("Текущий пациент будет заменен на ID:xxx.") Do you want to continue?" ("Идентификатор текущего пациента будет изменен на идентификатор:xxx. Продолжить?"). Нажмите "Yes" (Да) для изменения выбранного пациента и "No" (Нет) для сохранения текущего пациента.
4. **Cancel (Отмена)**. Оставляет несохраненные данные без изменения, возвращается к вкладке **Archive** (Архивирование).

Глава 2

Выполнение обследования

Оптимизация изображения, измерения и анализа

Оптимизация изображения

Элементы управления В-режима

В-режим предназначен для отображения двумерных изображений и позволяет проводить измерения, связанные с анатомической структурой мягких тканей.

Таблица 2-1: Элементы управления В-режима

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Глубина	Да	Глубина изображения позволяет контролировать расстояние, на котором В-режим отображает двумерные изображения, а также область сканирования. Увеличьте глубину для того, чтобы сделать видимыми более глубокие структуры. Уменьшите глубину для того, чтобы сделать видимыми более ровные структуры.
Усиление	Нет	Коэффициент усиления в В-режиме увеличивает или уменьшает количество эхо-сигналов в изображении. Он может увеличить или уменьшить яркость изображения, если генерируется достаточное количество эхо-сигналов.
Фокус	Да	Увеличивает число точек фокуса, перемещает точки фокуса и изменяет ширину фокусной зоны, что позволяет уплотнить пучок в соответствии с конкретной областью. У правого края изображения появляется графический курсор, соответствующий положению точек фокуса.
Автоматическая оптимизация	Нет	Функция "Auto Optimize (Auto)" (Автоматическая оптимизация) позволяет оптимизировать изображение в В-режиме на основании текущих данных (Автоматическая оптимизация по ткани, АТО). Предустановленные уровни (Low (Низкий), Medium (Средний) и High (Высокий)) позволяют выбрать настройки для усиления контрастности полученного изображения. Низкий уровень обеспечивает наименьшее усиление контрастности, высокий - наибольшее. Функция автоматической оптимизации доступна при работе с одним или несколькими изображениями; изображениями, полученными в режимах реального времени, стоп-кадра или кинопетли (только в В-режиме); а также при масштабировании и в режиме спектрального доплера.
Курсор режима	Нет	Отображает курсор M/D-режима на изображении в В-режиме.

Таблица 2-1: Элементы управления В-режима (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
CrossXBeam	Да	CrossXBeam — это процесс объединения трех или более кадров, полученных под различным углом, в единый кадр. Функция CrossXBeam доступна при работе с конвексными и линейными датчиками. Функция CrossXBeam обеспечивает объединение методом бикубической интерполяции нескольких планарных изображений, полученных под разными углами зрения, в одно изображение с частотой кадров режима просмотра в реальном времени.
Режим кодированной гармоник (CHI)	Да	Гармоническое изображение использует закодированный цифровой ультразвуковой сигнал (DEU). (DEU) Кодированные гармоник позволяют повысить разрешение в ближней зоне для улучшения изображения поверхностно расположенных органов, а также проникновение в глубоко лежащие структуры.
Частота	Да	Изменение частоты
Steer	Да	Система позволяет изменять угол акустического пучка в В-режиме или при ЦДК. Функция выбора угла применима только для линейных датчиков.
Виртуальный конвекс	Да	В линейных датчиках виртуальный конвекс обеспечивает большую площадь обзора.
КУ (Компенсация усиления)	Нет	Функция КУ усиливает возвращенные сигналы, чтобы скорректировать затухание, вызванное проникновением сигналов в ткани на большую глубину. Ползунковые потенциометры для регулировки КУ разнесены пропорционально глубине. Область, которая усиливается каждым регулятором, также изменяется. На экране может появиться кривая КУ (при наличии предварительной настройки), соответствующая настройкам элементов управления (исключая режим масштабирования). Можно выбрать режим деактивации кривой КУ на изображении.
Ширина	Да	Можно расширить или сузить угол сектора/конвекса для наилучшего рассмотрения исследуемой области изображения.
Наклон	Да	Можно регулировать угол сектора для получения большего количества данных без перемещения датчика в В-режиме, М-режиме, доплеровском режиме и режиме ЦДК. Примечание: функция наклона неприменима для линейных датчиков. Примечание: функция наклона доступна только при выключении функции CrossXBeam.
Возврат	Нет	Служит для поворота изображения влево и вправо на 180 градусов.

Таблица 2-1: Элементы управления В-режима (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Динамический диапазон	Нет	Функция динамического диапазона регулирует преобразование значений интенсивности эхо-сигналов в градации серого, благодаря чему формируется диапазон шкалы яркости, который можно отрегулировать.
Плотность линий	Да	Оптимизирует частоту кадров в В-режиме или пространственное разрешение для улучшения качества изображения.
Карта серого	Нет	Система формирует шкалы для режимов В, М и доплера.
Усреднение кадров	Нет	Временной фильтр усредняет кадры, благодаря чему для составления одного изображения используется большее число пикселей. В результате получается более сглаженное изображение.
Окрашивание	Нет	<p>Функция окрашивания представляет собой раскрашивание поверхности изображения в В-режиме или режиме спектрального доплера для улучшения возможностей пользователя различать интенсивность цвета в В-, М- и доплеровском режимах. Окрашивание — это НЕ доплеровский режим.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ: окрашиванию можно подвергать только изображения в реальном времени и изображения CINE и CINE временной шкалы.</i></p> <p>Окрашивает черно-белые изображения для улучшения их восприятия на экране. Спектральный цветовой режим служит для добавления цвета в спектр в зависимости от мощности сигнала с применением инвертирования карты интенсивности сигнала цветового режима в каждой доплеровской линии. Цветовой режим улучшает наглядность характеристик спектра и позволяет лучше идентифицировать расширение спектра и его контуры, используемые для определения пиковой частоты/ скорости.</p> <p>Шкала окрашивания отображает включение режима окрашивания.</p>
Усиление контуров	Нет	Служит для выделения едва заметных различий и границ в тканях с помощью шкалы серого в соответствии с контурами структур.
Поворот	Нет	<p>Имеется возможность вращать изображения в направлении вверх и вниз.</p> <p>ВНИМАНИЕ: при просмотре повернутого изображения внимательно следите за ориентацией датчика во избежание возможной путаницы при определении направления сканирования или поворота изображения вправо/влево.</p>
Уровень отсеечения сигналов	Нет	Позволяет выбрать уровень, ниже которого эхо-сигналы не будут усиливаться (для того чтобы эхо-сигнал можно было обрабатывать, он должен иметь определенную минимальную амплитуду).
Подавление	Нет	Подавление помех.

Таблица 2-1: Элементы управления В-режима (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
SRI-HD	Нет	SRI-HD (Визуализация с высоким разрешением и подавлением зернистости) — это адаптивный алгоритм, позволяющий уменьшить нежелательный эффект зернистости на ультразвуковом изображении.
LOGIQView (поставляется дополнительно)	Нет	<p>Функция LOGIQView дает возможность создать и просмотреть статическое 2D-изображение, которое шире поля обзора выбранного датчика. Эта функция обеспечивает просмотр и измерение анатомических структур большего размера, чем одиночное изображение. Например: сканирование сосудистых структур и соединительной ткани верхних и нижних конечностей.</p> <p>Функция LOGIQView позволяет создать расширенное изображение из отдельных кадров по мере того, как оператор перемещает датчик вдоль поверхности кожи в направлении плоскости сканирования. Качество полученного изображения до некоторой степени зависит от оператора и требует некоторых дополнительных навыков и практики для приобретения соответствующей квалификации.</p> <p>Функция LOGIQView доступна только В- и CINE-режимах.</p>

Элементы управления режима ЦДК

ЦДК и цветной М-режим — это доплеровские режимы, предназначенные для добавления кодированной цветом количественной информации об относительной скорости и направлении движения потока на изображения в В-режиме или М-режиме.

Таблица 2-2: Элементы управления режима ЦДК

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Выбор потока	Нет	В приложениях "LEV" (Lower Extremity Vein — Вена нижней конечности) и "Abdominal" (Брюшная полость) можно быстро выбрать состояние потока с помощью ярлыка в меню ЦДК.
Усиление	Нет	Коэффициент усиления увеличивает суммарную силу эхосигналов, обработанных в окне режима ЦДК или во временной шкале спектрального доплера.
Шкала (шкала скоростей)	Да	Служит для увеличения/уменьшения масштаба шкалы скоростей на цветовой шкале.
Фильтр движения стенок	Нет	Отфильтровывает сигналы, соответствующие кровотокам с низкими скоростями. Позволяет устранить артефакты движения, появляющиеся вследствие дыхательной и другой двигательной активности пациента.
Размер/Положение	Да	Регулировка размера и положения цветного окна.
Инверсия (Инверсия цвета)	Нет	Позволяет просматривать кровоток в различных направлениях, например: красный – назад (отрицательные скорости), синий - вперед (положительные скорости). Можно инвертировать как изображение в режиме реального времени, так и изображение в режиме стоп-кадра. <i>ПРИМЕЧАНИЕ: Функция инвертирования реверсирует карту цвета, а НЕ цвет ЧПИ.</i>
Базовая линия	Нет	Изменяет линию развертки изображения ЦДК или доплеровского спектра в соответствии с повышенной скоростью кровотока. Минимизирует искажения из-за недостаточной частоты выборки за счет установки большего диапазона кровотока в прямом направлении, чем в обратном направлении, и наоборот. Базовая линия позволяет отрегулировать точку наложения. Базовая линия по умолчанию размещается в средней точке цветového изображения и в средней цветовой шкалы контрольного изображения.
Angle Steer (Отклонение угла)	Да	Исследуемую область линейного изображения в В-режиме или в режиме ЦДК можно наклонить влево или вправо для получения сведений без перемещения датчика. Функция отклонения угла применима только для линейных датчиков.
Накопление	Нет	Накопление времени в режиме ЦДК.

Таблица 2-2: Элементы управления режима ЦДК (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Плотность линий сканирования в режиме ЦДК	Да	Оптимизирует частоту кадров или пространственное разрешение в режиме ЦДК для получения цветного изображения наилучшего качества.
Карта	Нет	Позволяет выбрать определенную цветовую карту. После того как вы сделаете выбор, на цветовой шкале отобразится полученная карта.
Сжатие карты	Нет	Изменение градации тона на цветовой карте.
Порог	Нет	Ограничивает наложение цветового потока на эхо-сигналы низкого уровня в стенках сосудов. Позволяет минимизировать «утечку» цвета за пределы стенок сосудов.
Усреднение кадров	Нет	Усредняет цветовые кадры.
Карта прозрачности	Нет	Ткани отображаются как фон цветовой карты.
Пространственный фильтр	Нет	Смягчает цвет, чтобы он выглядел менее пиксельно.
Подавление вспышек	Нет	Активирует/деактивирует функцию "Flash Suppression" (Подавление вспышки), запускает процесс удаления артефактов движения.
Размер пакета	Да	Позволяет отрегулировать число образцов, собранных для одиночного вектора кровотока.
Sample Volume (Контрольный объем)	Да	Регулировка размера доплеровской проходящей волны цветового потока (или импульса) и размера (или длины). Чем меньше установленное значение, тем лучше разрешение потока, и чем выше установленное значение, тем выше чувствительность.

Таблица 2-2: Элементы управления режима ЦДК (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Автоматический пробный объем в режимах ЦДК/ЭД	Да	Установите значение по умолчанию в меню Utility (Утилиты) -> Imaging (Визуализация) -> CF Mode (Режим ЦДК).
Глубина фокуса в режимах ЦДК и ЭД	Да	
CF/PDI Frequency (Частота в режиме ЦДК/ЭД)	Да	
Автоматическая частота в режимах ЦДК и энергетического доплера	Да	
CF/PDI Center Depth (Глубина изображения по центру в режиме ЦДК/ЭД)	Да	
PDI (ЭД)	Да	Визуализация в режиме энергетического доплера (ЭД) — это метод ЦДК, используемый для составления карты по интенсивности доплеровского сигнала, отраженного от ткани, а не по частотному сдвигу сигнала. С помощью этого метода ультразвуковая система графически в цвете отображает кровоток исходя из количества движущихся отражателей независимо от их скорости. В режиме энергетического доплера не отображается скорость, поэтому изображение не подвержено искажению четкости.
TVI (поставляется дополнительно)	Да	Режим визуализации скорости движения тканей (TVI) позволяет рассчитывать и кодировать цветом скорость движения тканей. Данные о скорости движения тканей получаются посредством выборки значений скорости, полученных в режиме тканевого доплера для отдельных точек. Эта информация сохраняется в комбинированном формате вместе с данными визуализации в шкале серого, полученными в течение одного или нескольких сердечных циклов при высоком временном разрешении.
TVD	Да	TVD: тканевая доплерография: основываясь на функциях режима TVI, TVD осуществляет импульсно-волновое исследование желудочковой стенки в заданном объеме для получения спектральной информации о заданной области.
Анализ Q-методом (дополнительная функция)	Да	Анализ Q-методом доступен для ряда изображений, полученных в следующих режимах: TVI, ЦДК, ЭД и Эластография. Операции во всех режимах анализа Q-методом выполняются аналогичным образом с незначительными различиями.

Элементы управления М-режима

М-режим обеспечивает формат отображения и измерения, относящиеся к смещению (движению) тканей в течение определенного периода времени по отдельно взятому вектору.

Таблица 2-3: Элементы управления М-режима

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Скорость развертки	Нет	Изменяет скорость развертки временной шкалы. Возможно применение в М-режиме, доплеровском режиме и в М-режиме с ЦДК.
Анатомический М-режим (дополнительная функция)	Да	Анатомический М-режим дает возможность манипулировать курсором под различным углом и в разных положениях. Дисплей М-режима изменяется в зависимости от перемещений М-курсора.

М-режим с ЦДК

М-режим с ЦДК используется для кардиологических исследований. Изображение, полученное в режиме ЦДК, накладывается на изображение в М-режиме с использованием цветowych карт дисперсии и скорости. Сектор изображения ЦДК накладывается на изображение в В-режиме и на временную шкалу в М-режиме.

См. 'Элементы управления режима ЦДК' на *стр.* 2-6.

Элементы управления доплеровского режима

Допплеровский режим предназначен для представления данных измерений скорости движения тканей и жидкостей. Импульсно-волновой доплер позволяет выборочно просматривать данные кровотока на примере небольшого участка, называемого пробным объемом.

Таблица 2-4: Элементы управления доплеровского режима

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Автоматическая оптимизация спектра [ASO] (Авто)	Да	Функция автоматической оптимизации в доплеровском режиме позволяет оптимизировать спектральные данные. Эта функция регулирует шкалу скорости/ЧПИ (только для изображений, полученных в режиме реального времени), смещение базовой линии и инверсию (при наличии соответствующей предварительной настройки). Преимущество этой функции заключается в сокращении времени оптимизации, а также в более последовательном и точном выполнении оптимизации.
Set (Настройка В-режима) / В Pause (Пауза В-режима)	Да	Переключение между режимами одновременного и обновляемого отображения во время просмотра временной шкалы.
Положение пробного объема (трекбол)	Да	Перемещает строб контрольного объема с помощью доплеровского курсора в В-режиме. Контрольный размещается в определенном положении в просвете сосуда.
Длина пробного объема в доплеровском режиме	Да	Позволяет изменять длину строба контрольного объема.
Шкала (шкала скоростей)	Да	Регулирует шкалу скоростей для адаптации к более высоким/ низким скоростям кровотока. Шкала скорости определяет частоту повторения импульсов. Если зона охвата строба пробного объема превышает диапазон шкалы для одиночного строба, система автоматически переключается в режим высокой ЧПИ. Появится несколько пробных объемов, и на экране отобразится "HPRF" (ВЧПИ).
Корректировка угла	Нет	Оценивается скорость кровотока в направлении под углом к доплеровскому вектору посредством расчета угла между доплеровским вектором и подлежащим измерению потоком. <i>ПРИМЕЧАНИЕ: Если курсор доплеровского режима и индикатор изменения угла располагаются на одной линии (угол равен 0), индикатор изменения угла не отображается.</i>
Быстрое изменение угла	Нет	Быстро изменяет угол на 60°.
Фильтр движения стенок	Нет	Отделяет доплеровский сигнал от избыточного шума, вызванного движением сосудов.

Таблица 2-4: Элементы управления доплеровского режима (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Базовая линия	Нет	Изменяет линию развертки в соответствии с кровотоком более высокой скорости для устранения эффекта алязинга.
Курсор режима	Нет	Отображает курсор доплеровского режима на изображении в В-режиме.
Отклонение угла и выбор точного угла	Да	Исследуемую область линейного изображения в В-режиме или в режиме ЦДК можно наклонить влево или вправо для получения сведений без перемещения датчика. Функция выбора угла применима только для линейных датчиков.
Объем	Нет	Регулирует выход аудиосигнала.
Инверсия	Нет	Инверсия спектрального сигнала по вертикали без влияния на положение базовой линии.
Сжатие	Нет	Функция динамического диапазона регулирует преобразование значений интенсивности эхо-сигналов в градации серого, благодаря чему формируется диапазон шкалы яркости, который можно отрегулировать.
Метод трассировки	Нет	Очерчивает средние и максимальные скорости в изображениях, полученных в режимах реального времени и стоп-кадра.
Усреднить циклы	Нет	Средняя величина из нескольких циклов (от 1 до 5).
Чувствительность трассировки	Нет	Регулирует трассировку таким образом, чтобы форма кривой соответствовала силе сигнала.
Направление трассировки	Нет	Определяет направление трассировки.
Display Format (Формат отображения)	Нет	Изменяет вертикальное/горизонтальное расположение между В-режимом и доплеровским режимом или временную шкалу.
Модифицирование автоматических расчетов	Нет	Активирует меню выбора автоматических расчетов.
Auto Calcs (Автоматические расчеты)	Нет	Автоматически активирует расчеты, выбранные в режиме модифицирования автоматических расчетов, когда система работает в режиме реального времени или в режиме стоп-кадра.
Одновременный (Дуплекс/триплекс)	Да	В режиме "Simultaneous" (Одновременный) система работает в реальном времени. Режим "Simultaneous" (Одновременный) позволяет запускать два (дуплекс) или три (триплекс) режима одновременно. Например, дуплекс означает, что в данный момент активны В-режим и доплеровский импульсно-волновой режим; триплекс означает, что активны В-режим, доплеровский импульсно-волновой режим и ЦДК. Если режим "Simultaneous" (Одновременный) не выбран, используйте клавишу "Set" (Настройка В-режима) / "В Pause" (Пауза В-режима) для переключения между режимами.

Таблица 2-4: Элементы управления доплеровского режима (продолжение)

Элемент управления	Био-эффект	Описание/Преимущество
Непрерывно-волновой доплер (CWD) (дополнительная функция)	Нет	Позволяет получать данные кровотока вдоль курсора доплеровского режима, а не с определенной глубины. Собирает данные вдоль всего доплеровского луча для быстрого сканирования сердца. Режим импульсно-волнового доплера со стробированием по дальности позволяет получать информацию на более высоких скоростях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система LOGIQ F3 не поддерживает непрерывно-волновой доплер.

Упрощенный режим (дополнительная функция)

Таблица 2-5: Варианты 3D-пакета

Тип 3D	Описание	Датчик/Без датчика	Доступные вкладки
Упрощенный режим	Предназначен для формирования изображений в В-режиме, например, изображения лица плода при синдроме Робинсу.	Без датчика	"3D Acquisition" (Получение 3D-изображения), "Easy Mode" (Упрощенный режим), "Movie" (Фильм)

Трехмерное сканирование

1. Оптимизируйте изображение в В-режиме. Равномерно распределите гель.
2. Нажмите клавишу 3D панели управления. Появятся два экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед началом сканирования необходимо присвоить соответствующие значения "Acq Mode" (Режим получения изображения), "Scan Plane" (Плоскость сканирования) и "Scan distance" (Дистанция сканирования).

3. Чтобы начать сканирование, нажмите клавишу **L** (левое окно разделенного экрана).
4. Для выполнения параллельного сканирования равномерно перемещайте датчик. Для получения развертки (веерного сканирования), сделайте одно качательное движение датчиком. Отметьте расстояние сканирования.
5. Трехмерный исследуемый объем (VOI) динамически компонуется на правой половине экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если изображение останавливается до завершения сканирования, начните получение трехмерного исследуемого объема еще раз.

6. Чтобы завершить сканирование, нажмите клавишу **R** (правое окно разделенного экрана).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно также нажать "Freeze" (Стоп-кадр), но после этого придется нажать клавишу 3D для получения окончательной визуализации.

Режим 3D/4D (дополнительная функция)

ПРИМЕЧАНИЕ: Система LOGIQ F3 не поддерживает режим 4D.

Общая информация о режиме 3D/4D

Режим 4D обеспечивает непрерывное получение трехмерных изображений с высокой объемной скоростью. В режиме 4D к трехмерному изображению добавляется новое измерение "движения" благодаря обеспечению непрерывной визуализации в режиме реального времени. С помощью режима 4D возможно применение методов реконструкции для сглаживания изображения анатомических структур, например, позвоночника плода.

С помощью режима 4D можно использовать следующие методы получения объемных данных:

Таблица 2-6: Параметры пакета 4D

Тип 4D	Описание	Режим сбора данных
4D	Непрерывное получение объемных данных 3D-изображения.	B, 4D
Статический 3D-режим	Получение единичного объема данных 3D-изображения.	B, 3D

Функции, доступные в режиме 3D/4D

В режиме 3D/4D доступны следующие функции:

- Большинство элементов управления В-режима
- Аннотации
- Измерения и расчеты

В режиме 3D/4D доступны следующие элементы управления пост-обработкой:

- Режим CINE

Руководство по работе в статическом 3D-режиме

1. Выберите датчик RAB2-6-RS.
2. Нажмите клавишу **4D** на панели управления для включения функции 3D/4D.
3. Выберите **Статический 3D-режим**.
4. Постарайтесь определить срединную сагиттальную плоскость выбранного в качестве примера объекта, как показана срединная сагиттальная плоскость лица плода при синдроме Робиноу на изображении ниже:



Рис. 2-1. Срединная сагиттальная плоскость выбранного в качестве примера объекта

5. Зафиксируйте датчик и нажмите клавишу **L (Left)** (Влево) для начала сканирования.
6. Через 2-3 секунды, после окончания пробного сканирования, система отобразит следующее изображение.

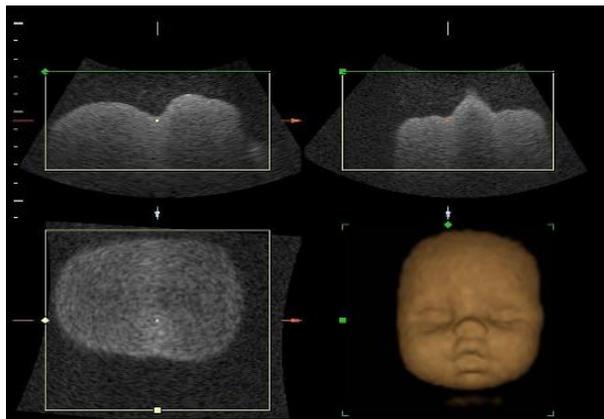


Рис. 2-2. 3D-изображение

Руководство по работе в 4D-режиме

1. Выберите датчик RAB2-6-RS.
2. Нажмите клавишу **4D** на панели управления для включения функции 3D/4D.
3. Выберите **4D**-режим.
4. Постарайтесь определить срединную сагиттальную плоскость выбранного в качестве примера объекта, как показана срединная сагиттальная плоскость лица плода при синдроме Робиноу на изображении ниже:



Рис. 2-3. Срединная сагиттальная плоскость выбранного в качестве примера объекта

5. Зафиксируйте датчик и нажмите клавишу **L (Left)** (Влево) для начала сканирования.
6. Через 2-3 секунды, во время пробного сканирования, система отобразит следующее динамическое 4D-изображение.

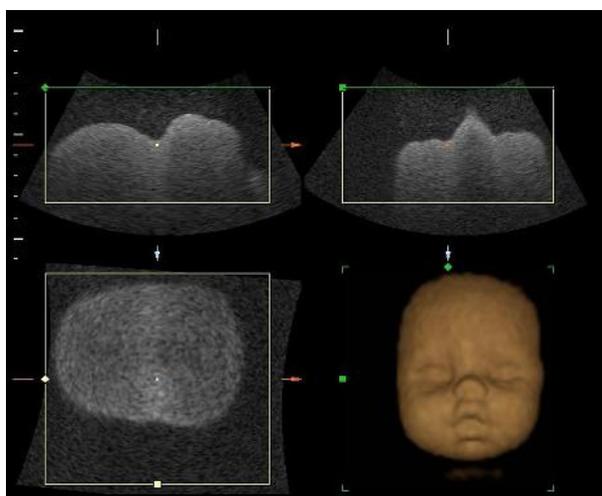


Рис. 2-4. 4D-изображение

Эластография (дополнительная функция)

Описание

Эластография позволяет выявить пространственное распределение эластичности тканей в области исследования по оценке деформации до и после смещения тканей, вызванного внешними или внутренними факторами. Для наглядности изображение деформации фильтруют и масштабируют.

Ниже приведен пример использования эластографии. Система отображает цветовую карту/индикатор режима эластографии, изображение выводится в сдвоенном режиме, параметры визуализации режима эластографии появляются в правой части экрана ниже буквы "E".

Эластография может быть включена при помощи клавиш, назначаемых пользователем, на панели управления.

Эластография поддерживается только линейными датчиками.

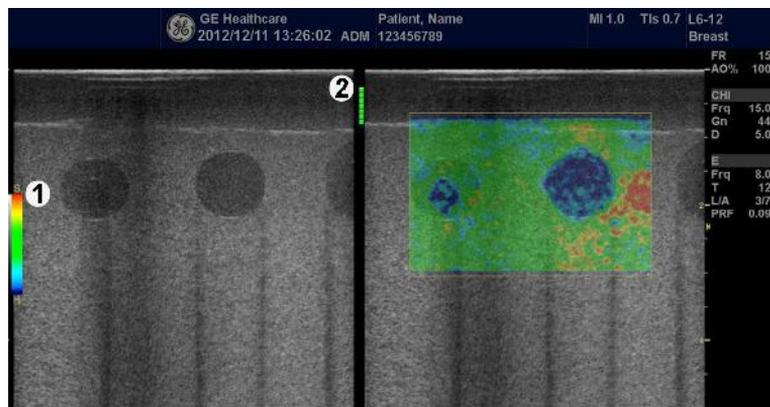


Рис. 2-5. Эластография: пример

1. Цвет. карта
2. Цветовая шкала.

Включение режима эластографии

Таблица 2-7: Описание параметром эластографии

Параметр	Описание
Сглаживание в аксиальной плоскости	Регулировка сглаживания изображения в режиме эластографии в аксиальном направлении. Большее значение означает более высокий уровень сглаживания.
Латеральное сглаживание	Регулировка сглаживания изображения в режиме эластографии в латеральном направлении. Большее значение означает более высокий уровень сглаживания.
Окно	Регулировка размера сегмента РЧ-данных при отслеживании движения. Более высокое значение окна обеспечивает лучшее соотношение сигнала к шуму (SNR) за счет снижения аксиального разрешения.
Карта	Управление картами эластографии. Имеется шесть различных карт с различной контрастностью и цветовыми схемами, включая карту серого.
Усреднение кадров	Контроль устойчивости изображений в режиме эластографии.
Частота	Контроль частоты передачи.
Сжатие: мягкие ткани	Индивидуальный контроль усиления контуров изображения при визуализации мягких тканей.
Сжатие: плотные ткани	Индивидуальный контроль усиления контуров изображения при визуализации плотных тканей.
Шкала	Регулировка временного интервала между последовательными сигналами. Более низкие значения обуславливают более высокую чувствительность к незначительным движениям, производимым вручную.
Прозрачность	При более высоких значениях ткань отображается как фон для данных в режиме эластографии. При использовании элемента управления "Color Gain" (Усиление цвета) данный параметр визуализации появляется как "Т" в правой части экрана.
Компл. для биопсии	Комплект для биопсии
Контр. объем	Контролирует длительность посылаемого импульса. Более высокие значения означают повышение длительности импульса, что обеспечивает лучшее соотношение SNR, но снижает аксиальное разрешение.
Отклонение кадра	Регулирует количество кадров, которые отсекаются по причине низкого качества вследствие вертикального движения. Большее значение означает отклонение большего числа кадров. Отсекаемый кадр имеет полностью прозрачную область исследования, фоном для которой является изображение в В-режиме.
Отсечение шумов	Регулирует количество кадров, которые отсекаются по причине бокового движения или движения по высоте. Большее значение означает отклонение большего числа кадров. Отсекаемый кадр имеет полностью прозрачную область исследования, фоном для которой является изображение в В-режиме.

Таблица 2-7: Описание параметром эластографии (продолжение)

Параметр	Описание
Плотность линий	Оптимизирует частоту кадров в В-режиме или пространственное разрешение для улучшения качества изображения.

Использование

Изображение в режиме эластографии получается с помощью вибрации датчика в процессе сканирования. Критерии использования:

При ручной пульсации датчика визуализации в режиме эластографии может быть очень динамичной, поскольку уровень деформации ткани определяется движением руки оператора, проводящим сканирование. Для достижения стабильных равномерных вибраций обратите внимание на график качества. Доступно два варианта обратной связи. В обоих идеальное давление, производимое от руки, отображается в виде более высоких показателей на графике. Также можно использовать следующие элементы управления пост-обработкой: "Smoothing" (Сглаживание), "Window" (Окно), "Scaling" (Масштабирование) и "Frame Averaging" (Усреднение кадров).

В режиме эластографии более плотные ткани отображаются синим цветом, более мягкие - красным. Для усиления Blue area (Область синего), увеличьте значение Hard Compress (Сильная компрессия); для усиления Red area (Область красного), увеличьте значение Soft Compress (Мягкая компрессия). Для повышения контрастности изображения заново выберите цветовую карту.

Для повышения разрешения увеличьте сглаживание, увеличьте частоту, уменьшите размер контрольного объема или уменьшите размер окна.

Если необходимо получить сглаженное изображение, увеличьте размер окна, сглаживание в аксиальной плоскости, латеральное сглаживание и контрольный объем.

Если изображение слишком яркое, уменьшите значение отсечения кадров до 1.0 и уровень отсечения шума для достижения необходимого качества изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Для получения более подробной информации об использовании эластографии см. общее руководство пользователя.*

Другие элементы управления

Масштабирование

Чтобы приблизить изображение, поверните регулятор "Zoom" (Масштабирование) по часовой стрелке. В нижнем левом углу экрана отобразится контрольное изображение.

Чтобы выйти из режима масштабирования нажмите клавишу **В**-режим или поверните регулятор "Zoom" (Масштабирование) против часовой стрелки до исчезновения контрольного изображения.

Контрольное изображение представляет собой маленькое немасштабируемое изображение, отображаемое рядом с обрабатываемым изображением.

Масштабирование при чтении данных

Чтобы включить функцию масштабирования при чтении данных, поверните регулятор **Zoom** (Масштабирование).

Функция масштабирования при считывании увеличивает отображение данных без изменения получаемых данных ультразвукового изображения.

Она доступна в режиме реального времени, стоп-кадра, кинопетли или для вызванных необработанных изображений.

Масштабирование при записи сигнала

Масштабирование изображения приводит к изменению частоты кадров, что, в свою очередь, приводит к изменению тепловых индексов. Положение точек фокуса может также измениться, что может привести к изменению местоположения точки пиковой интенсивности в акустическом поле. В результате механический и тепловой индексы могут измениться.



Опасность
получения
травм при УЗИ

Следите за возможными изменениями выходных сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Функция "Write Zoom" (Масштабирование при записи) доступна только при выключении функции "CrossXBeam".*

Чтобы включить функцию масштабирования при записи сигнала, нажмите регулятор **Zoom** (Масштабирование).

Функция масштабирования при записи сигнала повышает плотность линий и (или) частоту выборки ультразвуковых данных, улучшая разрешение.

Доступна только при предварительной обработке.

Размер окна масштабирования при записи (высоту и ширину) можно предварительно задать на странице "Utility" (Утилиты) -> "Imaging" (Визуализация) -> "B-Mode" (B-режим).

ПРИМЕЧАНИЕ: *Разницу между масштабированием при чтении данных и масштабированием при записи сигнала можно объяснить на примере фотографии. Масштабирование при чтении данных (цифровое масштабирование) применяется к негативу и позволяет увеличить изображение, в то время как в масштабировании при записи сигнала (оптическое масштабирование) используется линза фотообъектива для "приближения" изображения перед выполнением снимка.*



Полезные
советы

Вначале используйте масштабирование при чтении данных (поверните регулятор), чтобы получить изображение исследуемой области, затем используйте масштабирование при записи сигнала (нажмите на регулятор).

Разделенный экран

Чтобы активировать функцию разделения экрана на две части, нажмите клавишу **L** или **R**. Чтобы активировать функцию разделения экрана на четыре части, нажмите и удерживайте клавишу **L**.

Для переключения между активными изображениями нажимайте клавишу **L/R**.

Чтобы отключить разделенный экран, нажмите и удерживайте клавишу **R** до тех пор, пока экран не изменится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для размещения копии изображения на противоположной стороне при входе в двухоконный режим просмотра используйте предустановку "When Entering Dual Image" (При входе в режим двойного изображения) на странице предустановок "Utility" (Утилиты) --> "Appication" (Приложение) --> "Settings" (Настройку).

Одновременный режим

Находясь в режиме ЦДК или ЭД, одновременно нажмите кнопки "L" и "R" для вывода слева и справа изображений в режиме В и В+ЦДК, или В и В+ЭД в реальном времени.

Это удобно при просмотре области исследования в В-режиме.

Стоп-кадр изображения

Чтобы получить стоп-кадр изображения, выполните следующие действия:

- Нажмите **Freeze** (Стоп-кадр). Цвет подсветки клавиши стоп-кадра изменится на зеленый.

Если активирован смешанный режим, оба экранных изображения немедленно останавливаются. Выключения режима "Freeze" (Стоп-кадр) производит перезапуск обоих режимов.

Для повторной активации изображения выполните следующие действия:

- Нажмите **Freeze** (Стоп-кадр) еще раз. Подсветка клавиши "Freeze" (Стоп-кадр) загорается синим цветом (отключение стоп-кадра).

ПРИМЕЧАНИЕ: При отмене режима стоп-кадра все результаты измерений и расчетов удаляются с экрана (но не из рабочей таблицы).

Используйте трекбол для запуска режима кинопетли после нажатия клавиши Freeze (Стоп-кадр).

Активация режима кинопетли

Чтобы активировать режим кинопетли:

1. Нажмите Freeze (Стоп-кадр).
2. Переместите трекбол.

Пиктограммы

Для запуска режима пиктограмм нажмите клавишу **Body Pattern** (Пиктограммы).

Выберите требуемую пиктограмму. Монитор отобразит выбранное значение.

- Нажмите элемент управления **Move Pattern** (Перемещение пиктограммы) для перемещения пиктограммы с помощью **трекбола** и элементов управления **Set** (Установка).
- Переместите пиктограмму в нужное место и нажмите **Save Position** (Сохранить положение). Текущее положение сохранится в качестве исходного положения текущего формата отображения. Нажмите и удерживайте **Save Position** (Сохранить положение), чтобы восстановить для исходного положения заводское значение по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Исходное положение не зависит от формата отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение пиктограммы обновляется при изменении формата отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При смене пациента значение положения пиктограммы обнуляется до заводских значений (например, при *End Exam* (Завершение исследования)).

Пиктограммы (продолжение)

- Метка датчика связана с пиктограммами и иллюстрирует положение датчика на пиктограмме. Эта метка устанавливается с помощью **трекбола** и поворачивается с помощью регулятора **Body Pattern** (Пиктограмма) / **Ellipse** (Эллипс).
- Тип метки датчика выбирается путем вращения элемента управления **Probe Type** (Тип датчика). Доступны различные варианты выбора при наличии одного пустого варианта.
- Чтобы выбрать активную сторону в сдвоенном В-режиме, используйте вращающийся регулятор **Active Side** (Активная сторона), расположенный в нижней части Сенсорная панель.
- Чтобы стереть пиктограмму, активируйте пиктограммы, нажав регулятор **Body Pattern** (Пиктограмма) / **Ellipse** (Эллипс), и затем нажмите клавишу **Clear** (Очистить).
- Для выхода без удаления пиктограммы нажмите **Set** (Установить) на клавиатуре или **Scan** (Сканировать) на Сенсорная панель.
- Выберите **Save Probe Position** (Сохранить положение датчика), чтобы сохранить метку положения и угол датчика для каждой пиктограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Элемент управления **Save Probe Position** (Сохранить положение датчика) доступен только на Сенсорная панель*

1. Отобразите пиктограмму.
 - Переместите и поверните метку датчика нужным образом.
 - Выберите **Save Probe Position** (Сохранить положение датчика).
2. Чтобы убрать значок датчика с сенсорной панели, нажмите и удерживайте кнопку **Save Probe Position** (Сохранить положение датчика).

Добавление комментариев к изображению

При нажатии клавиши **Comment** (Комментарий) или любой клавиши на буквенно-цифровой клавиатуре вызывается режим комментариев. Это присваивает трекболу функцию управления курсором и отображает библиотеку комментариев в меню Сенсорная панель.

В режиме комментариев в текст могут быть внесены дополнения с помощью библиотеки комментариев, либо их можно ввести с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.

После активации режима комментариев на экране отображается вертикальный курсор. Перемещайте курсор с помощью **трекбола**.

Нажмите клавишу **Backspace** для позначкового удаления комментария.

Чтобы удалить все комментарии и стрелки, дважды нажмите клавишу **Clear** (Очистить) сразу же после входа в режим комментариев.

Перемещение к следующему слову или группе слов осуществляется с помощью клавиши **Tab**.

Чтобы воспользоваться указателями-стрелками, активируйте клавишу **F2 (Стрелка)** на клавиатуре или нажмите клавишу **Comment** (Комментарий), а затем — верхнюю клавишу **трекбола**. Отображающийся курсор окрашен в ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Это означает, что он активен и может перемещаться.

Scan Coach (Консультант)

Перед использованием функции Scan Coach ознакомьтесь со следующим положением, а также заявлениями об отказе от ответственности и ограничении ответственности и подтвердите свое согласие с ними.

Заявление

- ФУНКЦИЯ ScanCoach НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ТРЕНИНГ ИЛИ ТЕОРИТИЧЕСКОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ДОПОЛНЕНИЕМ К УЖЕ ПРОЙДЕННОМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГУ.
- ФУНКЦИЯ ScanCoach ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПО ЗАПРОСУ ИЛИ ИНСТРУМЕНТА НАПОМИНАНИЯ, ОТОБРАЖАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ В ВИДЕ СТАТИЧЕСКИХ И АНИМИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ДАННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
- ФУНКЦИЯ ScanCoach НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА, НО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОБСЛЕДОВАНИЙ.
- ФУНКЦИЯ ScanCoach ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИЯХ, НО НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПОДЛИННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ОТОБРАЖАЕМЫХ УСТРОЙСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЙ, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Отказ от ответственности

ФУНКЦИЯ ScanCoach И МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО". НАСТОЯЩИМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ Scan Coach И/ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИЯ GE И ЕЕ ПАРТНЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ. НАСТОЯЩИМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ Scan Coach, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ МАТЕРИАЛЫ, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

ЛЮБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ, ИДЕНТИФИКАЦИЮ АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА, АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОСТАНОВКУ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА ЛЕЖИТ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ.

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИЯ GE И ЕЕ ПАРТНЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ФИНАНСОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИЛИ ПАЦИЕНТУ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ УЩЕРБОМ ОТ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ДОСТУПНЫХ В ScanCoach.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И СТАНДАРТНОГО ТРЕНИНГА И СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ ПРОЧИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕЖИТ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ.

Ограничение ответственности

КОМПАНИЯ GE ИЛИ ЕЕ МАТЕРИНСКИЕ КОМПАНИИ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, РУКОВОДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, СОТРУДНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ХАЛАТНОСТЬ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ ScanCoach.

Введение

Программа Scan Assistant обеспечивает пошаговое выполнение автоматического сценария исследования. Это позволяет сконцентрироваться на выполнении исследования, не отвлекаясь на управление системой, и помогает повысить стабильность работы, уменьшая количество нажатий клавиш. Система автоматически вызывает подходящий режим и параметры визуализации, автоматически переходит к новому этапу в процессе исследования, выполняет аннотирование изображений, осуществляет запуск измерений и назначает измерения рабочей таблице/отчету.

"Scan Coach" (Консультант) основывается на функциях программы "Scan Assistant" (Помощник) и отображает информацию, помогающую пользователю выбрать верную плоскость сканирования. Контрольное изображение показывает, как должно выглядеть изображение плоскости сканирования для выбранного этапа сканирования. С целью получения верной плоскости сканирования изображение датчика/динамическое изображение отображает текущее положение датчика или формирование пучка. Динамическая схема отображает ключевые анатомическую структуры, представляемые в двух пространственных режимах.

Функция "Scan Coach" (Консультант) может использоваться в качестве устройства оповещения/напоминания при сканировании в реальном времени.

Функция "Scan Coach" (Консультант)



Рис. 2-6. Описание функции "Scan Coach" (Помощник при сканировании)

Пиктограммы (продолжение)

1. Запрограммированный номер и название этапа сканирования.
2. Значок для просмотра контрольного изображения.
3. Данная колонка обозначает, что программа переходит к выполнению следующего этапа.
4. Текущий этап сканирования. Окно имеет зеленый цвет, если программа активна, или серый, если программа приостановлена.
5. Редактирование (значок карандаша).
6. Стоп
7. Пауза или Пауза/Возобновление работы
8. Запуск/Отключение функции "Scan Coach" (Консультант)

Настройка функции "Scan Coach" (Консультант)

Для создания, импортирования/экспортирования файлов, а также для работы с программами "Scan Assistant" (Помощник) / "Scan Coach" (Консультант) выберите меню "Utility" (Утилиты) -> "Scan Assistant" (Помощник) -> "Scan Assistant Manager" (Управление помощником)

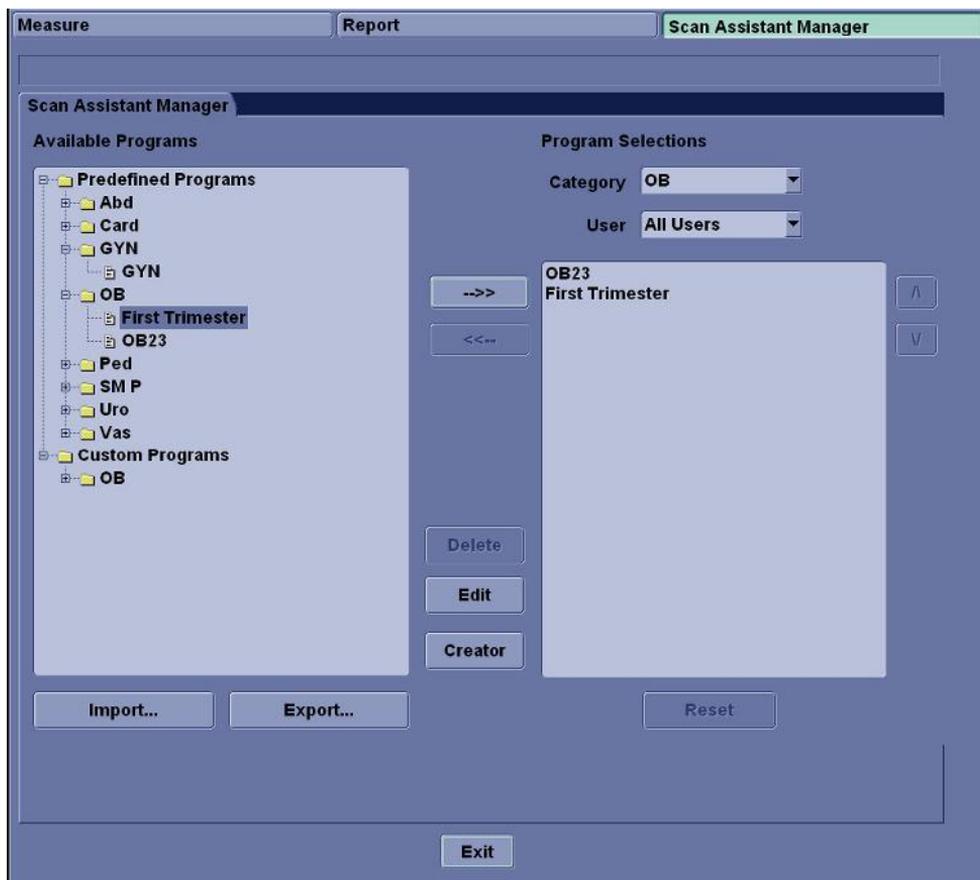


Рис. 2-7. Настройка функции "Scan Coach" (Консультант)

Использование функции "Scan Coach" (Консультант)

1. Выберите меню "Utility" (Утилиты) -> "Scan Assistant" (Помощник) -> "Scan Assistant Manager" (Управление помощником), выберите протокол из левой колонки, нажмите >>, чтобы переместить его в колонку **Program Selections** (Выбор программы). Затем нажмите клавишу **Exit** (Выход), чтобы перейти к странице сканирования.

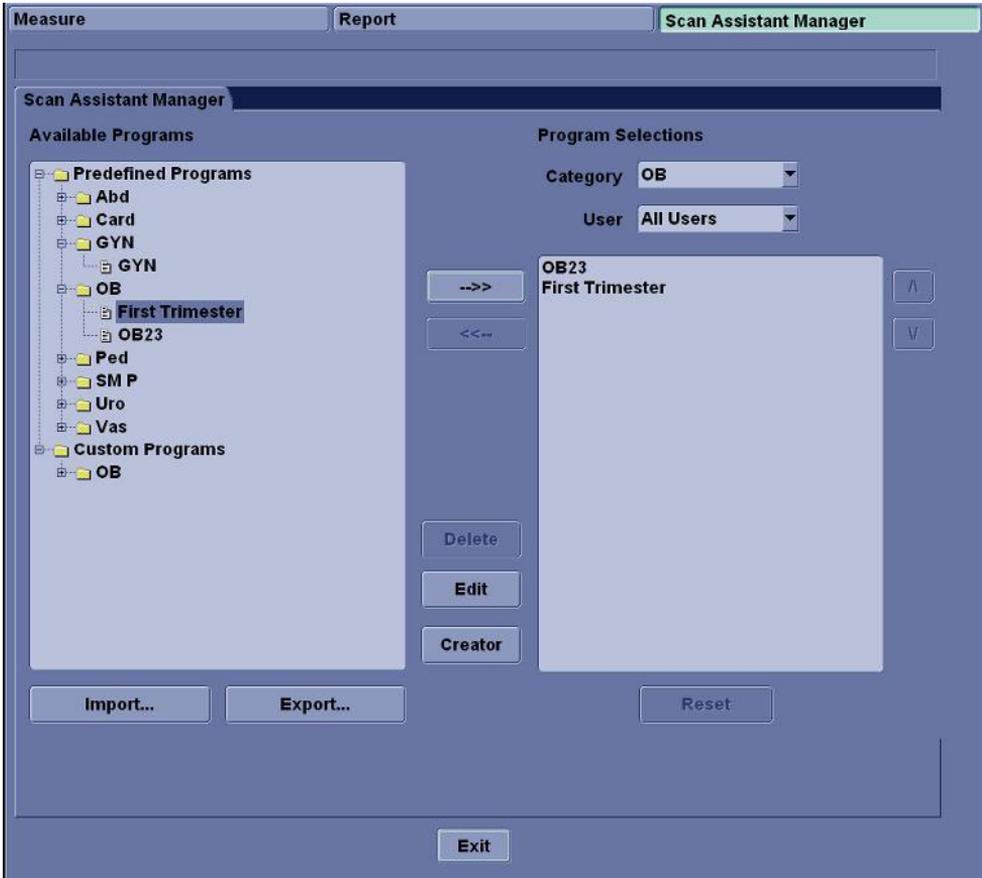


Рис. 2-8. Выберите "Scan Coach Protocol" (Протокол программы Консультант)

Использование функции "Scan Coach" (Консультант) (продолжение)

- Нажмите клавишу **Scan Coach** (Консультант) на панели управления для включения данной функции. Выберите протокол из выпадающего меню и нажмите клавишу **Start** (Запуск).

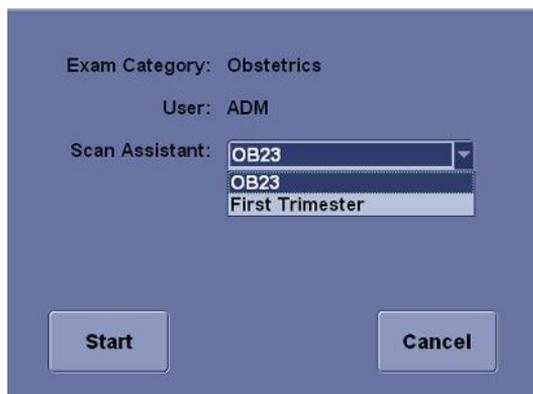


Рис. 2-9. Запуск "Scan Coach" (Консультант)

- Для просмотра контрольного изображения выберите программу, например, HC, и нажмите на значок (указанный как «2»).



Рис. 2-10. Использование функции "Scan Coach" (Консультант) - шаг 1

Использование функции "Scan Coach" (Консультант) (продолжение)

4. Контрольное изображение появится на экране. Для просмотра положения датчика и схемы нажмите на значок (указанный как "8").



Рис. 2-11. Использование функции "Scan Coach" (Консультант) - шаг 2

Использование функции "Scan Coach" (Консультант) (продолжение)

5. Программа отобразит контрольное изображение, положение датчика и схемы, чтобы помочь пользователю получить верную плоскость сканирования.



Рис. 2-12. Использование функции "Scan Coach" (Консультант) - шаг 3

- а. сканируемое изображение в реальном времени
- б. контрольное изображение
- в. положение датчика
- д. две пространственные схемы текущей плоскости сканирования

Редактирование протокола "Scan Coach" (Консультант)

1. Для редактирования протоколов выберите меню "Utility" (Утилиты) -> "Scan Assistant" (Помощник) -> "Scan Assistant Manager" (Управление помощником) и нажмите клавишу **Creator** (Создать).

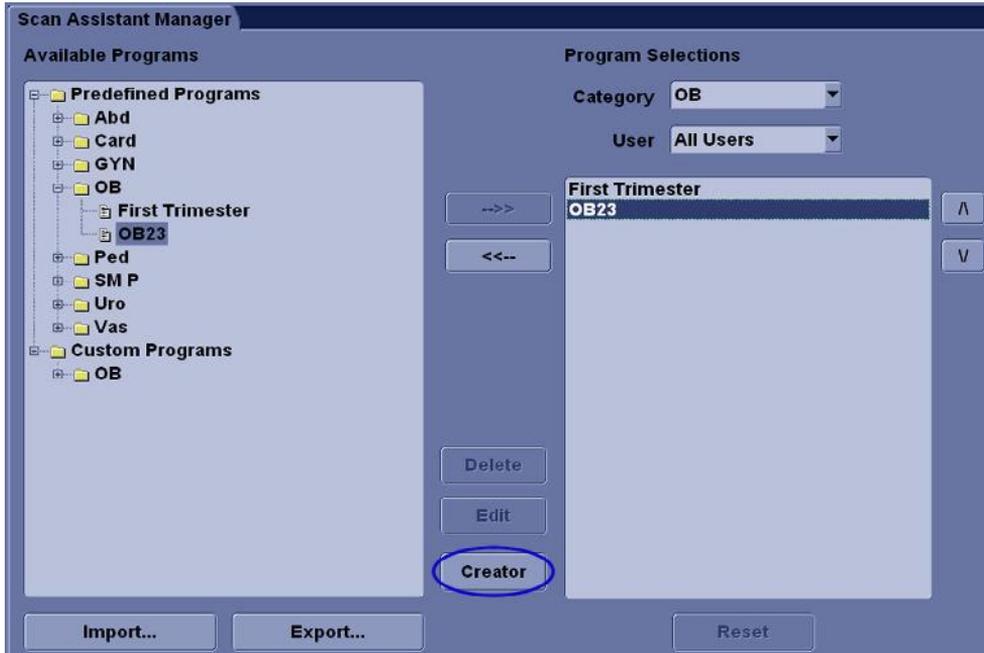


Рис. 2-13. Диспетчер Scan Assistant

2. Программа "Scan Assistant Creator" (Создание помощника) используется для создания адаптированных программ, которые могут быть импортированы на LOGIQ F. Выберите пункт **Scan Coach** (Консультант) для отображение страницы редактирования настроек консультанта.

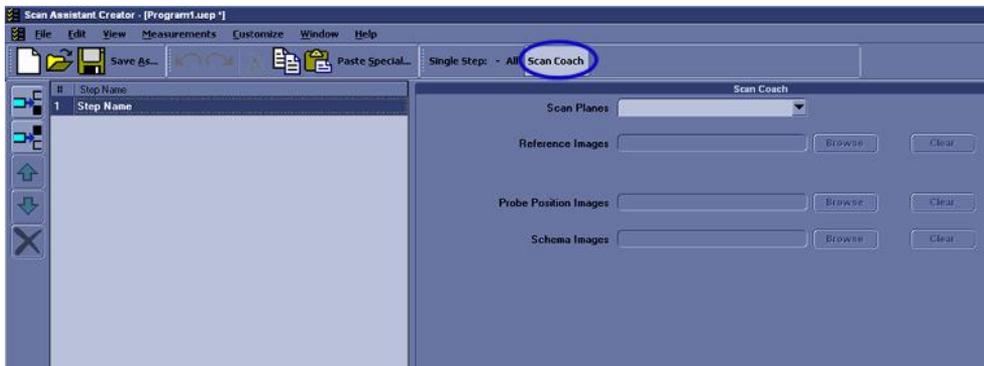


Рис. 2-14. Scan Assistant Creator

Редактирование протокола "Scan Coach" (Консультант) (продолжение)

3. Выберите плоскость сканирования.

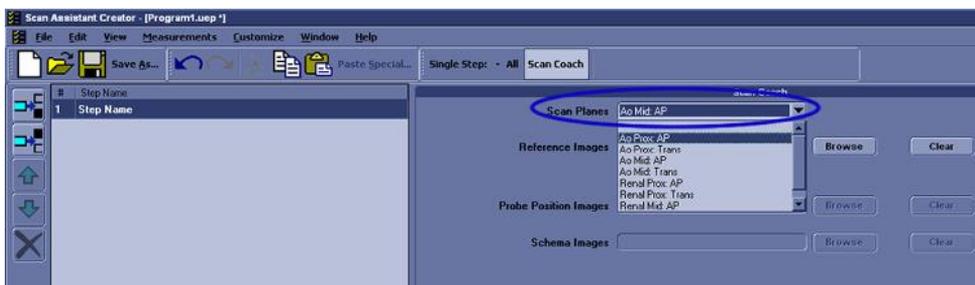


Рис. 2-15. Выбор плоскости сканирования.

4. Нажмите **Browse** (Просмотр) для загрузки контрольных изображений.

Нажмите **Upload** (Загрузить) для загрузки контрольных изображений из папки "Reference Images" (Контрольные изображения) соответствующего приложения. Нажмите **Close** (Закрыть) после окончания загрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Возможна загрузка только контрольных изображений форма *.dcm.*

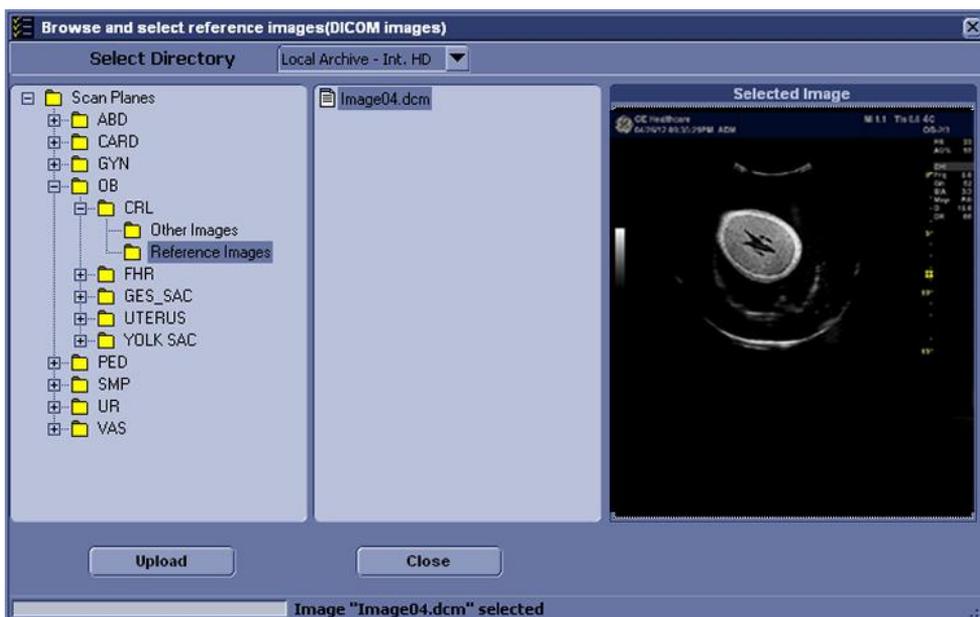


Рис. 2-16. Загрузка контрольного изображения.

Редактирование протокола "Scan Coach" (Консультант) (продолжение)

Контрольное изображение также можно загрузить с карты памяти USB/жесткого диска/CD-диска/DVD-диска. Из выпадающего меню выберите папку, содержащую контрольное изображение, и выберите соответствующее изображение для загрузки.

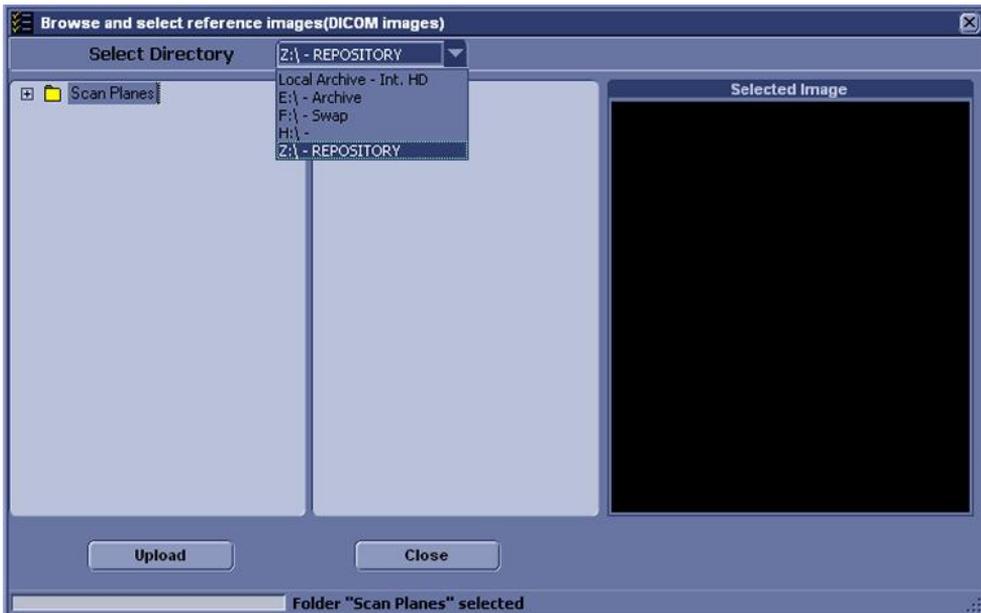


Рис. 2-17. Загрузка контрольного изображения 2

5. Загрузка изображения положения датчика или изображения схемы производится из папки "Other Images" (Другие изображения) соответствующего приложения, или с внешних носителей.

Измерение и анализ

Введение

Измерения и расчеты, производимые на основе эхограмм, дополняют другую клиническую информацию, имеющуюся в распоряжении лечащего врача. Точность измерений определяется не только точностью прибора, но и тем, насколько выбранные клинические протоколы соответствуют целям исследования. Во всех случаях, когда это целесообразно, следует делать отметки об используемых протоколах выполнения тех или иных измерений или расчетов. Делаются также отметки о формулах и базах данных, используемых системным программным обеспечением во время проводимых исследований. Обязательно обращайтесь к оригинальным статьям, описывающим рекомендуемые клинические процедуры.



Система предоставляет результаты расчетов (например расчетный вес плода) и таблицы, созданные по данным научных публикаций. Ответственность за правильность выбора таблицы, а также клиническую интерпретацию результатов расчетов и данных таблиц лежит исключительно на пользователе. Пользователь должен учитывать противопоказания к применению тех или иных расчетов или таблиц, используя данные научных публикаций. Диагностика, принятие решения о дальнейших обследованиях и методах лечения должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с общепринятой клинической практикой.

Местоположение элементов управления измерением



Рис. 2-18. Местоположение элементов управления измерением

1. **Clear** (Очистить). Во время выполнения измерений стирает измеритель и данные измерения с экрана. Когда измерения не выполняются, стирает все измерители и измерения с дисплея.
2. **Measure** (Измерить). Активирует измеритель и пакет расчетов, связанные с выбранной в данный момент предварительной установкой.
3. **Ellipse** (Эллипс). После установки первого измерителя для измерения расстояния и размещения второго измерителя клавиша **Ellipse** (Эллипс) активирует функцию измерения площади/эллипса. Размер эллипса увеличивается и уменьшается с помощью **трекбола**. Для регулировки измерителей выберите **Cursor Select** (Выбрать курсор).
4. **Set** (Установить). Установка измерителя для выполнения измерения и завершение последовательности операций измерения.
5. **Трекбол**. Перемещает измерители, выбирает измерение в окне сводки.

Измерения в В-режиме

В В-режиме можно выполнить два основных измерения.

- Расстояние
- Окружность и площадь
 - Метод эллипса
 - Метод трассировки
 - Метод сплайна
 - Метод интенсивности (уровня эхо-сигналов)

ПРИМЕЧАНИЕ:

*При выполнении приведенных ниже указаний необходимо вначале выполнить сканирование пациента, а затем нажать клавишу **Freeze** (Стоп-кадр).*



НЕ выполняйте измерение глубины с помощью 4D-датчиков.

Измерение расстояния

Чтобы измерить расстояние, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить).
2. С помощью **трекбола** установите активный измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** установите второй активный измеритель в конечной точке.
Точки измерения соединяются пунктирной линией, при наличии предварительной настройки.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить).
В окне "Results" (Результаты) отобразится значение расстояния.



- **До** завершения измерения следует выполнить следующее:
 - Для переключения между активными измерителями настройте параметр **Cursor Select** (Выбрать курсор).
 - Чтобы стереть второй измеритель и текущие данные измерения и выполнить измерение повторно, нажмите **Clear** (Очистить) один раз.
- **После** завершения измерения следует выполнить следующее:
 - Чтобы повернуть и активировать зафиксированные измерители, отрегулируйте параметр **Cursor Select** (Выбрать курсор).
 - Чтобы стереть все данные, которые были измерены на данный момент, за исключением данных, внесенных в рабочие таблицы, нажмите **Clear** (Очистить).

Измерение окружности и площади (эллипса)

Для измерения окружности и площади можно использовать эллипс. Для проведения измерений с помощью эллипса следует выполнить следующее:

1. Нажмите **Measure** (Измерить).
2. Установите активный измеритель с помощью **трекбола**.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. Установите второй измеритель с помощью **трекбола**.
5. Отрегулируйте элемент управления **Ellipse** (Эллипс); отобразится эллипс, который первоначально имеет вид окружности.
6. С помощью **трекбола** установите эллипс в нужное положение и определите размеры подлежащих измерению осей (перемещайте измерители).
7. Чтобы увеличить размер, вращайте элемент управления **Ellipse** (Эллипс) по часовой стрелке. Чтобы уменьшить размер, вращайте элемент управления **Ellipse** (Эллипс) против часовой стрелки.
8. Для переключения между активными измерителями настройте параметр **Cursor Select** (Выбрать курсор).
9. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразятся длина окружности и площадь.



Перед тем как завершить измерения эллипса, выполните следующие действия:

- Чтобы стереть эллипс и результаты текущих измерений, нажмите **Clear** (Очистить) один раз. При этом отобразится исходный измеритель, что позволяет перезапустить измерение.
- Чтобы выйти из режима измерения без завершения измерения, нажмите **Clear** (Очистить) еще раз.

Измерение окружности и площади (методом трассировки)

Трассировка

Чтобы выполнить трассировку окружности анатомической структуры и вычислить ее площадь, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Trace** (Трассировка) используйте переключатель измерителя.
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку трассировки, нажав **Set** (Установить). Измеритель станет активным измерителем.
4. Перемещая **трекбол** по анатомической области, отметьте площадь, подлежащую трассировке. Пунктирная линия показывает область трассировки.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразятся длина окружности и площадь.

Открытая трассировка

Чтобы выполнить трассировку окружности анатомической структуры и вычислить ее площадь, выполните следующие действия:

Открытая трассировка (продолжение)

1. Нажмите **Measure** (Измерить), используйте переключатель измерителя для выбора **Trace** (Трассировка). Система отобразит активный измеритель.
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку трассировки, нажав **Set** (Установить). Измеритель станет активным измерителем.
4. Перемещая **трекбол** по анатомической области, отметьте площадь, подлежащую трассировке. Пунктирная линия показывает область трассировки.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). Значение окружности появится в окне результатов.



Полезные
советы

Перед тем как завершить трассировку, выполните следующие действия:

- Чтобы стереть линию (по частям) из текущей точки, перемещайте **трекбол** или вращайте регулятор **Ellipse** (Эллипс) против часовой стрелки.
- Чтобы стереть пунктирную линию, но не измеритель, нажмите **Clear** (Очистить) один раз.
- Дважды нажмите **Clear** (Очистить), чтобы стереть измеритель и текущие результаты измерений.

Измерение окружности и площади (сплайн-траектория)

Чтобы выполнить трассировку окружности анатомической структуры и вычислить ее площадь, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Spline Trace** (Сплайн-трассировка) используйте переключатель измерителя.
2. С помощью **трекбола** установите первый измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку трассировки, нажав **Set** (Установить). Первый измеритель окрашивается в желтый цвет. Второй измеритель появляется в том же месте, где и первый, и окрашен в зеленый цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*При однократном нажатии **Clear** (Очистить) второй измеритель исчезает, а первый измеритель активируется.*

*При повторном нажатии **Clear** (Очистить) первый измеритель исчезает, и сплайн-трассировка отменяется.*

4. С помощью **трекбола** установите второй измеритель и нажмите **Set** (Установить). Третий измеритель появляется в той же точке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Функции клавиши **Clear** (Очистить) аналогичны описанным в предыдущем шаге.*

Для выполнения сплайн-трассировки требуется как минимум три точки. Продолжайте устанавливать точки трассировки до тех пор, пока все необходимые точки не будут установлены.

5. Чтобы завершить вычерчивание сплайн-трассировки, повторно нажмите **Set** (Установить) после фиксации последнего измерителя. Все точки будут удалены с линии, и кривая сплайн-трассировки будет окрашена в желтый цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Для завершения измерения контура дважды нажмите **Set** (Установить).*

Если нажать **Clear** (Очистить) дважды в то время, когда на кривой имеется более трех точек, все точки будут удалены, и вновь отобразится первый измеритель.

Измерение окружности и площади (сплайн-траектория) (продолжение)

Редактирование сплайн-трассировки

1. Нажмите **Cursor Select** (Выбрать курсор). Кривая сплайн-трассировки окрашивается в зеленый цвет, а все точки на чертеже - в желтый цвет.

Основной измеритель появляется в центре изображения, и в нижней части экрана отображается сообщение "Edit spline trace" (Редактировать сплайн-трассировку).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Основной измеритель используется для выбора и перемещения точек трассировки.

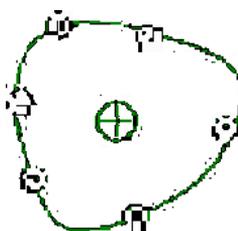


Рис. 2-19. Редактирование кривой сплайн-трассировки

Нажмите "Cursor Select" (Выбрать курсор) еще раз. Кривая трассировки деактивируется (становится желтой), а все точки, включая основной измеритель, удаляются.

Если на изображении имеется предыдущий/следующий зафиксированный измеритель, он активируется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Нажатие в этот момент **Clear** (Очистить) приведет к удалению всех точек и кривой трассировки.*

2. Переместите основной измеритель в нужную точку и нажмите **Set** (Установить). Точка активируется и окрашивается в зеленый цвет.

Редактирование сплайн-трассировки (продолжение)

3. Переместите точку в нужное положение и нажмите **Set** (Установить). Точка будет зафиксирована и окрашена в желтый цвет. Основной измеритель отобразится в центре изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сплайн-трассировка будет обновлена во время выполнения.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить точку, нажмите **Clear** (Очистить) во время перемещения точки. Кривая трассировки будет окрашена в зеленый цвет, а оставшиеся точки останутся желтыми. Если имеется менее трех точек, сплайн-трассировка будет удалена.*

4. Нажмите **Set** (Установить) еще раз. Все точки с кривой будут удалены, и кривая трассировки будет окрашена в желтый цвет.

Измерение интенсивности (уровня эхо-сигналов)

Измерение уровня эхо-сигнала:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Intensity** (Интенсивность) используйте переключатель измерителя.
2. С помощью **трекбола** установите первый измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку трассировки, нажав **Set** (Установить). Измеритель станет активным измерителем.
4. Перемещая **трекбол** по анатомической области, отметьте площадь, подлежащую трассировке. Пунктирная линия показывает область трассировки.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). Система отображает уровень эхо-сигнала как EL __ dB, в окне Results (Результаты).

ПРИМЕЧАНИЕ: *Измерение уровня эхо-сигнала может быть выполнено только на стоп-кадре, не на изображении в режиме В-паузы.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *В соответствии с заводскими настройками по умолчанию функция измерения уровня эхо-сигнала недоступна. Чтобы активировать функцию измерения уровня эхо-сигнала, следует изменить предварительную настройку "Measure Key Sequence" (Последовательность клавиш измерения) в меню "Utility" (Утилиты) -> "Measure" (Измерить) -> "Advanced preset" (Дополнительные настройки).*

Измерения в доплеровском режиме

В доплеровском режиме можно выполнить следующие основные измерения.

- Скорость
- TAMAX и TAMEAN (ручная или автоматическая трассировка)
- Две скорости с временным интервалом и ускорением между ними
- Временной интервал
- Volume Flow (Объемный поток)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже приведены инструкции, предусматривающие выполнение пользователем следующих действий:

1. В области В-режима экрана сканируйте анатомическую структуру, которую необходимо измерить.
2. Перейдите к области доплеровского режима на экране.
3. Нажмите **Freeze** (Стоп-кадр).

Скорость

Чтобы измерить скорость, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить); отобразится активный измеритель с вертикальной пунктирной линией.
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в требуемой точке измерения.
3. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразится значение скорости.

TAMAX и TAMEAN

Трассировка вручную

Измеренное значение зависит от предварительной настройки параметра "Vol Flow Method" (Метод объемного потока). Доступны два варианта: пиковый (TAMAX) и средний (TAMEAN).

Чтобы сделать трассировку TAMAX или TAMEAN вручную, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Trace** (Трассировка) используйте переключатель измерителя. Выберите **Manual** (Ручной режим) или в меню "Utility" (Утилиты) -> Measure (Измерения) - "Advanced preset menu" (Меню расширенных настроек) установите значение **Trace** (Трассировка) как **Manual** (Ручной режим).
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке трассировки.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить).
4. С помощью **трекбола** выполните трассировку максимальных значений требуемого участка спектра.
*ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы отредактировать линию трассировки, переместите **трекбол**.*
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразятся измеренные значения.

ТАМАХ и ТАМЕАН (продолжение)

Автоматическая трассировка

Измеренное значение зависит от предварительной настройки параметра "Vol Flow Method" (Метод объемного потока). Доступны два варианта: пиковый (ТАМАХ) и средний (ТАМЕАН).

Чтобы сделать автоматическую трассировку ТАМАХ, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Trace** (Трассировка) используйте переключатель измерителя. Выберите **Auto** (Автоматический режим) или в меню "Utility" (Утилиты) -> "Measure" (Измерения) - "Advanced preset menu" (Меню расширенных настроек) установите значение **Trace** (Трассировка) как **Auto** (Автоматический режим).
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке трассировки на доплеровском спектре.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить).
4. С помощью **трекбола** установите вертикальный измеритель в конечной точке.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). Система автоматически зафиксирует оба измерителя и выполнит трассировку между двумя точками. Это значение отобразится в окне "Results" (Результаты).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке для опции автоматической трассировки значения "Both" (Оба) (вверху и внизу) система развивает максимальную мощность сигнала, а НЕ максимальную скорость. Если максимальная скорость не является максимальной мощностью, трассировка может быть выполнена неточно. Если необходимо использовать максимальную скорость, выберите либо значение "Above" (Вверху) либо "Below" (Внизу).

Угол наклона (скорость, временной интервал и ускорение)

Для измерения двух значений скорости используются временной интервал (мс) и ускорение (m/c^2):

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Slope** (Угол наклона) используйте переключатель измерителя. Отобразится активный измеритель с вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями.
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** установите второй измеритель в конечной точке.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразятся две пиковые скорости в конечной точке, временной интервал и ускорение.

Временной интервал

Чтобы измерить временной интервал по горизонтали, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Time interval** (Временной интервал) используйте переключатель измерителя. Отобразится активный измеритель с вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями.
2. С помощью **трекбола** установите активный измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** установите второй измеритель в конечной точке.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразится временной интервал между двумя измерителями.

Измерения в М-режиме

В области М-режима экрана можно выполнить следующие основные измерения:

- Глубина тканей (Расстояние)
- Временной интервал
- Временной интервал и скорость

ПРИМЕЧАНИЕ: *Ниже приведены инструкции, предусматривающие выполнение пользователем следующих действий:*

1. В области В-режима экрана сканируйте анатомическую структуру, которую необходимо измерить.
2. Включите М-режим.
3. Нажмите **Freeze** (Стоп-кадр).

Глубина тканей

Измерение глубины ткани в М-режиме производится аналогично измерению расстояния в В-режиме. При этом измеряется расстояние между измерителями.

1. Нажмите **Measure** (Измерить) один раз; отобразится активный измеритель с вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями.
2. С помощью **трекбола** переместите активный измеритель в крайнюю переднюю точку, которую необходимо измерить.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** переместите второй измеритель в крайнюю заднюю точку, которую необходимо измерить.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить).

В окне "Results" (Результаты) отобразится расстояние по вертикали между двумя точками.

Временной интервал

Чтобы измерить временной интервал по горизонтали и скорость, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Time interval** (Временной интервал) используйте переключатель измерителя; отобразится активный измеритель с вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями.
2. С помощью **трекбола** установите измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте первый измеритель, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** установите второй измеритель в конечной точке.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразится временной интервал между двумя измерителями.

Угол наклона (временной интервал и скорость)

Чтобы измерить время и скорость между двумя точками, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Measure** (Измерить), для выбора **Time interval** (Временной интервал) используйте переключатель измерителя. Отобразится активный измеритель с вертикальной и горизонтальной пунктирными линиями.
2. С помощью **трекбола** установите активный измеритель в исходной точке.
3. Зафиксируйте исходную точку, нажав **Set** (Установить). Система зафиксирует первый измеритель и даст доступ ко второму активному измерителю.
4. С помощью **трекбола** установите второй измеритель в конечной точке.
5. Чтобы завершить измерение, нажмите **Set** (Установить). В окне "Results" (Результаты) отобразятся время и угол наклона между двумя точками.

Просмотр и редактирование рабочих таблиц

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочие таблицы при сбое системы не сохраняются.

После выполнения измерений система записывает данные измерений в соответствующие рабочие таблицы.

Чтобы просмотреть рабочую таблицу, выполните следующие действия:

Чтобы просмотреть рабочую таблицу, нажмите клавишу **Worksheet** (Рабочая таблица).

Появится рабочая таблица для текущего обследования.

GE Healthcare LN29, FN29
ADM 121129-173636 17w3d:LMP

Mode	Origin LMP	LMP 2012/07/30	BBT	GA 17w3d	EDD(LMP) 2013/05/06
Fetus A/1	CUA	14w5d+/- 1w0d			EDD(CUA) 2013/05/25
FetusPos	PLAC		Ref.Physician		Page 1/1

B Mode

Measurement	Value	Unit	Avg.	11w1d	10w1d-12w1d
GS(Hellman)	5.47	cm	5.26	5.90	
CRL(Hadlock)	5.57	cm	5.57		
BPD(Hadlock)	3.88	cm	3.68	4.26	3.69
HC(Hadlock)	13.89	cm	13.98	13.98	13.71
OFD(HC)	5.10	cm	5.15	5.15	4.99
AC(Hadlock)	10.87	cm	9.08	11.42	11.42
FL(Hadlock)	2.58	cm	2.33	2.36	2.36

2D Calculations

EFW(AC,BPD,FL,HC) -Hadlock	168.12g+/-25.22g	(6oz+/-1oz)
EFW(Hadlock)-GP	11.7%	
CI(Hadlock)	-> 65.54	(70.00-86.00)
FL/AC(Hadlock)		24.67
FL/BPD(Hohler)	73.25	
FL/HC(Hadlock)		17.66
HC/AC(Campbell)	-> 1.40	(1.06-1.38)

Рис. 2-20. Акушерская рабочая таблица в В-режиме

Чтобы просмотреть рабочую таблицу, выполните следующие действия: (продолжение)

Чтобы вернуться в режим сканирования, выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Worksheet** (Рабочая таблица).
- Нажмите **Esc**.
- Нажмите кнопку **Exit** (Выход).

Чтобы просмотреть другую рабочую таблицу, выберите ключ для необходимой рабочей таблицы.

Чтобы просмотреть данные рабочей таблицы в конкретном режиме, выберите данный режим. Чтобы просмотреть рабочую таблицу с данными для нескольких режимов, нажмите **Expand** (Расширение). При нажатии "Expand" (Расширение) в рабочей таблице по умолчанию отображаются все измерения, отмеченные в режиме.

Если рабочая таблица содержит данные на второй странице, то для просмотра следующей страницы используется элемент управления **Page Change** (Смена страницы).

Редактирование рабочей таблицы

Чтобы изменить данные в рабочей таблице, выполните следующие действия:

1. С помощью **трекбола** установите курсор в то поле, которое необходимо отредактировать. Это поле будет подсвечено.
2. Нажмите **Set** (Установить).
3. Введите с клавиатуры новые данные в поле на экране. Новые данные отобразятся в синем цвете. Это указывает на то, что данные были введены вручную.

Чтобы удалить или исключить данные из рабочей таблицы, выполните следующие действия:

1. С помощью **трекбола** установите курсор в то поле, которое необходимо удалить или исключить. Это поле будет подсвечено.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы удалить поле, нажмите **Delete Value** (Удалить значение).
 - Чтобы исключить поле, нажмите **Exclude Value** (Исключить значение).
Данные в поле не будут отображаться и не будут включены в расчеты рабочей таблицы.
 - Чтобы включить значение, которое ранее было исключено, нажмите **Exclude Value** (Исключить значение).

Чтобы ввести комментарий в рабочую таблицу, выполните следующие действия:

1. Выберите **Examiner's Comments** (Комментарии исследователя). На экране откроется окно комментариев исследователя.
2. Введите комментарий к проведенному обследованию.
3. Чтобы закрыть окно комментариев, нажмите **Examiner's Comments** (Комментарии исследователя) еще раз.

Чтобы отменить измерение объема,

- выберите значение **Off** (Откл.) для типа метода.



Одни поля в таблице предназначены только для просмотра, а в другие можно входить и производить редактирование. Перемещая **трекбол** по полям таблицы, можно легко увидеть, какие из них можно выбирать или изменять. При перемещении курсора по полю, которое можно выбирать или редактировать, это поле выделяется подсветкой.

Удаление всех значений из рабочей таблицы

Можно удалить все значения из рабочей таблицы.

1. Как только рабочая таблица будет выведена на экран монитора, нажмите клавишу **Clear** (Очистить); отобразится следующее предупреждающее сообщение:

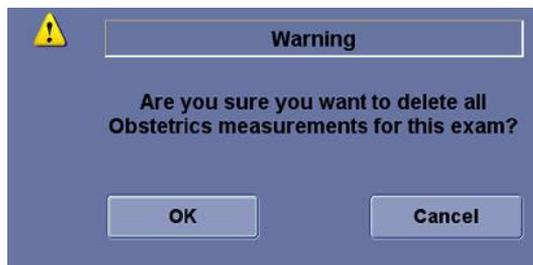


Рис. 2-21. Предупреждающее сообщение "Delete All" (Удалить все)

2. Нажмите **OK**, чтобы удалить все.
Нажмите **Cancel** (Отмена), чтобы отменить удаление.

Погрешность клинических измерений

Основные измерения

Сведения, приведенные ниже, призваны помочь пользователю определить погрешность, или ошибку измерения, которые следует принимать во внимание в ходе выполнения клинических измерений с помощью данного оборудования. Погрешность может явиться результатом ограничений, накладываемых оборудованием, или использования неправильной методики. Убедитесь, что соблюдаются все инструкции по выполнению измерений, и разработайте единые методики выполнения измерений, которых должны придерживаться все пользователи оборудования. Это позволит свести вероятность ошибки к минимуму. Кроме того, в целях выявления возможных неисправностей оборудования, которые могут повлиять на точность измерений, необходимо разработать программу обеспечения качества, включающую регулярные проверки точности с использованием фантомов, имитирующих ткани тела.

Обратите внимание, что измерение расстояния и другие доплеровские измерения зависят от скорости распространения звука в тканях. Скорость распространения обычно зависит от типа ткани, но расчеты основываются на средней скорости распространения звука в мягких тканях. Средняя скорость для данного оборудования составляет 1540 м/с. Погрешности, приведенные ниже, также рассчитаны с учетом этой скорости. Указанная погрешность в процентах относится к выполненному измерению, а не ко всему диапазону. Если погрешность указывается в процентах и в виде фиксированного значения, то ожидаемая погрешность будет составлять большее из двух значений.

Основные измерения (продолжение)

Таблица 2-8: Измерения и погрешности

Измерения	Единицы	Полезный диапазон	Погрешность	Ограничения или условия
Глубина	мм	Весь экран	<=10%	
Угол	градус	Весь экран	<=5%	
Расстояние:				
Аксиальное	мм	Весь экран	<5%	
Латеральное	мм	Весь экран	<5%	Линейные датчики
Латеральное	мм	Весь экран	<5%	Конвексные датчики
Латеральное	мм	Весь экран	<5%	Секторные датчики
Окружность:				
Трассировка	мм	Весь экран	<=10%	Линейные, конвексные, секторные датчики
Эллипс	мм	Весь экран	<=5%	Линейные, конвексные, секторные датчики
Площадь:				
Трассировка	мм ²	Весь экран	<=5%	Линейные, конвексные, секторные датчики
Эллипс	мм ²	Весь экран	<=5%	Линейные, конвексные, секторные датчики
Время	s	Временная шкала	<5%	M-режим, AM-режим, CM-режим, PWD-режим, CWD-режим
Наклон	мм/сек	Временная шкала	<=10%	M-режим, AM-режим, CM-режим
Положение доплеровского контрольного объема (SV)	мм	Весь экран	<=2 мм	PWD-режим

Таблица 2-8: Измерения и погрешности (продолжение)

Измерения	Единицы	Полезный диапазон	Погрешность	Ограничения или условия
Допплеровская скорость	см/сек	От 0 до 100 см/сек	<15%	PWD-режим, CWD-режим
		От 100 до 130 см/с	<10%	
Допплеровская угловая поправка	см/сек	От 0 д 80°	<=5%	PWD-режим

Установка автономного принтера для печати на бумаге

Автономный принтер можно подключить через порт USB.



Подключение устройств через порты USB должно осуществляться ТОЛЬКО КОГДА система LOGIQ F ВЫКЛЮЧЕНА. В случае подключения какого-либо устройства к включенной системе LOGIQ F, система может выйти из строя.



НЕ располагайте не входящий в систему бумажный принтер поблизости от пациента. Таким образом гарантируется соблюдение требований стандартов в отношении токов утечки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать вблизи пациента какой-либо автономный принтер для печати на бумаге (внутри ограниченной пунктирной линией области с пометкой "1" на Рис. 2-22). Подробные сведения см. в руководстве пользователя внешнего принтера.

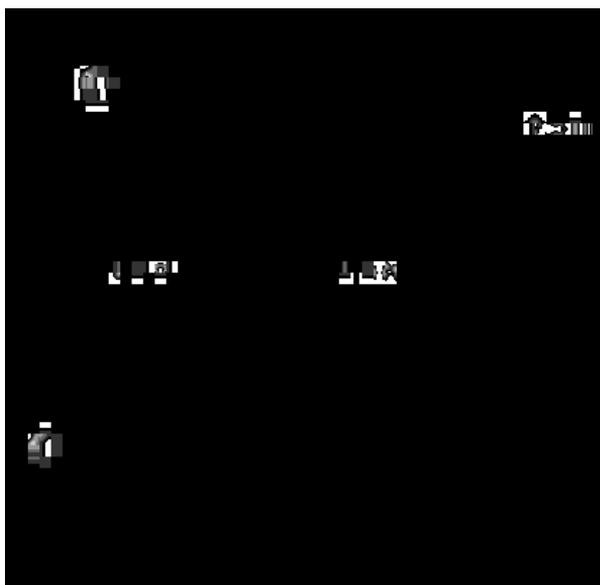


Рис. 2-22. Среда, окружающая пациента

Глава 3

После завершения обследования

Предварительные настройки системы, резервное копирование данных, настройка подключения, электронная документация, контактная информация, данные системы, уход за системой и техническое обслуживание, принадлежности

Предварительные настройки

Обзор

Меню предварительных настроек предусматривает следующие функции:

- **System presets** (Предварительные настройки системы). Просмотр и обновления общих настроек конфигурации системы, настроек исследования, резервного копирования и восстановления данных и файлов конфигурации.
- **Imaging presets** (Предварительные настройки визуализации). Просмотрите и обновите параметры исследования и визуализации.
- **Comments presets** (Предварительные настройки библиотек комментариев). Настройка библиотек комментариев в зависимости от приложения.
- **Body / Patterns presets** (Предварительные настройки библиотек пиктограмм). Настройка библиотек пиктограмм в зависимости от приложения.
- **Application presets** (Предварительные настройки приложения). Конфигурирование предварительных настроек, задаваемых приложением и пользователем.
- **Test / Patterns presets** (Предварительные тестовые настройки/настройки шаблонов). Помощь в настройке системы.
- **Connectivity Setup** (Настройка подключения). Настройка подключения и связи, включая информацию о потоке данных исследования.
- **Measure presets** (Предварительные настройки исследований). Настройка исследований, создание измерений, установка последовательности вручную или создание таблиц АК исследования.
- **Reports Presets** (Предустановки отчета). Редактирование шаблона отчета, кодов диагнозов и комментариев к отчету.

Обзор (продолжение)

- **Admin presets** (Предварительные настройки администратора). Выполнение административных задач, таких как настройка ID пациентов и порядка входа в систему.
- **Service** (Сервис). Включение служебного обозревателя.
- **Scan Assistant** (Помощник). Создание, импорт/экспорт и управление программами Scan Assistant.
- **Search** (Поиск). Поиск параметра выполняется на страницах утилит (поиск на страницах "Measure" (Измерение), "Reports" (Отчеты) и "Service" (Сервис) не поддерживается).
- **3D/4D (дополнительная функция)**. Сканирование в 4D-режиме реального времени и сканирование в режиме статичного 3D.

Для получения доступа к данным функциям выберите меню **Utility** (Утилиты).

Предварительная настройка системы

Установка иностранного языка для клавиатуры

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем перейти к следующей странице, необходимо применить изменения настроек на текущей странице.

1. Чтобы установить необходимый язык, выберите Utility (Утилиты) --> System (Система) --> General (Общие настройки). Сохраните данную настройку, но не перезагружайте систему.
2. Выберите меню "Regional Options" (Региональные параметры), укажите желаемый язык под пунктом "Standards and Formats" (Языковые стандарты и форматы) и месторасположение под пунктом "Location" (Расположение). Нажмите кнопку Apply (Применить).

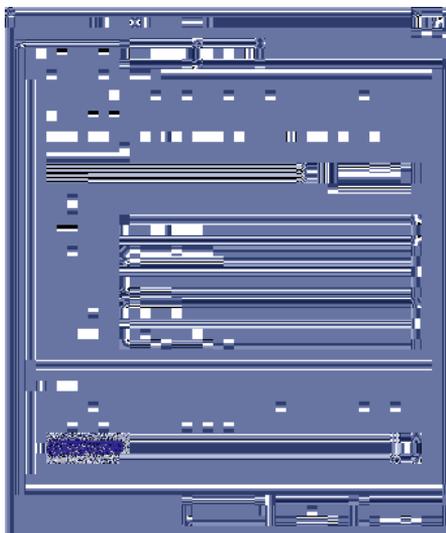


Рис. 3-1. Региональные опции

Установка иностранного языка для клавиатуры (продолжение)

3. Перейдите на вкладку "Advanced" (Дополнительно), затем выберите язык в раскрывающемся меню "Language for non-Unicode programs" (Язык для программ, не поддерживающих Юникод). Нажмите кнопку **Apply** (Применить). Выберите **Yes** (Да), чтобы использовать файлы, загруженные на жесткий диск; затем выберите **No** (Нет), чтобы не перезагружать систему.

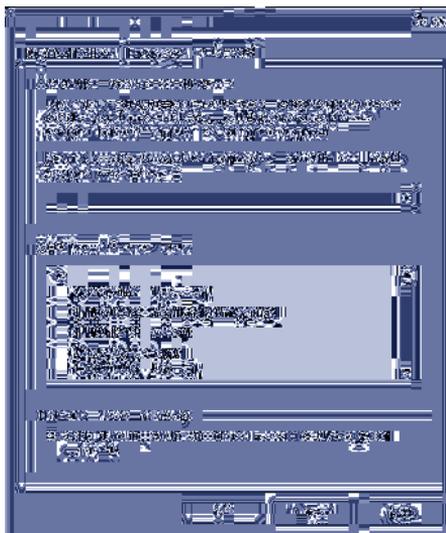


Рис. 3-2. Установка языка

Установка иностранного языка для клавиатуры (продолжение)

4. Для установки раскладки на другом языке осуществите следующие действия:
 - a. Выберите вкладку **Language** (Языки), нажмите **Details** (Подробнее).
 - b. Выберите желаемый язык под меню "Default input language" (Язык ввода по умолчанию).
 - c. Под меню **Installed Services** (Установленные службы) нажмите кнопку **Add** (Добавить), выберите язык в меню язык ввода, выберите раскладку клавиатуры или метода ввода (IME) и нажмите **Ok**.

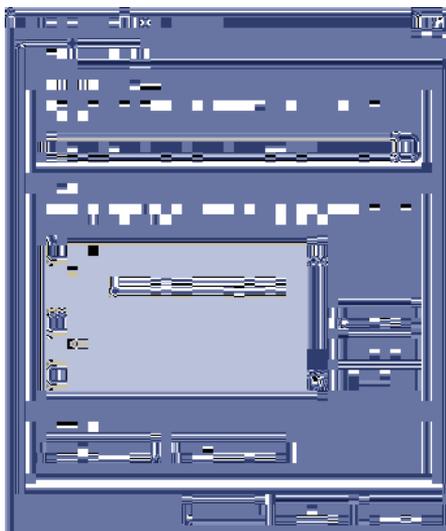


Рис. 3-3. Выбор для языка клавиатуры значения "International" (Международный)

- d. Нажмите **Apply** (Применить), а затем **OK**.

Установка иностранного языка для клавиатуры (продолжение)

5. Нажмите **Apply** (Применить), а затем **OK** во вкладке "Language" (Языки).
6. Нажмите "Save" (Сохранить) и выйдите из экрана "Utility" (Утилиты).
7. Перезагрузите систему. После перезагрузки язык системы будет изменен на выбранный.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите **Ctrl+Shift** для изменения раскладки клавиатуры, **Alt+Shift** для изменения языка ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы настройки вступили в силу, **НЕОБХОДИМО** выключить и снова включить систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервисный пароль не действует, если в качестве языка интерфейса выбран греческий или русский. Измените настройку, выбрав английский язык.

Резервное копирование данных

В этом разделе описаны процедуры резервного копирования и восстановления, которые разбиты на две части. В первой части описываются процедуры резервного копирования и восстановления данных пациента. Во второй части описываются процедуры резервного копирования и восстановления системных и пользовательских конфигураций.

Функция "Backup/Restore" (Резервное копирование/Восстановление) позволяет пользователю:

- Копировать/восстанавливать архивы пациентов.
- Копировать/восстанавливать конфигурацию системы. Функция копирования/восстановления конфигурации системы позволяет пользователю настроить несколько систем одинаковым образом при условии, что на них установлено программное обеспечение одной версии.

В зависимости от системы для резервного копирования и восстановления системы можно использовать CD-R, DVD-R, флэш-накопитель USB или жесткий диск USB. Для простоты в следующих примерах используется диск CD-R.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Система поддерживает ТОЛЬКО диски CD-R/DVD-R и НЕ поддерживает диски CD-RW/DVD+R.



Компания GE не несет ответственности за потерю данных и не обязана оказывать помощь в их восстановлении, если не выполняются рекомендованные процедуры резервного копирования.



Использование LOGIQ F в качестве накопителя данных не предусмотрено. Резервное копирование базы данных пациентов и изображений является ответственностью медицинского учреждения. Компания GE НЕ несет ответственности за утрату изображений, а также информации о пациентах.



Системный сбой может привести к повреждению жесткого диска. Жесткий диск не предназначен для постоянного хранения данных. Регулярно выполняйте резервное копирование данных.

Резервное копирование данных (продолжение)



В целях сведения к минимуму риска случайной потери данных регулярно выполняйте резервное копирование EZBackup, а также обычное резервное копирование.

1. Сначала выполните резервное копирование EZBackup, чтобы сохранить изображения.
2. Затем выполните резервное копирование на странице **Utility -> System -> Backup/Restore** (Утилиты -> Система -> Резервное копирование/восстановление). В области "Backup" (Резервное копирование) активируйте следующие опции:
 - Архив пациентов
 - Архив отчета
 - "User defined configuration" (Пользовательская конфигурация)
 - Элемент "Service" (Сервис)



Управление архивированными данными выполняется на местах. Рекомендуется создавать резервную копию данных (в любом устройстве).



Обязательно проверьте носитель после записи данных в ходе процедур EZBackup (Резервное копирование), SaveAs (Сохранить как) или экспорта.

Проверка носителя требует дополнительного времени, которое меняется в зависимости от объема резервируемых или экспортируемых данных.



Перед удалением данных пациента или изображения с экрана пациента убедитесь, что данные сохранены с помощью функции резервного копирования или экспорта и перенос данных на носитель выполнен успешно.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение)

Функции EZBackup и EZMove позволяют управлять пространством жесткого диска (то есть перемещать изображения с жесткого диска), а также создавать резервные копии базы данных пациента и изображений.

- **EZBackup:** копирование данных с локального жесткого диска на съемные носители.
- **EZMove:** копирование данных с локального жесткого диска на съемные носители. После копирования файла изображения на носитель EZMove удаляет файл изображения с локального жесткого диска.



ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Убедитесь, что протокол управления данными для вашего офиса/учреждения установлен. Пользователь ОБЯЗАН обслуживать носители, используемые для резервного копирования, путем ведения журнала и создания файловой системы.

Например, если необходимо сохранять резервные копии файлов объемом до 500 МБ в день или 2,5 ГБ в неделю, то необходимо выполнять резервное копирование 5 компакт-дисков в неделю или приблизительно 250 компакт-дисков в год.

В целом, выполнять резервное копирование системы следует по достижении объема изображений в 10 ГБ.

Необходимо назначить лицо, ответственное за выполнение процедуры резервного копирования. Частота выполнения процедуры зависит от объема выполненной работы. Необходимо определить, сколько времени требуется офису/учреждению, чтобы накопить 10 ГБ данных и соответствующим образом установить параметры резервного копирования.

В офисе/учреждении необходимо определить стратегию резервного копирования, например еженедельное резервное копирование и ежемесячное перемещение данных. Стратегия должна быть легкой для выполнения и запоминания. Стратегии и расписания следует придерживаться постоянно.

Также полезно сохранять последние полученные данные на жесткий диск, чтобы облегчить процедуру их восстановления.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)



Процедуру резервного копирования/перемещения можно выполнять ежедневно, но при этом следует **ОБЯЗАТЕЛЬНО** делать резервную копию архивных данных пациента после каждого перемещения данных.



Процедуру резервного копирования/перемещения следует отменять только в крайнем случае. Система завершает резервное копирование на текущий носитель и отменяет процедуру.



В случае если мастеру EZBackup требуется больше, чем один компакт-диск для резервного копирования (CD-R или DVD-R), появляется уведомление, что первый диск заполнен. Для остановки процедуры резервного копирования нажмите кнопку Cancel (Отмена), позже снова запустите функцию EZBackup, вся информация может не иметь резервных копий.

Выберите "Full Backup" (Полное резервное копирование) на первом экране мастера EZBackup, если в прошлый раз, запуская функцию EZBackup, вы выбрали "Cancel" (Отмена).

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)



Если функции EZBackup и EZMove используются для "настоящего" архивирования данных пациента, необходимо осуществить отдельное резервное копирование базы данных пациентов (архивных данных пациентов и архивов отчетов). Если по какой-либо причине локальный архив (на внутреннем жестком диске) был поврежден или требуется перезагрузить основное программное обеспечение системы, то восстановить архивные данные пациента EZBackup и EZMove можно ТОЛЬКО посредством восстановления этого архива из резервной копии или другого местоположения.



НЕ отключайте питание во время работы функции EZBackup. Это может привести к потере данных. Для завершения работы функции EZBackup может понадобиться несколько часов, в зависимости от количества данных, для которых создается резервная копия.

Может сложиться впечатление, что EZBackup прекратил работу. Это не так.

- Индикатор выполнения не двигается.
- Экран может стать белым.
- Изображение песочных часов продолжает поворачиваться.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ восстанавливать архивные данные пациента с носителя, записанного перед последней процедурой перемещения данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Функции EZBackup/EZMove сохраняют данные в формате необработанных данных. При импорте данных в систему можно изменить данные изображения.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Чтобы отобразить экспортируемые необработанные изображения DICOM на ПК, необходима специальная программа просмотра.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *При резервном копировании или перемещении отчетов с помощью функций EZBackup и EZMove используйте жесткий диск USB. Диски DVD и CD не пригодны для резервного копирования или перемещения отчетов с помощью функций EZBackup и EZMove.*



"Архивная" информация сохранена для последующих исследований благодаря функции EZBackup. При использовании функции EZBackup система осуществляет резервное копирование данных исследований, кроме заархивированных исследований.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью функции EZBackup/EZMove нельзя записать одно изображение на два (2) или несколько носителей. Таким образом, во время процедуры EZBackup/EZMove изображения, размер которых превышает емкость носителя, будут пропущены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процедуры EZBackup/EZMove изображения сохраняются на носителе без соблюдения последовательности. Вместо этого увеличивается число изображений, которые можно сохранить на носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система "зависает" в ходе автоматического форматирования носителя, отключите ее и загрузите еще раз. После возобновления нормальной работы системы замените носитель и выполните процедуру EZBackup или EZMove повторно. Во избежание потери данных не используйте неисправный носитель в дальнейшем.

ПРИМЕЧАНИЕ: При попытке экспортировать сделанную ранее резервную копию исследования на экран выводится сообщение "Can't Find Source file" (Не удается найти исходный файл). Данные изображения уже удалены с жесткого диска с помощью функций EZBackup/EZMove.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

По сути, процедура EZBackup или EZMove означает, что пользователь устанавливает носитель (или подключает жесткий диск USB, если возможно), система выполняет резервное копирование или перемещение изображений (или отчетов) и создает ссылку между базой данных пациентов и каталогом носителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура EZBackup/EZMove может занять до 20 минут (или больше, в зависимости от объема данных). Выполняйте ее ежедневно в одно и то же время, когда прием пациентов не ведется.

1. Приготовьте неотформатированный носитель или жесткий диск USB перед запуском процедуры EZBackup/EZMove.
2. Укажите параметры функции EZBackup/EZMove на странице Utility (Утилиты) --> System (Система) --> Backup/Restore (Резервное копирование/ Восстановление).
3. Чтобы запустить процедуру EZBackup/EZMove, войдите в меню **Archive** (Архивирование) и выберите пункт EZBackup/EZMove. Запустится мастер EZBackup/EZMove.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании жесткого диска USB HD некоторые мастера настроек, а также всплывающие сообщения НЕ отображаются.

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

4. Проверьте информацию на первой странице мастера EZBackup/EZMove, а затем нажмите *Next* (Далее).
Дисплей полного резервного копирования на первой странице мастера EZBackup. При необходимости повторного резервного копирования всех исследований (установите флажок, даже если исследование уже подвергалось резервному копированию).
Функция EZBackup не производит резервного копирования исследований, для которых уже создавались резервные копии при помощи функций EZBackup или Export.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете задать диапазон для функции EZMove, последовательно выбрав "Utility" (Утилиты) --> "System" (Система) --> "Backup/Restore" (Резервное копирование/Восстановление) -> "Move files older than in days" (Перемещать файлы старше __ дней).

ПРИМЕЧАНИЕ: При обновлении исследований, подвергавшихся резервному копированию, новое исследование также будет подвергнуто резервному копированию.



Рис. 3-4. Мастер EZBackup/EZMove, страница 1

**Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение)
(продолжение)**

5. Проверьте информацию на второй странице мастера EZBackup/EZMove. Функция резервного копирования позволяет записывать данные на несколько носителей. На этой странице приведены сведения о том, сколько носителей необходимо для выполнения данной процедуры резервного копирования. Приготовьте носители (включая один запасной) и приступайте к процедуре резервного копирования. Нажмите *Next* (Далее).

Free Space/Total Size (Свободное пространство/Общий размер): размер данных, выбранных для сохранения, и общий размер накопителя на жестком диске USB. Если емкости накопителя на жестком диске USB недостаточно, появится сообщение "Selected Location does not have enough free space" (На выбранном носителе недостаточно свободного пространства).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Число компакт-дисков, необходимых для резервного копирования, является приблизительным. Во время процедуры EZBackup/EZMove может потребоваться дополнительный компакт-диск.



Рис. 3-5. Мастер EZBackup/EZMove, страница 2

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

6. Отобразится всплывающее сообщение, содержащее обозначение носителя. Присвойте носителю обозначение, затем вставьте его. Нажмите **OK**.

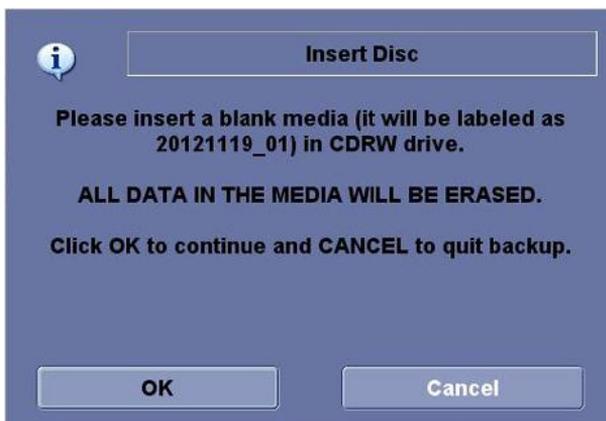


Рис. 3-6. Сообщение с просьбой вставить носитель

- a. Убедитесь, что обозначение носителя включает не только имя каталога, указанное в сообщении "Insert Media" (Вставьте носитель), но и название системы LOGIQ F, на которой выполняется процедура резервного копирования/перемещения данных.
- b. Внесите в журнал EZBackup/EZMove сведения о каталоге и местоположении носителя.
- c. По завершении резервного копирования/перемещения зарегистрируйте носитель.

Таблица 3-1: Стандартный журнал EZBackup/EZMove

Дата	Идентификатор сканера	Резервная копия изображений Д/Н	Старше __ дней	Перемещение изображений Д/Н	Обозначение носителя (и идентификатор сканера)

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

7. Отобразится меню состояния. По завершении процедуры резервного копирования/перемещения нажмите **Next** (Далее).



Рис. 3-7. Мастер EZBackup/EZMove, страница 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если необходимо вставить следующий носитель, отобразится сообщение, содержащее обозначение носителя. Присвойте носителю обозначение, затем вставьте следующий носитель и нажмите "ОК".

Функции EZBackup (Резервное копирование) и EZMove (Перемещение) (продолжение)

8. По завершении процедуры резервного копирования на экран будет выведена заполненная страница мастера. Нажмите *Finish* (Завершить).



Рис. 3-8. Мастер EZBackup/EZMove, страница 4

9. Архивируйте данные пациента после каждой процедуры EZBackup/EZMove.

Рекомендуется прикреплять к носителю EZBackup список пациентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Восстановление изображений EZBackup выполняется с помощью функции "Import" (Импорт).

Просмотр изображений, скопированных/перемещенных с помощью функций EZBacked/EZMoved

Резервную копию на носителем можно просмотреть с помощью меню пациента, функции импорта и потока данных "DICOM Read" (Чтение DICOM).

Для просмотра изображения, перемещенного с помощью функции EZMove:

1. Выберите пациента в меню пациента (в той же системе, в которой выполнялось резервное копирование/ перемещение данных).
2. Вставьте носитель, указанный в меню пациента.
3. Просмотрите данные обследования с носителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Возможно, потребуется вставить носитель до или после рекомендуемого носителя.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если данные пациента содержатся на нескольких носителях, изображения на предыдущем или следующем носителе отображаются в виде треугольников.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *Чтобы просмотреть все данные пациента, содержащиеся в системе, используйте функцию импорта со всех носителей, имеющихся для данного пациента. Однако следует соблюдать осторожность во избежание импортирования данных исследования поверх существующих данных, т.к. это может привести к дублированию или удалению изображений. Сначала необходимо удалить данные существующего обследования.*

Резервное копирование и восстановление

Для минимизации вероятности случайной потери данных осуществляйте резервное копирование архивных данных пациентов, сохраненных на жестком диске, **ЕЖЕДНЕВНО**, как описано в настоящем разделе. Для резервного копирования файлов пациента с жесткого диска используйте отформатированный диск резервного копирования/восстановления и соблюдайте процедуру резервного копирования, описанную в этом разделе. Данные с диска для резервного копирования/восстановления могут быть восстановлены на локальном жестком диске с помощью соответствующей процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для осуществления процедур резервного копирования и восстановления вы должны быть зарегистрированы в системе как пользователь с правами администратора.

Процедура резервного копирования

Сделайте резервную копию ЗААРХИВИРОВАННЫХ (с помощью EZBackup/EZMove) данных пациента, чтобы наведенный на изображения пациента курсор показывал, что изображения перемещены на съемные носители, и их больше нет на жестком диске.

1. Установите носитель в привод или USB-устройство в порт USB.
2. На экране "Archive" (Архивирование) в выпадающем списке выберите "Local Archive - Int". HD" (Локальный архив - внутр. НМЖД).
3. Выберите меню "Utility" (Утилиты) --> "System" (Система) --> "Backup/Restore" (Резервное копирование/восстановление данных).
4. В списке "Backup" (Резервное копирование) сделайте следующее:
 - Выберите **Patient Archive** (Архив пациентов) и **Report Archive** (Архив отчетов), чтобы сделать резервную копию записей пациентов.
 - Выберите **User Defined Configuration** (Пользовательская конфигурация), чтобы копировать системные настройки и пользовательские предварительные установки.
 - Выберите меню **Service** (Сервис) для резервного копирования сервисных настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В разделе подробных данных этого меню раскрыты настройки вышеупомянутой пользовательской конфигурации. Это позволяет выборочно восстанавливать только нужные настройки на разных аппаратах.

5. В поле носителя укажите место для сохранения данных.
6. Выберите **Backup** (Резервное копирование).
Будет выполнено резервное копирование. Во время восстановления сведения о состоянии отображаются на экране "Backup/Restore" (Резервное копирование/Восстановление).
7. По завершении процедуры на мониторе появится сообщение "Backup completed" (Резервное копирование завершено).
Нажмите **Eject** (Извлечь) (F3), чтобы извлечь носитель или отсоединить USB-устройство.
8. Не забудьте надписать носители. В надпись на диске следует также включить идентификационные данные системы, а протокол резервного копирования следует хранить.
Храните носитель в надежном месте.

Процедура восстановления



Во время процедуры восстановления существующая база данных на локальном жестком диске перезаписывается. Убедитесь, что вставлен правильный носитель.

Невозможно восстановить данные между системами с различными версиями программного обеспечения.



Чтобы избежать перезаписи местных архивных данных пациентов и архивов отчетов, во время восстановления конфигураций, определенных пользователем, НЕ устанавливайте флажок для пункта "Patient Archive" (Архив пациента).

- Выберите меню "Utility" (Утилиты) --> "System" (Система) --> "Backup/Restore" (Резервное копирование/ восстановление данных).
- В списке "Restore" (Восстановление) сделайте следующее:
 - Выберите **Patient Archive** (Архив пациентов) и **Report Archive** (Архив отчетов), чтобы восстановить данные из архива пациентов.
 - Выберите **User Defined Configuration** (Пользовательская конфигурация), чтобы восстановить все системные настройки и пользовательские предварительные установки.
или
Выберите один или несколько параметров пользовательской конфигурации, чтобы частично восстановить настройки из раздела "Detailed Restore" (Подробное восстановление) пользовательских настроек.
 - Выберите меню **Service** (Сервис), чтобы восстановить сервисные настройки.
- В поле "Media" (Носитель) выберите подходящее исходное устройство.
- Выберите **Restore** (Восстановить).
Будет выполнено восстановление. Во время восстановления сведения о состоянии отображаются на экране "Backup/Restore" (Резервное копирование/ Восстановление).
- По завершении восстановления система LOGIQ F перезапустится автоматически.

Стратегия резервного копирования и восстановления: пользовательские конфигурации

Помимо создания резервной копии функцию резервного копирования и восстановления пользовательской конфигурации (предварительных установок) можно использовать для конфигурирования систем LOGIQ F с одинаковыми предварительными установками (синхронизация предварительных установок).

Синхронизация предварительных установок

Порядок синхронизации предварительных установок нескольких сканеров следующий:

1. На полностью сконфигурированной системе LOGIQ F создайте резервную копию пользовательских конфигураций на съемном носителе.
2. Восстановите пользовательские конфигурации со съемного носителя на другую систему LOGIQ F (можно восстановить все пользовательские предварительные установки или выбрать для восстановления часть из них в разделе "Detailed Restore" (Подробное восстановление)).

Настройка подключения

Обзор

Функциональные возможности соединения используются для установки протоколов соединения и связи ультразвуковой системы. В данной главе представлен обзор всех функций соединения.

Функции подключения

Для настройки соединения для вашего учреждения необходимо войти в систему в качестве администратора.

- **TCPIP:** настройка протокола доступа в Интернет.
- **Device** (Устройство): настройка устройств.
- **Service** (Служба): позволяет настраивать службы (например, службы DICOM - принтеры, рабочий список, а также прочие службы стандартной печати) в списке поддерживаемых устройств. Это значит, что пользователь может настроить устройство с помощью служб DICOM, которые это устройство поддерживает.
- **Dataflow** (Поток данных): регулировка настройки выбранного потока данных и соответствующих служб. При выборе потока данных ультразвуковая система будет работать в соответствии со службами для выбранного потока данных.
- **Button** (Кнопка): назначение клавиш печати на панели управления предварительно настроенной службе вывода (или группе служб вывода).
- **Removable Media** (Сменный носитель): выбор форматирования (DICOM, базы данных или форматирование чистого носителя), а также проверка сменного носителя DICOM.
- **Miscellaneous:** позволяет настраивать меню пациента/исследования, изменять настройки печати и хранения, настройки сообщений в меню пациента/исследования, Other ID Options (другие настройки идентификационного кода) и колонки в списке исследования.

Выполните настройку параметров на вкладках справа налево, начиная с вкладки TCPIP.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Многие функции ультразвуковой системы уже настроены, а параметры выбраны по умолчанию. Эти функции и настройки можно при необходимости менять.



После внесения изменений в настройки соединения в меню "Utility" (Утилиты) требуется перезагрузить LOGIQ F. Это также относится к экранам настройки TCPIP или потока данных.

Замечание по антивирусному ПО

В системе LOGIQ F НЕТ антивирусного ПО. Поскольку система LOGIQ F уже защищена от вредоносных атак нижеперечисленными мерами, антивирусное ПО не считается нужным.

- Доступны только порты связи, необходимые для работы системы.
- Доступны только те службы операционной системы, которые необходимы для прикладного ПО системы.
- В систему LOGIQ F НЕЛЬЗЯ загрузить программы (например, программу для работы с электронной почтой, веб-браузер и т.д.).
- В системе LOGIQ F НЕЛЬЗЯ запустить автоматически выполняемый файл.
- ПО LOGIQ F включает в себя самую последнюю систему безопасности MS Windows.

Благодаря приведенным выше мерам безопасности и стандартам защиты операционной системы Windows XP Service Pack 3 обеспечена высочайшая степень защиты от вирусов, червей и т.д., гарантирующая достаточные меры безопасности. Кроме того, дополнительные сведения о безопасности можно найти на веб-узле по адресу: <http://www.gehealthcare.com/usen/security/index.html>.

Электронная документация

Работа с документацией на ПК

Чтобы просмотреть руководство пользователя на ПК, выполните следующие действия:

- Вставьте носитель в дисковод.
- Откройте дисковод на рабочем столе.
- Выберите и откройте элемент для просмотра.

Чтобы закрыть окно, нажмите "X" в правом верхнем углу окна обозревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Если в компьютере не установлена программа Adobe Reader, ее можно бесплатно загрузить с сайта Adobe по адресу <http://www.adobe.com>.*

Данные о системе

Функции/Технические характеристики

Таблица 3-2: Физические характеристики

<p><u>Габариты и вес</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Высота: приблизительно 1,450 мм • Ширина: приблизительно 720 мм • Глубина: приблизительно 800 мм • Вес: менее 65 кг <p><u>Компоненты консоли</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Три активных порта для датчиков • Четыре активных порта для датчиков (устанавливаются дополнительно) <i>Примечание: система LOGIQ F3 не поддерживает 4 активных порта датчиков.</i> • Встроенный жесткий диск • Встроенный DVD-R/RAM привод (устанавливаются дополнительно) • Место для установки термопринтера • Встроенные динамики • Механизм блокировки, обеспечивающий блокировку вращения • Приспособление для размещения кабелей • Передние и задние ручки • Съёмные воздушные фильтры • Подвижный кронштейн (поставляется дополнительно) <p><u>Электропитание</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 100-240 В переменного тока • Частота: 50/60 Гц • Мощность: не более 400 В•А с периферийными устройствами 	<p><u>Клавиатура</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Буквенно-цифровая клавиатура • Эргономичная раскладка • Интерактивная подсветка <p><u>Сенсорная панель (дополнительно)</u> <i>Примечание: в системах LOGIQ F3 и LOGIQ F6 сенсорная панель не используется.</i></p> <p><u>ЖК-монитор с диагональю 17"/19" (дополнительно)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ЖК-дисплей с высоким разрешением • Возможность регулировки монитора: угол наклона — 25 градусов вверх, 90 градусов вниз; угол поворота — 80 градусов влево и вправо. • При транспортировке монитор складывается. • Регулировка яркости и контрастности <i>Примечание: в системе LOGIQ F3 монитор с диагональю 19" не поддерживается.</i>
--	---

Таблица 3-3: Обзор системы

<p><u>Области применения</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Брюшная полость• Акушерство• Гинекология• Поверхностно расположенные органы• Вазкулярные исследования/исследования периферических кровеносных сосудов• Транскраниальный• Педиатрия• Исследование костно-мышечных тканей• Урология• Кардиология• Трансвагинальное исследование• Биопсия <p><u>Методы сканирования</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Электронное секторное• Электронное конвексное• Электронное линейное• Механическая объемная развертка	<p><u>Типы датчиков</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Секторный с фазированной решеткой• Линейный• Конвексный <p><u>Рабочие режимы</u></p> <ul style="list-style-type: none">• В-режим• Гармоническая визуализация• М-режим• ЦДК• PDI (Энергетический доплер)• Направленная энергетическая доплерография• Допплеровский импульсно-волновой режим (с высокой частотой повторения импульса)• Режим кинопетли• Анатомический М-режим• Цветовой М-режим• Непрерывно-волновой доплер (дополнительно)• Режим 3D/4D (дополнительно)• Визуализация скорости движения тканей (TVI) (дополнительно)• Тканевой доплер (TDI) (дополнительно)• Эластография (дополнительно)
--	--

Таблица 3-3: Обзор системы

<p><u>Стандартные функции</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматическая оптимизация (ATO/ASO) • Автоматическая установка частоты • Точный выбор угла • Виртуальный конвекс • База данных сведений о пациентах • Архив изображений на носителе CD/DVD или жестком диске • Автоматические расчеты в доплеровском режиме реального времени • Общие измерения/расчеты в В-режиме • Общие измерения/расчеты в М-режиме • Общие измерения/расчеты в режиме доплерографии • Измерения/вычисления в акушерской рабочей таблице • Построение трендов параметров плода • Мультигестационные расчеты • Расчеты: дисплазия бедра • Гинекологические измерения/расчеты • Вазкулярные измерения/расчеты • Урологические измерения/расчеты • Абдоминальные измерения/расчеты • Педиатрические измерения/расчеты • Кардиологические измерения/расчеты • Измерения/расчеты малых органов • Трехмерные расчеты объема • Функция inSite ExC • Другой ID • CrossXBeam • SRI-HD • Комплект отчетов • Scan Coach (Консультант) • Биопсия 	<p><u>Опции</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • LOGIQView • Easy 3D • 3D/4D • Непрерывно-волновой доплер (CWD) <i>Примечание: система LOGIQ F3 не поддерживает функции 4D и CWD.</i> • Эластография • TVI • Допплеровская визуализация тканей <ul style="list-style-type: none"> • TVD • Q Analysis (Количественный анализ) • DICOM • Автоматическое измерение толщины интима-медиа (ТИМ) • AMM <p><u>Периферийные устройства</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Черно-белый принтер • Цветной принтер • Устройство печати отчетов • Подключения принтеров через порт USB • ЭКГ • Педальный переключатель
---	--

Таблица 3-4: Системные параметры

<p><u>Элементы управления, доступные в режиме стоп-кадра и при воспроизведении</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматическая оптимизация • SRI-HD • CrossXBeam — показ несоставного и составного изображения одновременно на разделенном экране • 3D-реконструкция из сохраненных кинопетель • Режим В/М/CrossXBeam (шкала серого; Компенсация усиления (КУ), цветные В- и М-режимы; Усреднение кадров [только кинопетли]; динамический диапазон) • Анатомический М-режим • Макс. масштаб при чтении данных — 8 • Сдвиг базовой линии • Скорость развертки • Режим импульсно-волнового доплера (шкала серого; пост-усиление; сдвиг базовой линии; скорость развертки; инверсия кривой спектра; сжатие; отсечение, цветной спектр; формат отображения; звуковое сопровождение доплеровского режима; коррекция угла; быстрая коррекция угла, автоматическая коррекция угла) • ЦДК (общее усиление [кинопетли и статичные изображения]; цветовая карта; карта прозрачности; усреднение кадров [только кинопетли]; подавление вспышек, порог отображения в режиме ЦДК; инверсия спектра в цветном режиме/доплеровском режиме) • Кинопетля в анатомическом М-режиме 	<p><u>Параметры сканирования</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Отображаемая глубина изображения: 2—33 см • Минимальная глубина поля: 0—2 см (масштабирование в зависимости от датчика) • Максимальная глубина поля: 0—33 см (в зависимости от датчика) • Фокус/апертура непрерывного динамического приема • Регулируемый динамический диапазон • Регулируемое поле обзора [FOV] • Поворот изображения: вправо/влево • Поворот изображения: 0°, 180° <p><u>Хранение изображений</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • База данных предыдущих исследований в системе • Форматы хранения: <ul style="list-style-type: none"> • DICOM — сжатый/не сжатый, одно изображение/несколько кадров, с необработанными данными или без них • Экспорт в форматах JPEG, JPEG2000, WMV (MPEG 4) и AVI • Устройства хранения: <ul style="list-style-type: none"> • Флэш-накопитель USB: от 64 Мб до 4 Гб (для экспорта отдельных изображений/клипов) • Диск CD-RW: 700 Мб • Диск DVD: -R (4,7 Гб) • Жесткий диск: ~112 Гб • Сравнение старых изображений с текущим исследованием • Повторная загрузка архивированных наборов данных
<p><u>Элементы управления, доступные в режиме реального времени</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Масштабирование при записи сигнала • Режим В/М (усиление; КУ; динамический диапазон; выходная акустическая мощность; положение фокуса прохождения сигнала; число фокусов прохождения сигнала; регулировка линейной плотности; скорость развертки в М-режиме; углов для CrossXBeam) • Режим импульсно-волнового доплера (усиление; динамический диапазон; выходная акустическая мощность; частота передачи; ЧПИ; фильтр движения стенок; усреднение спектра; строб контрольного объема в режиме импульсно-волнового доплера: длина и глубина; шкала скорости) • Режим ЦДК (усиление ЦДК); диапазон скоростей ЦДК; выходная акустическая мощность; эхо-фильтр движения стенок; размер пакета; регулировка частоты кадров; пространственный фильтр ЦДК; усреднение кадров ЦДК; линейное разрешение ЦДК; сдвиг базовой линии частоты/скорости) 	<p><u>Кинопамять/память изображений</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбираемая последовательность кинопетель при просмотре • Метка проспективной кинопетли • Измерения/расчеты и добавление комментариев к воспроизводимым кинопетлям • Прокрутка памяти временной шкалы • Воспроизведение кинопетли в двухоконном формате • Воспроизведение кинопетли в четырехоконном формате • Индикатор положения кинопетли и отображение номера видеофрагмента • Просмотр кинопетли • Скорость перемотки кинопетли

Таблица 3-5: Измерения и расчеты

<p><u>В-режим</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Глубина и расстояние Измерение окружности и площади (методом эллипса/трассировки) Объем (эллипсоид) Угол между 2 линиями Процент стеноза (площадь или диаметр) <p><u>М-режим</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Глубина и расстояние в М-режиме Время Наклон ЧСС <p><u>Измерения/расчеты в режиме доплера</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Скорость Время Отношение A/B (отношение скоростей/частот) Пиковая систолическая скорость (PS) Конечная диастолическая скорость (ED) Отношение PS/ED (ПС/КД) Отношение ED/PS (КД/ПС) Время ускорения (AT) Accel (Ускорение) TAMAX (Усредненная по времени максимальная скорость) Объемный поток [TAMEAN и площадь сосуда] ЧСС PI (индекс пульсации) RI (индекс сопротивления) <p><u>Измерения/расчеты: сосуды</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Измерения сонных, позвоночных, подключичных артерий, Автоматическое измерение ТИМ Сводные отчеты 	<p><u>Измерения/расчеты: акушерство</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Расчет гестационного возраста Вычисление расчетной массы плода Расчеты и коэффициенты Измерения/расчеты Создание графических трендов плода Процентили роста Расчет для многоплодной беременности Качественное описание плода (анатомическое исследование) Описание окружающей среды плода (биофизический профиль). Программируемые графики АК исследований Более 20 АК-расчетов на выбор Расширенные рабочие таблицы <p><u>Измерения/расчеты: гинекология</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Длина, ширина и высота правого/левого яичника Длина, ширина и высота матки Длина шейки матки, трассировка Объем яичника ENDO (Толщина эндометрия) Индекс резистентности матки/яичников Итоговый отчет <p><u>Урологические расчеты</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Мочевой пузырь, предстательная железа, почки, стандартные измерения объема Объем после мочеиспускания <p><u>Кардиологические измерения/расчеты</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Кардиологические измерения и расчеты Сводная рабочая таблица Итоговый отчет
---	--

Таблица 3-6: Датчик

<ul style="list-style-type: none"> 4C-RS (типы исследований: брюшная полость, акушерство, гинекология, педиатрия, урология, биопсия) 3Sc-RS (типы исследований: брюшная полость, транскраниальные исследования, педиатрия, биопсия) L6-12-RS (типы исследований: малые органы, сосуды/периферические сосуды, педиатрия, костно-мышечные ткани, биопсия) 	<ul style="list-style-type: none"> E8C-RS (типы исследований: акушерство, гинекология, урология, трансвагинальные исследования, биопсия) 8C-RS (типы исследований: брюшная полость, педиатрия, кардиология) RAB2-6-RS (типы исследований: брюшная полость, акушерство, гинекология, урология, биопсия)
--	---

Таблица 3-7: Входные и выходные сигналы

<p>Внешние входные и выходные сигналы</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 USB 2.0 Ethernet 	<p>Выходные сигналы</p> <ul style="list-style-type: none"> Выход композитного цветного видеосигнала Выход S-Video Выход VGA-видео Стерефонический аудиовыход
---	--

Уход за системой и техническое обслуживание

Проверка системы



Во избежание поражения электрическим током не снимайте панель и крышку с панели управления. Это разрешается делать только квалифицированному обслуживающему персоналу. Несоблюдение этого правила может привести к получению тяжелых травм.

Ежемесячное техническое обслуживание

Ежемесячно (или если есть основания предполагать, что может возникнуть неполадка), проверяйте следующее:

- Наличие механических повреждений разъемов кабелей.
- Наличие порезов и следов истирания по всей длине электрических и силовых кабелей.
- Наличие отсоединенных и утраченных компонентов оборудования.
- Наличие дефектов на панели управления и клавиатуре.
- Правильность блокировки замков.
- Подвижность трекбола.

Если трекбол грязный, очистите его. Более подробную информацию см.: 'Трекбол' на *стр.* 3-39.

Еженедельное техническое обслуживание

Для обеспечения надежного и корректного функционирования системы необходимо осуществлять еженедельный уход и техническое обслуживание.

Необходимо проводить очистку следующих элементов:

- Шкаф системного оборудования
- ЖК-монитор
- Панель управления
- Сенсорная панель (устанавливается дополнительно)
- Держатели для датчика и геля
- Педальный переключатель
- Воздушный фильтр (очистка фильтра производится еженедельно либо по мере необходимости)

Если фильтр пыльный, очистите его. Более подробную информацию см.: 'Чистка воздушных фильтров' на *стр. 3-40*.

Невыполнение требуемых операций технического обслуживания может привести к обращению в сервисный центр без фактических оснований для этого.

Очистка системы

Перед выполнением чистки любого компонента системы:

1. Выключите питание. Отсоедините кабель питания от розетки. Более подробную информацию см.: 'Отключение питания' на *стр. 1-29*.

Шкаф системного оборудования

Чистка корпуса системы:

1. Смочите мягкую, неабразивную, сложенную в несколько слоев тканевую салфетку в водном растворе мягкого туалетного мыла.
2. Протрите верхнюю, переднюю, заднюю и боковые панели корпуса системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Не допускайте попадания жидкости непосредственно внутрь оборудования.*

Операторская панель управления

Чистка панели управления:

1. Смочите мягкую, неабразивную, сложенную в несколько слоев тканевую салфетку в водном растворе мягкого туалетного мыла.
2. Протрите панель управления.
3. Используйте ватный тампон и протрите участки вокруг клавиш и элементов управления. При помощи зубочистки удалите отложения твердых веществ между клавишами и элементами управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: При чистке панели управления старайтесь, чтобы жидкость не попала на элементы управления, внутрь корпуса системы и в гнездо для подсоединения датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии угрозы заражения атипичной пневмонией используйте для чистки/дезинфекции панели управления обычный раствор отбеливателя, спирта или средство Cidex.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте Tspray или Sani Wipes для очистки панели управления.



Перед чисткой панели управления убедитесь в том, что крышки клавиш плотно вставлены.

ЖК-монитор

Чистка лицевой поверхности монитора:

Используйте мягкую ткань, сложенную в несколько слоев. Аккуратно протрите лицевую поверхность монитора.

НЕ используйте очистители для стекла на углеводородной основе (например, бензол, метиловый спирт, метилэтилкетон) для чистки мониторов с фильтром (антибликовый экран). Если сильно давить на экран в процессе его очистки, то это также может повредить фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: При чистке монитора следует избегать возникновения царапин.

Сенсорная панель (устанавливается дополнительно)

Для очистки Сенсорная панель пользуйтесь не содержащими аммиака (только с изопропилом и водой) очистителями для линз. Их можно приобрести в большинстве компьютерных магазинов. НЕ следует использовать аммиаксодержащие средства Windex, Screen-Clean и т.д., так как они могут повредить антибликовое покрытие Сенсорная панель.

Педальный переключатель

Для очистки педального выключателя:

1. Смочите мягкую, неабразивную, сложенную в несколько слоев тканевую салфетку в водном растворе мягкого туалетного мыла.
2. Протрите внешние поверхности устройства, после чего насухо вытрите их мягкой чистой тканью.

Трекбол

1. Выключите питание системы.
2. Поворачивайте фиксатор против часовой стрелки до тех пор, пока его можно будет снять с клавиатуры.

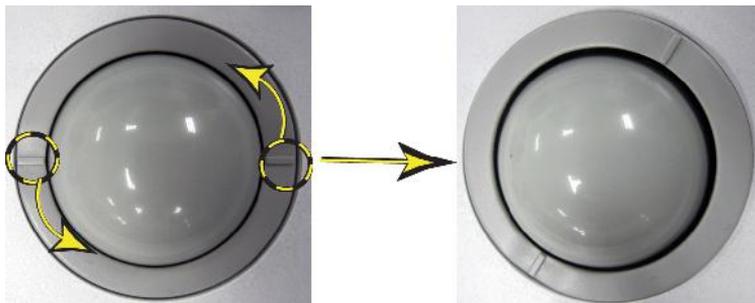


Рис. 3-9. Поверните фиксатор

3. Отделите трекбол и фиксатор. С помощью чистящего средства или ватного тампона удалите весь жир и пыль с трекбола, фиксатора и корпуса трекбола.
4. Соберите трекбол и фиксатор, затем вставьте их в корпус и поворачивайте по часовой стрелке, пока пазы не встанут на место.



Во время чистки следите за тем, чтобы на корпус трекбола (клавиатура системы) не пролилась или не разбрызгалась никакая жидкость.

Чистка воздушных фильтров

Своевременная чистка воздушных фильтров системы позволяет предупредить их засорение, которое может привести к перегреву системы, снижению ее функциональности и надежности. Рекомендуется чистить фильтры каждые две недели, но требования могут меняться в зависимости от интенсивности эксплуатации системы.



Перед тем как приступить к чистке воздушных фильтров, не забудьте заблокировать колеса тележки системы во избежание получения травм при неожиданном смещении системы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать систему без установленных воздушных фильтров.

Дайте высохнуть воздушным фильтрам, прежде чем устанавливать их обратно в систему.

Чистка

1. Извлеките воздушный фильтр, расположенный с задней стороны системы.



Рис. 3-10. Выньте фильтр.

2. Удалите пыль с фильтра пылесосом и (или) помойте его мягким мыльным раствором.
Вымытый фильтр ополосните и просушите, прежде чем устанавливать обратно.
3. Вставьте воздушный фильтр на место

Предотвращение возникновения помех, связанных со статическим электричеством

Помехи от электростатических разрядов могут повредить электронные компоненты системы. Следующие меры помогают снизить вероятность возникновения электростатического разряда:

- Раз в месяц протирайте буквенно-цифровую клавиатуру и монитор безворсовой салфеткой или мягкой тканью, смоченной антистатическим аэрозолем.
- Распыляйте антистатический аэрозоль на ковровое покрытие, поскольку хождение по ковровому покрытию в пределах или за пределами кабинета УЗД может быть источником статического электричества.

Утилизация

Таблица 3-8: Символ WEEE

	Задняя панель системы и разъем датчика
---	--

Этот символ означает, что отходы данного электрического и электронного оборудования следует собирать отдельно от неотсортированных бытовых отходов и утилизировать соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации.

Поиск и устранение неисправностей

Если на экране появляются другие сообщения, см. руководство по техническому обслуживанию.

Таблица 3-9: Сообщение об ошибке и способ ее устранения

	<p>Слишком высокая температура системы. Система будет отключена.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отключите систему.2. Произведите очистку воздушного фильтра в соответствии с 'Чистка воздушных фильтров' на <i>стр.</i> 3-40.
	<p>Сбой напряжения системы. Система будет отключена.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите OK и перезагрузите систему.2. Если после перезагрузки появится то же самое сообщение, отключите систему и выключатель. Затем включите систему в соответствии с 'Включение питания' на <i>стр.</i> 1-28.
	<p>Системная ошибка. Перезагрузите систему.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите OK и перезагрузите систему.2. Если после перезагрузки появится то же самое сообщение, отключите систему и выключатель. Затем включите систему в соответствии с 'Включение питания' на <i>стр.</i> 1-28.

Помощь

Расходные материалы/Принадлежности



ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать любые датчики и принадлежности без одобрения компании GE.



При замене внутреннего периферийного оборудования используйте только оборудование, одобренное компанией GE.

Пользователь или оператор ни в коем случае не должны устанавливать или заменять внутренние периферийные устройства. Установку внутренних периферийных устройств выполняют представители сервисной службы, уполномоченные компанией GEHC.

Не все функции системы, датчики или периферийные устройства, описанные в данном руководстве, могут иметься в наличии или быть разрешенными к продаже на всех рынках. За свежей информацией обращайтесь к представителю компании GE Ultrasound.

Список разрешенных периферийных устройств можно получить у дистрибьютора, в филиале или торговом представительстве компании GE. За изделиями с индексом HCAT обращайтесь к продавцу.

Перечисленные ниже расходные материалы и принадлежности проверены на совместимость с системой:

Таблица 3-10: Периферийные устройства и дополнительные принадлежности

Принадлежности	Единицы
4C-RS	Шт.
8C-RS	Шт.
L6-12-RS	Шт.
E8C-RS	Шт.
3Sc-RS	Шт.
RAB2-6-RS	Шт.
ЭКГ	Шт.

Таблица 3-10: Периферийные устройства и дополнительные

Принадлежности	Единицы
Педальный переключатель FSU-1000	Шт.
Педальный переключатель MKF 2- MED GP26	Шт.
USB-накопитель SanDisk 4G	Шт.
USB-жесткий диск 1T	Шт.
Принтер Sony UP-D25MD	Шт.
Принтер Sony UP-D897	Шт.
Принтер Sony UP-D711MD	Шт.
Принтер HP Officejet 100	Шт.

Контактная информация

Контактная информация компании GE Ultrasound

За дополнительной информацией и помощью обращайтесь к региональному дистрибьютору или в соответствующую службу поддержки из списка, приведенного ниже:

Через ИНТЕРНЕТ

<http://www.gehealthcare.com>

http://www.gehealthcare.com/usen/ultrasound/products/probe_care.html

Клинические вопросы

Если вы находитесь в США, Канаде, Мексике и странах Карибского бассейна, обращайтесь за консультацией в центр по работе с клиентами: ТЕЛ.: (1) 800-682-5327 или (1) 262-524-5698

Пользователям в других регионах следует обращаться к региональному представителю по оборудованию, продажам или сервисному обслуживанию.

Вопросы сервисного обслуживания

По вопросам сервисного обслуживания на территории США звоните в GE CARES

ТЕЛ.: (1) 800-437-1171

Пользователям в других регионах следует обращаться к региональному представителю сервисной службы.

Запрос информации

Для запроса технических данных изделия на территории США обращайтесь в компанию GE.

ТЕЛ.: (1) 800-643-6439

Пользователям в других регионах следует обращаться к региональному представителю по оборудованию, продажам или сервисному обслуживанию.

Размещение заказа

Для заказа дополнительных принадлежностей, расходных материалов или запасных частей на территории США обращайтесь в контактный центр компании GE Technologies.

ТЕЛ.: (1) 800-558-5102

Пользователям в других регионах следует обращаться к региональному представителю по оборудованию, продажам или сервисному обслуживанию.

Контактная информация компании GE Ultrasound (продолжение)

АМЕРИКА

- АРГЕНТИНА** GEME S.A.
Miranda 5237
Buenos Aires - 1407
ТЕЛ: (1) 639-1619 ФАКС: (1) 567-2678
- БРАЗИЛИЯ** GE Healthcare do Brasil Comercio e Servicos para
Equipamentos Médico- Hospitalares Ltda
Av. Das Nazxes Unidas, 8501
3° andar parte - Pinheiros
Sro Paulo SP - CEP: 05425-070
C.N.P.J.: 02.029.372/0001-40
ТЕЛ: 3067-8010 ФАКС: (011) 3067-8280
- КАНАДА** Ultrasound Service Engineering
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
ТЕЛ: (1) 800-668-0732
Центр по работе с клиентами ТЕЛ.: (1) 262-524-5698
- ЛАТИНСКАЯ И
ЮЖНАЯ
АМЕРИКА** Ultrasound Service Engineering
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
ТЕЛ: (1) 262-524-5300
Центр по работе с клиентами ТЕЛ.: (1) 262-524-5698
- МЕКСИКА** GE Sistemas Medicos de Mexico S.A. de C.V.
Rio Lerma #302, 1° y 2° Pisos
Colonia Cuauhtemoc
06500-Mexico, D.F.
ТЕЛ: (5) 228-9600 ФАКС: (5) 211-4631
- США** Ultrasound Service Engineering
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
ТЕЛ: (1) 800-437-1171 ФАКС: (1) 414-721-3865

Контактная информация компании GE Ultrasound (продолжение)

АЗИЯ

АЗИАТСКО-ТИХО ОКЕАНСКИЙ РЕГИОН ЯПОНИИ

GE Healthcare Asia Pacific
4-7-127, Asahigaoka
Hinoshi, Tokyo
191-8503, Japan
ТЕЛ.: +81 42 585 5111

Австралия

Building 4B, 21 South St
Rydalmere NSW 2116
Australia
ТЕЛ.: 1300 722 229

КИТАЙ

GE Healthcare - Asia
№ 1, Yongchang North Road
Beijing Economic & Technology Development Area
Beijing 100176, China
ТЕЛ: (8610) 5806 8888 ФАКС: (8610) 6787 1162

ИНДИЯ

Wipro GE Healthcare PVT Limited
№ No.4, Kadugodi Industrial Area,
Bangalore, 560067
ТЕЛ: +(91) 1-800-425-8025

КОРЕЯ

8F, POBA Gangnam Tower
343, Hakdong-ro, Gangnam-gu
Seoul 135-820, Korea
ТЕЛ.: +82 2 6201 3114

Новая Зеландия

8 Tangihua Street
Auckland 1010
New Zealand
ТЕЛ.: 0800 434 325

СИНГАПУР

ASEAN
1 Maritime Square #13-01
HarbourFront Center
Singapore 099253
ТЕЛ.: +65 6291 8528

Контактная информация компании GE Ultrasound (продолжение)

ЕВРОПА

Пользователям в странах Европы, не вошедшим в приведенный выше список, следует обращаться к региональному дистрибьютору компании GE или в соответствующую службу поддержки, указанную на веб-сайте www.gehealthcare.com.

АВСТРИЯ

General Electric Austria GmbH
Filiale GE Healthcare Technologies
EURO PLAZA, Gebäude E
Wienerbergstrasse 41
A-1120 Vienna
ТЕЛ: (+43) 1 97272 0 ФАКС: (+43) 1 97272 2222

БЕЛЬГИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ

GE Medical Systems Ultrasound
Eagle Building
Kouterveldstraat 20
1831 DIEGEM
ТЕЛ: (+32) 2 719 7204 ФАКС: (+32) 2 719 7205

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

GE Medical Systems Ultrasound
Vyskocilova 1422/1a
140 28 Praha

ДАНИЯ

GE Medical Systems Ultrasound
Park Alle 295, 2605 Brøndby
ТЕЛ: (+45) 43 295 400 ФАКС: (+45) 43 295 399

ЭСТОНИЯ И ФИНЛЯНДИЯ

GE Medical Systems
Kuortaneenkatu 2, 000510 Helsinki
P.O.Box 330, 00031 GE Finland
ТЕЛ: (+358) 10 39 48 220 ФАКС: (+358) 10 39 48 221

ФРАНЦИЯ

GE Medical Systems Ultrasound
and Primary Care Diagnostics
F-78457 Velizy
General Imaging ТЕЛ.: (+33) 13 449 52 43
Cardiology ТЕЛ.: (+33) 13 449 52 31
ФАКС: (+33) 13 44 95 202

ЕВРОПА (продолжение)

ГЕРМАНИЯ GE Healthcare GmbH
Beethovenstrasse 239
42655 Solingen
ТЕЛ: (+49) 212-28 02-0 ФАКС: (+49) 212-28 02 28

ГРЕЦИЯ GE Healthcare
8-10 Sorou Str. Marousi
Athens 15125 Hellas
ТЕЛ: (+30) 210 8930600 ФАКС: (+30) 210 9625931

ВЕНГРИЯ GE Hungary Zrt. Ultrasound
Division, Akron u. 2.
Budaors 2040 Hungary
ТЕЛ: (+36) 23 410 314 ФАКС: (+36) 23 410 390

ИРЛАНДИЯ **СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ**
GE Healthcare
Victoria Business Park
9, Westbank Road, Belfast BT3 9JL.
ТЕЛ: (+44) 28 90229900

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
GE Healthcare
Unit F4, Centrepont Business Park
Oak Drive, Dublin 22
ТЕЛ: (+353) 1 4605500

ИТАЛИЯ GE Medical Systems Italia spa
Via Galeno, 36, 20126 Milano
ТЕЛ: (+39) 02 2600 1111 ФАКС: (+39) 02 2600 1599

ЛЮКСЕМБУРГ См. Бельгия

НИДЕРЛАНДЫ GE Healthcare
De Wel 18 B, 3871 MV Hoevelaken
PO Box 22, 3870 CA Hoevelaken
ТЕЛ: (+31) 33 254 1290 ФАКС: (+31) 33 254 1292

ЕВРОПА (продолжение)

НОРВЕГИЯ GE Medical Systems Ultrasound
Tesenveien 71, 0873 Oslo
ТЕЛ: (+47) 2202 0800

GE Medical Systems Ultrasound
Strandpromenaden 45
P.O. Box 141, 3191 Horten
ТЕЛ: (+47) 33 02 11 16

ПОЛЬША GE Medical Systems Polska
Sp. z o.o., ul. Woloska 9
02-583 Warszawa, Poland
ТЕЛ: (+48) 22 330 83 00 ФАКС: (+48) 22 330 83 83

ПОРТУГАЛИЯ General Electric Portuguesa
SA. Avenida do Forte, n° 4
Fracao F, 2795-502 Carnaxide
ТЕЛ: (+351) 21 425 1309 ФАКС: (+351) 21 425 1343

РОССИЯ GE Healthcare
Пресненская наб.
д.10, блок С, 12 эт.
123317 Moscow, Russia
ТЕЛ: (+7) 495 739 6931 ФАКС: (+7) 495 739 6932

ИСПАНИЯ GE Healthcare Espana
C/ Gobelos 35-37
28023 Madrid
ТЕЛ: (+34) 91 663 2500 ФАКС: (+34) 91 663 2501

ШВЕЦИЯ GE Medical Systems Ultrasound
PO Box 314, 17175 Stockholm
ТЕЛ: (+46) 8 559 50010

ЕВРОПА (продолжение)

ШВЕЙЦАРИЯ GE Medical Systems Ab
Europastrasse 31
8152 Glattbrugg
ТЕЛ: (+41) 1 809 92 92 ФАКС: (+41) 1 809 92 22

ТУРЦИЯ GE Healthcare Türkiye
Istanbul Office
Levent Ofis
Esentepe Mah. Harman Sok.
No:8 Sisli-Istanbul
ТЕЛ: +90 212 398 07 00 ФАКС: +90 212 284 67 00

**ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ (ОАЭ)** GE Healthcare
Dubai Internet City, Building No. 18
P. O. Box # 11549, Dubai
U.A.E
ТЕЛ: (+971) 4 429 6101 или 4 429 6161
ФАКС: (+971) 4 429 6201

**ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ** GE Medical Systems Ultrasound ТЕЛ.: (+44) 1707 263570
71 Great North Road ФАКС: (+44) 1707 260065
Hatfield, Hertfordshire, AL9 5EN

Производитель



GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
№ 19, Changjiang Road
WuXi National Hi-Tech Development Zone
Jiangsu, P.R. China 214028
ТЕЛ.: +86 510 85225888; ФАКС: +86 510 85226688

Глава 4

Меры безопасности

Меры безопасности и сведения о нормативных документах, необходимых для работы с данным ультразвуковым оборудованием.

Ответственность владельца

Владелец оборудования обязан обеспечить, чтобы все лица, работающие с системой, прочитали и усвоили информацию, содержащуюся в данном разделе руководства. Однако это не означает, что прочтения данного руководства достаточно для эксплуатации, осмотра, проверки, юстировки, калибровки, устранения неполадок, ремонта или изменения системы. Владелец должен обеспечить выполнение установки, технического обслуживания, устранения неполадок, калибровки и ремонта оборудования только обученным должным образом высококвалифицированным персоналом.

Владелец данной ультразвуковой системы должен обеспечить ее эксплуатацию только обученным должным образом высококвалифицированным персоналом, допущенным до работы с системой. Прежде чем допускать оператора к работе с системой, следует проверить, прочитал ли он и полностью усвоил рабочие инструкции, содержащиеся в данном руководстве. Рекомендуется вести список допущенных операторов.

Если система работает неправильно или не реагирует на команды, описанные в данном руководстве, оператор должен обратиться в ближайший отдел обслуживания компании GE Ultrasound.

За сведениями о конкретных требованиях и нормативах, относящихся к использованию электронного медицинского оборудования, обращайтесь в местные, областные и государственные органы.

Недопустимость самостоятельных модификаций

Никогда не вносите изменения в данное изделие, включая компоненты системы, программное обеспечение, кабели и т. п. Внесение изменений пользователем может создать угрозу безопасности и ухудшению рабочих характеристик системы. Все изменения должны вноситься квалифицированным персоналом компании GE.

Меры предосторожности

Уровни опасности

Описание значков

На данном оборудовании имеются предупреждения об опасности разных уровней, которые распознаются по одному из перечисленных ниже ключевых слов и значков, предвещающих указания по мерам безопасности.



Обозначает, что в неподходящих условиях и при неправильном обращении возникнет следующая опасность:

- Получение персоналом тяжелых травм вплоть до смертельного исхода
- Существенное повреждение оборудования



Обозначает, что в неподходящих условиях и при неправильном обращении может возникнуть следующая опасность:

- Тяжелая травма
- Существенное повреждение оборудования



Обозначает потенциальную опасность, которая может возникнуть при несоблюдении условий эксплуатации и при неправильном обращении:

- Легкая травма
- Повреждение оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: *Указывает на меры предосторожности или рекомендации, которыми следует руководствоваться при работе с ультразвуковой системой, в том числе:*

- *Создание оптимальных условий окружающей среды*
- *Использование настоящего руководства*
- *Предупреждающие или поясняющие символы*

Знаки, предупреждающие об опасности

Описание значков

На потенциальную опасность указывают следующие значки:

Таблица 4-1: Потенциальные опасные ситуации

Значок	Потенциальная опасность	Использовать	Источник
	<p>Биологическая опасность Меры предосторожности, необходимые для предотвращения риска передачи болезни или инфекций.</p> <ul style="list-style-type: none"> Инфицирование пациента/оператора через зараженное оборудование 	<ul style="list-style-type: none"> Инструкции по чистке и уходу Рекомендации по использованию оболочек и перчаток 	ISO 7000 № 0659
	<p>Опасность поражения электрическим током Меры предосторожности, необходимые для предотвращения риска получения травмы в результате поражения электрическим током.</p> <ul style="list-style-type: none"> Микропоражение пациента электрическим током, например вызов фибрилляции желудочков сердца 	<ul style="list-style-type: none"> Датчик ЭКГ, если применимо Разъемы на задней панели 	
	<p>Опасность при перемещении Меры предосторожности, необходимые для предотвращения риска получения травмы во время перемещения или опрокидывания оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> Падение панели управления, принадлежностей или дополнительных устройств для хранения на пациента, оператора или других лиц Столкновения с людьми или предметами при перемещении системы либо ее транспортировке могут привести к травмам. Травмы оператора при перемещениях панели управления 	<ul style="list-style-type: none"> Перемещение Использование тормозов Транспортировка 	
	<p>Опасность, связанная с акустической мощностью</p> <ul style="list-style-type: none"> Получение травм пациентом или повреждение тканей в результате воздействия ультразвукового излучения 	<ul style="list-style-type: none"> Выбор мощности ультразвукового излучения по принципу РЭМ (разумно эффективного минимума) 	

Таблица 4-1: Потенциальные опасные ситуации (продолжение)

Значок	Потенциальная опасность	Использовать	Источник
	<p>Взрывоопасность Меры предосторожности, необходимые для предотвращения риска получения травмы в результате взрыва.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Риск вспышки или взрыва при работе в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков. 	<ul style="list-style-type: none"> • Легко-воспламеняющиеся анестетики 	
	<p>Пожароопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Получение травм пациентом/ оператором либо отрицательные последствия воздействия пламени или дыма. • Получение травм пациентом/ оператором в результате взрыва и возгорания 	<ul style="list-style-type: none"> • Замена предохранителей • Рекомендации по использованию розеток электропитания 	

Важные замечания по технике безопасности

В следующих разделах ("Безопасность пациента" и "Правила безопасной эксплуатации оборудования") для пользователей ультразвукового оборудования приведены сведения о конкретных опасных ситуациях, связанных с эксплуатацией данного оборудования, и возможном травмировании, к которому может привести несоблюдение правил техники безопасности. Дополнительные сведения о мерах безопасности можно найти в других разделах данного руководства.



Неправильное применение оборудования может привести к тяжелой травме. Использование данной системы не по назначению или в условиях, не отвечающих указанным требованиям, а также в противоречии с правилами техники безопасности квалифицируется как ненадлежащая эксплуатация. Перед тем как приступить к использованию устройства, пользователь обязан внимательно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации оборудования и опасными ситуациями, которые могут возникнуть при ультразвуковом исследовании. При необходимости можно воспользоваться услугами компании GE по обучению персонала.

Пренебрежение информацией по технике безопасности рассматривается как неправильная эксплуатация.



Использование данной системы в условиях, не отвечающих ее предназначению, и пренебрежение соответствующими сведениями о технике безопасности квалифицируется как ненормальная эксплуатация. Изготовитель не несет ответственности за поломки в результате ненормальной эксплуатации.

Безопасность пациента

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования



Ниже перечислены основные типы рисков, оказывающие определяющее влияние на безопасность пациента при проведении диагностического ультразвукового исследования.

Идентификатор пациента

Всегда включайте в данные пациента соответствующий идентификатор и проверяйте, правильно ли указано имя пациента и идентификационные номера при вводе таких данных. Убедитесь, что все сохраненные данные и распечатки содержат правильный идентификатор пациента. Ошибки при идентификации могут привести к неверному диагнозу.

Ультразвуковая система не предназначена для длительного хранения данных пациента или изображений. Пользователи несут ответственность за сохранность данных в системе. Настоятельно рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование данных.

Перед любым сервисным обслуживанием жесткого диска рекомендуется создать резервную копию данных системы. Всегда существует возможность потерять данные во время сбоя в работе системы и ремонта. Компания GE не несет ответственности за потерю данных.

Диагностическая информация

Изображения и расчеты, получаемые с помощью данной системы, предназначены для компетентных пользователей в качестве средства диагностики. Их не следует рассматривать как единственное неопровержимое основание для постановки клинического диагноза. Пользователи могут ознакомиться со справочной литературой и прийти к собственному профессиональному заключению относительно клинического использования системы.

Пользователь должен знать технические характеристики изделия, а также точность работы системы и диапазон стабильности. Следует учитывать данные ограничения, прежде чем принимать какое-либо решение, основанное на количественных значениях. В случае сомнений обратитесь за консультацией в ближайший отдел обслуживания компании GE Ultrasound.

Сбои в работе оборудования или его неправильная настройка могут привести к ошибкам в измерениях и невозможности оценки деталей изображения. Оператор обязан самым тщательным образом изучить данное оборудование и правила его эксплуатации, чтобы оптимально использовать все диагностические возможности и распознавать возможные неполадки. Через местное представительство компании General Electric можно организовать обучение персонала работе с прикладными диагностическими программами. Для полного овладения навыками работы с данным оборудованием рекомендуется внедрить программу обеспечения качества.




Система предоставляет результаты расчетов (например расчетный вес плода) и таблицы, созданные по данным научных публикаций. Ответственность за правильность выбора таблицы, а также за клиническую интерпретацию результатов расчетов и данных таблиц лежит исключительно на пользователе. Пользователь должен учитывать противопоказания к применению тех или иных расчетов или таблиц, пользуясь данными научных публикаций. Диагностика, принятие решений о проведении дальнейших исследований и методах лечения должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с общепринятой клинической практикой.



Обязательно обеспечивайте конфиденциальность сведений о пациенте.

Возможности механического повреждения

Использование неисправных датчиков либо неправильное использование внутрисполостных датчиков и неосторожное обращение с ними могут привести к травмам и повышают риск инфицирования. Как можно чаще проверяйте датчики на наличие зазубрин, заусенцев и прочих грубых дефектов, способных нанести травму или нарушить целостность защитных средств. Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по безопасности, прилагаемыми к датчикам специального назначения.

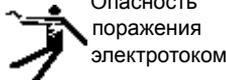

При работе с неисправным датчиком повышается также риск поражения электрическим током, если проводящие растворы вступают в контакт с внутренними деталями, находящимися под напряжением. Как можно чаще проверяйте датчики на наличие трещин и отверстий в кожухе, дефектов в акустической линзе и рядом с ней, а также любых иных повреждений, способствующих попаданию жидкости внутрь датчика. Ознакомьтесь со сведениями об использовании датчиков и мерах предосторожности, описанными в разделе *Датчики и биопсия*.



Ультразвуковые датчики – это чувствительные приборы, которые легко повредить при неосторожном обращении. Соблюдайте особую осторожность, чтобы не уронить датчик, и следите за тем, чтобы датчики не соприкасались с острыми или абразивными поверхностями. Поврежденный корпус, линза или кабель могут стать причиной серьезной травмы пациента, повреждения оборудования или сбоя в его работе.

Сканер и электрохирургические устройства



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокочастотное хирургическое оборудование с системой LOGIQ F.

ALARA



Ультразвук может негативно воздействовать на ткани и потому представляет потенциальную опасность для здоровья пациента. Всегда следует минимизировать время облучения и поддерживать низкие уровни ультразвука, за исключением тех случаев, когда применение большей мощности требуется для постановки более точного диагноза. Руководствуйтесь принципом ALARA (As Low As Reasonably Achievable) - принципом разумно эффективного минимума (РЭМ), увеличивая мощность выходного сигнала только тогда, когда требуется получить высококачественное диагностическое изображение. Постоянно контролируйте уровень выходного акустического сигнала через визуальное отображение на дисплее; подробно изучите функции регуляторов этого сигнала. Подробные сведения приведены в разделе *Биоэффекты* главы *Акустическая мощность* (в полном справочном руководстве).

Обучение

Всем пользователям данной системы перед ее применением в клинических целях рекомендуется пройти подготовку по использованию конкретных приложений. Обратитесь в местное представительство компании GE, чтобы организовать обучение.

Безопасность оборудования и персонала

Ниже перечислены основные типы рисков, оказывающих определяющее влияние на безопасность самого оборудования и персонала при проведении ультразвуковых диагностических исследований.

Не допускается использование оборудования, если имеются проблемы с обеспечением безопасности пациентов и персонала. Перед вводом в эксплуатацию требуется выполнить ремонт и проверить рабочие характеристики оборудования силами квалифицированного обслуживающего персонала.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования



Данное оборудование работает под опасным напряжением, способным привести к тяжелому поражению электрическим током вплоть до летального исхода.

При появлении дефектов изображения или сбоев в работе системы остановите работу оборудования и обезопасьте пациента. Сообщите о сбое квалифицированному специалисту по обслуживанию и известите о неисправности местный сервис-центр компании GE Medical Systems.

Внутри консоли нет никаких деталей и узлов, подлежащих обслуживанию со стороны пользователя. Любые работы по ремонту и техническому обслуживанию системы должны проводиться только квалифицированным и уполномоченным техническим персоналом.

Необходимо избегать любых манипуляций с оборудованием со стороны персонала, не имеющего соответствующих полномочий.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Опасность
поражения
электротоком

Чтобы избежать травмы:

- Не снимайте защитные кожухи. Внутри устройства нет компонентов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Обратитесь за помощью к квалифицированному техническому персоналу.
- Для обеспечения безопасного заземления включайте вилку электропитания только в надежно заземленную розетку (класса "для больниц") с проводом выравнивания потенциала \downarrow .
- Запрещается использовать для вилки кабеля питания переходники с 3 контактов на 2 контакта. В этом случае произойдет ослабление заземляющего соединения.
- Не размещайте емкости с жидкостью на панели управления или над ней. Пролитая жидкость может вступить в контакт с деталями, находящимися под напряжением, что повышает риск поражения электрическим током.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Опасность
получения
ожогов

Сетевое питание системы должно соответствовать указанным номинальным параметрам переменного тока. Нагрузочная способность цепи питания должна соответствовать указанной.



ОСТОРОЖНО!

Разрешается использовать только аттестованные и рекомендуемые периферийные устройства и принадлежности.

Все периферийные устройства и принадлежности следует надежно закрепить в системе LOGIQ F.



ОСТОРОЖНО!

Использование LOGIQ F в качестве накопителя данных не предусмотрено. Ответственность за резервное копирование базы данных пациентов и изображений возлагается на медицинское учреждение. Компания GE HE несет ответственности за утрату изображений, а также информации о пациентах.



Опасность
взрыва

Риск вспышки или взрыва при работе в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Опасность
взрыва

Никогда не эксплуатируйте данное оборудование в присутствии горючих или взрывчатых жидкостей, испарений и газов. Неисправности системы или искры, возникающие при работе электродвигателей вентиляторов, могут привести к возгоранию этих веществ по причинам электрического характера. В целях предотвращения таких опасностей взрыва операторы должны знать следующее.

- При обнаружении горючих веществ в окружающей среде не подсоединяйте к розетке и не включайте систему.
- Если горючие вещества обнаружены после включения системы, не пытайтесь выключить ее или отсоединить от розетки.
- При обнаружении горючих веществ освободите помещение от людей и проветрите его, прежде чем выключать устройство.



ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование оборудования, если имеются проблемы с обеспечением безопасности пациентов и персонала. Перед вводом в эксплуатацию требуется выполнить ремонт и проверить рабочие характеристики оборудования силами квалифицированного обслуживающего персонала.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Опасность заражения

Для обеспечения безопасности пациентов и персонала при проведении инвазивных процедур остерегайтесь биологических рисков. Чтобы свести к минимуму риск передачи инфекции:

- Используйте защитные средства (перчатки и чехлы для датчиков) во всех возможных случаях. По мере необходимости проводите диагностические исследования в режиме полной стерильности.
- После каждого исследования пациента тщательно очищайте датчики и принадлежности многократного применения. Дезинфицируйте и стерилизуйте их по мере необходимости. Подробнее об использовании датчиков и уходе за ними см. в главе *Датчики и биопсия*.
- Соблюдайте принятые в вашем учреждении правила профилактики инфекций применительно к оборудованию и персоналу.



ВНИМАНИЕ!

Контакт с латексом из натурального каучука может привести к тяжелым аллергическим реакциям у людей, чувствительных к протеину, содержащемуся в каучуковом латексе. Пациенты и персонал, чувствительные к таким веществам, не должны касаться предметов, изготовленных из латекса указанного типа. Обратите внимание на маркировку упаковки для определения компонентов, входящих в латекс. Кроме того, см. инструкцию FDA относительно изделий из латекса от 29 марта 1991 года.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Во избежание травмы или повреждения системы НИКОГДА не помещайте предметы или сосуды с жидкостью на панель управления.



Управление архивированными данными выполняется на местах. Рекомендуется создавать резервную копию данных (в любом устройстве).



- Обязательно проверьте носитель после записи данных в ходе процедур EZBackup (Резервное копирование), SaveAs (Сохранить как) или экспорта.
- Перед удалением данных пациента или изображения с экрана пациента убедитесь, что данные сохранены с помощью функции резервного копирования или экспорта и перенос данных на носитель выполнен успешно.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



Запрещается вскрывать систему LOGIQ F. Это разрешается делать только квалифицированному техническому персоналу.



Во избежание ожогов кожи в ходе хирургического вмешательства не следует размещать электроды ЭКГ между активными и пассивными электродами электрохирургического устройства. Не допускайте контакта кабелей электрохирургического устройства с отведениями ЭКГ.



НЕ прикасайтесь одновременно к пациенту и разъемам ультразвукового аппарата, включая разъемы ультразвукового датчика.

При подключении к устройству другого оборудования НЕ прикасайтесь к электропроводящим частям кабелей USB, Ethernet, а также кабелей, предназначенных для передачи видео- или аудиосигналов.

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (продолжение)



В целях сведения к минимуму риска случайной потери данных регулярно выполняйте резервное копирование EZBackup, а также обычное резервное копирование.

1. Сначала выполните резервное копирование EZBackup, чтобы сохранить изображения.
2. Затем выполните резервное копирование через меню Utility (Утилиты) --> Backup/Restore (Резервное копирование/Восстановление). В области "Backup" (Резервное копирование) активируйте следующие опции:
 - Архив пациентов
 - Архив отчета
 - "User defined configuration" (Пользовательская конфигурация)
 - Элемент "Service" (Сервис)



НЕ загружайте постороннее программное обеспечение на компьютер системы.

Сведения о безопасности материалов

Детали, изготовленные из резины

Материал: GFE 15&17

Область применения: держатель для датчика/резиновый кожух рычага упора/резиновая пробка

Опасности, связанные с эксплуатацией ультразвукового оборудования (ЖК-монитор)



- **НЕ** помещайте пальцы, руки или какие-либо предметы на соединение монитора или его кронштейн во избежание травмы при перемещении монитора или его кронштейна.
- Во избежание травмы или повреждения системы **НИКОГДА** не ставьте никаких предметов или емкостей с жидкостью на монитор независимо от его положения - поднятого или опущенного/транспортного.
- **НЕ** царапайте и не давите на панель какими-либо острыми предметами, например карандашами или ручками, поскольку это может привести к повреждению панели.
- Во избежание травмы или повреждения оборудования заранее убедитесь, что в зоне смещения монитора или кронштейна нет посторонних предметов. Не допускается наличие предметов и людей.
- Обращайте внимание на положение кронштейна монитора во избежание столкновения с предметом или человеком.
- Перед перемещением системы в новое местоположение следует закрепить ЖК-панель/ кронштейн ЖК-панели в транспортном положении.
- На ЖК-экране могут иметься дефектные пиксели. Такие пиксели имеют вид светлых или темных точек на экране. Их присутствие является характеристикой самой ЖК-панели, а не продукта.
- Подсветка ЖК-панели имеет ограниченный срок службы. Если экран темнеет или мерцает, обратитесь к квалифицированному представителю Отдела технического обслуживания.

ЭМС (электромагнитная совместимость)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование генерирует, использует и может излучать РЧ-энергию. Оборудование может являться источником высокочастотных помех для работы другого медицинского и немедицинского оборудования, а также систем радиосвязи. С целью обеспечения адекватных мер защиты против указанных помех данное оборудование изготовлено в соответствии с требованиями к предельным уровням излучения для медицинского оборудования группы 1 класса А, как указано в стандарте EN 60601-1-2. Однако нет никаких гарантий, что при выполнении конкретного монтажа помехи не возникнут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если будет обнаружено, что установленное оборудование является источником помех (что можно определить путем его включения и выключения), пользователь или квалифицированный медицинский персонал должны попытаться устранить проблемы, выполнив одно или несколько из приведенных ниже действий:

- Измените ориентацию или местонахождение прибора (приборов), чувствительного к помехам.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и прибором, чувствительным к помехам.
- Подайте питание на оборудование от источника, который не связан с источником питания прибора, чувствительного к помехам.
- Обратитесь за рекомендациями в торговое или сервисное представительство.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель не несет ответственности за любые помехи, обусловленные применением соединительных кабелей, отличных от рекомендуемых, или возникшие в результате внесения в указанное оборудование несанкционированных изменений. Несанкционированные изменения могут привести к лишению конкретного пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях соблюдения требований к электромагнитным устройствам сопряжения для медицинского оборудования класса А, FCC, все соединительные кабели периферийных устройств должны быть экранированы и заземлены в установленном порядке. Применение неправильно экранированных и заземленных кабелей может привести к созданию высокочастотных помех в нарушение требований Федеральной комиссии по связи США (FCC).

ЭМС (электромагнитная совместимость) (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте вблизи устройства приборы, передающие РЧ-сигналы (сотовые телефоны, радиоприемники или изделия с радиоуправлением), отличные от поставляемых компанией GE (например, беспроводного микрофона или кабелей питания с большой пропускной способностью), так как это может повлиять на исходные технические характеристики устройства. Если перечисленные устройства находятся вблизи оборудования, их следует выключить.

Медицинский персонал, ответственный за эксплуатацию данного оборудования, должен проинструктировать техников, пациентов и других людей, которые могут находиться поблизости от работающего оборудования, о необходимости неукоснительного соблюдения указанных выше требований и правил.

Характеристики ЭМС

Для всех типов электронного оборудования характерно создание электромагнитных помех при одновременной работе с другим оборудованием, причем эти помехи могут передаваться как в пространстве, так и по соединительным кабелям. Термин ЭМС (электромагнитная совместимость) означает нечувствительность оборудования к посторонним помехам и несущественное влияние на работу другого оборудования за счет собственных помех.

Для обеспечения максимально возможной ЭМС данной системы необходима ее правильная установка и наладка в полном соответствии с руководством по техническому обслуживанию.

Установка оборудования должна производиться в соответствии с рекомендациями, приведенными в следующем разделе: Более подробную информацию см.: 'Замечания по установке изделия' на стр. 4-23..

При возникновении проблем, связанных с ЭМС, обращайтесь к обслуживающему техническому персоналу.

Производитель не несет ответственности за любые помехи, обусловленные применением соединительных кабелей, отличных от рекомендуемых, или возникшие в результате внесения в указанное оборудование несанкционированных изменений. Несанкционированные изменения могут привести к лишению конкретного пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Характеристики ЭМС (продолжение)

Переносное оборудование для мобильной радиосвязи (например, приемо-передающая радиоустановка, сотовые/ беспроводные телефоны, беспроводные компьютерные сети), отличное от поставляемого компанией GE, должно использоваться на определенном расстоянии от системы и кабелей. Расстояние можно вычислить следующим образом:

Таблица 4-2: Требуемое расстояние для переносных и мобильных систем радиосвязи

Частотный диапазон:	150 кГц – 80 МГц	80–800 МГц	800 МГц – 2,5 ГГц	
Метод расчета:	$d = [3,5/V_1]$ квадратный корень из P	$d = [3,5/V_1]$ квадратный корень из P	$d = [7/E_1]$ квадратный корень из P	
где d = расстояние между устройствами радиосвязи и системой в метрах, P = номинальная мощность передатчика, V_1 = разрешенный уровень радиочастотного излучения в проводах, E_1 = разрешенный уровень эфирного РЧ-излучения.				
Если установлена максимальная номинальная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в метрах должно составлять			
	5	2,6	2,6	5,2
	20	5,2	5,2	10,5
	100	12,0	12,0	24,0

Замечания по установке изделия

Расстояние от системы и влияние стационарного оборудования радиосвязи: напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых и беспроводных) и наземные мобильные радиостанции, любительские радиостанции, вещательные радиостанции диапазонов AM и FM, вещательные ТВ-передатчики, точно спрогнозировать невозможно. Для оценки характеристик электромагнитной среды вследствие воздействия стационарных РЧ-передатчиков требуется исследовать электромагнитную обстановку. Если измеренная напряженность поля в месте, где используется ультразвуковая система, превышает установленный разрешенный уровень, указанный в заявлении о соответствии требованиям электромагнитной совместимости, ультразвуковую систему следует проверить на предмет работоспособности. Если наблюдаются аномалии в работе системы, могут потребоваться дополнительные меры, такие как изменение положения или места установки ультразвуковой системы, либо ее перемещение в кабинет, изолированный от РЧ-излучения.

1. Используйте только поставляемые или рекомендуемые компанией GE шнуры питания. Изделия, укомплектованные вилкой шнура питания, должны подсоединяться только к фиксированной розетке, имеющей провод защитного заземления. При подключении вилки шнура питания к розетке не применяйте никаких адаптеров или переходников (например, с трех контактов на два контакта).
2. Установите данное оборудование как можно дальше от другого электронного оборудования.
3. Убедитесь в том, что используются только кабели, поставляемые либо рекомендуемые компанией GE. Соединяйте эти кабели в полном соответствии с рекомендациями по установке (т.е. кабели питания раздельно от сигнальных кабелей).
4. Расположите основное оборудования и другие периферийные устройство согласно процедурам установки, описанными в инструкции по эксплуатации устройства и периферийных устройств.

Общие указания

1. Назначение периферийных устройств, подключаемых к данному оборудованию.
Оборудование, указанное в разделе о расходных материалах/дополнительных принадлежностях, может быть подключено к изделию без ущерба для его характеристик ЭМС.
Не применяйте оборудование, не указанное в данном перечне. Несоблюдение настоящих рекомендаций может привести к ухудшению характеристик ЭМС данного изделия.
2. Недопустимость самостоятельных модификаций.
Пользователь не должен допускать никаких самостоятельных модификаций данного изделия. Такие модификации могут привести к ухудшению параметров ЭМС.
Под модификациями изделия подразумеваются замены и изменения:
 - a. кабелей (длина, материал, монтажная разводка и т.д.)
 - b. установки/размещения системы
 - c. конфигурации/компоновки системы
 - d. защитных деталей системы (открытие/закрытие кожухов, снятие крепежных винтов с кожухов)
3. При работе системы все кожухи должны быть закрыты. Если по каким-либо причинам крышка открыта, обязательно закройте ее перед началом или возобновлением рабочих операций.
4. При работе системы с открытыми кожухами могут ухудшиться характеристики ЭМС.

Обновление периферийного оборудования для стран ЕС

Для пользователей в странах ЕС ниже приведена обновленная информация о соединениях системы LOGIQ F с устройствами регистрации изображений и другими устройствами или коммуникационным сетями.

Периферийные устройства, используемые в окружении пациента

LOGIQ F было протестировано на общую безопасность, совместимость и соответствие требованиям по эксплуатации устройств записи изображения, перечисленным в разделе "Расходные материалы/ Принадлежности".

Система LOGIQ F проверена также на совместимость и возможность подсоединения к локальной сети (ЛВС) через разъем Ethernet, размещенный на задней панели системы, при условии, что компоненты локальной сети соответствуют требованиям стандарта IEC/EN 60950.

Систему LOGIQ F можно также безопасно использовать, подсоединив ее к устройствам, отличным от рекомендованных выше, при условии, что эти устройства и их технические характеристики, а также способы установки и соединения с системой соответствуют требованиям стандарта IEC/EN 60601-1.

Периферийные устройства, используемые в окружении пациента (продолжение)

Дополнительное оборудование, подключенное к аналоговому и цифровому интерфейсам, должно быть сертифицировано согласно соответствующим стандартам IEC (например, IEC60950 для оборудования обработки данных и IEC60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того, все полные конфигурации оборудования должны соответствовать действующей версии системного стандарта IEC60601-1. Любое лицо, подключающее дополнительное оборудование к входным или выходным разъемам системы LOGIQ F, вносит изменения в конфигурацию медицинского оборудования и поэтому несет ответственность за соответствие системы требованиям действующей версии стандарта IEC60601-1. В случае возникновения сомнений обратитесь в отдел технической поддержки или к региональному представителю компании GE.

Общие меры предосторожности при установке сменного встроеного устройства:

1. Добавляемые устройства должны соответствовать требуемому стандарту безопасности и иметь маркировку CE.
2. Номинал входного сетевого напряжения устройств, добавляемых в систему LOGIQ F и используемых одновременно с ней, должен быть не больше номинального напряжения питания системы LOGIQ F.
3. Во избежание перегрева устройства должны быть приняты меры для обеспечения надлежащего отвода тепла и вентиляции.
4. Необходимо обеспечить соответствующее механическое крепление устройства и устойчивость всей конструкции.
5. Ток утечки и связанная с этим степень опасности должны соответствовать требованиям стандарта IEC/EN60601-1.
6. Электромагнитные излучения и помехозащищенность оборудования должны соответствовать требованиям стандарта IEC/EN60601-1-2.

**Периферийные устройства, используемые в окружении пациента
(продолжение)**

Общие меры предосторожности при установке сменного встроенного устройства:

1. Добавляемые устройства должны соответствовать требуемому стандарту безопасности и иметь маркировку CE.
2. Добавляемые устройства должны использоваться по их непосредственному назначению и иметь интерфейс, совместимый с системой.
3. Для обеспечения соответствия требованиям стандарта IEC/EN60601-1 может потребоваться наличие устройств развязки сигнальных или силовых цепей и дополнительное защитное заземление.



Подсоединение системы к оборудованию или передающим сетям, отличным от указанных в руководстве по эксплуатации, может привести к поражению персонала электрическим током или сбоям в работе оборудования. При замене или установке оборудования и выполнении соединений специалист, выполняющий монтаж, обязан проверять оборудование на совместимость с системой и на соответствие требованиям стандарта IEC/EN 60601-1. Владелец оборудования несет полную ответственность за модификации оборудования и связанные с ними сбои в работе и электромагнитные помехи.

Заявление о соответствии требованиям к электромагнитному излучению

Эта система пригодна для применения в указанных ниже условиях. Пользователь обязан обеспечить применение системы только в указанной электромагнитной обстановке.

Таблица 4-3: Заявление о соответствии требованиям к электромагнитному излучению

Указания и инструкции производителя - электромагнитные излучения		
Система предназначена для применения в электромагнитной среде, описанной ниже. Пользователь должен убедиться, что система применяется в указанной среде.		
Тип излучения	Соответствие	Электромагнитная среда
РЧ-излучение CISPR 11	Группа 1	РЧ-энергия используется только внутри системы. Поэтому уровни ВЧ-излучения невелики, и вероятность того, что это излучение станет причиной возникновения помех в находящемся вблизи электронном оборудовании, крайне мала.
РЧ-излучение CISPR 11	Класс А	Систему можно использовать в любых условиях, кроме домашних. Ее запрещается использовать в жилых зданиях, где сети питания напрямую подключены к общей электросети источника питания низкого напряжения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная система предназначена для использования только медицинским персоналом. Система может быть источником помех или нарушить работу оборудования, находящегося вблизи. Возможно, потребуется принять меры по ослаблению воздействия, например, изменить ориентацию, место установки или экранирование расположения.
Гармонические излучения IEC 61000-3-2	Класс А	
Колебания/ выбросы напряжения IEC 61000-3-3	Соответствует	

Заявление о помехозащищенности

Эта система пригодна для применения в указанных ниже условиях. Пользователь обязан обеспечить применение системы в соответствии с указаниями и только в указанной электромагнитной среде.

Таблица 4-4: Заявление о помехозащищенности

Тип помехозащищенности	Характеристики оборудования	Допустимый уровень	Условия и указания по электромагнитной совместимости
IEC 61000-4-2 Электростатический разряд (ЭСР)	±6 кВ при контакте ±8 кВ в воздухе	±6 кВ при контакте ±8 кВ в воздухе	<p>Полы должны быть деревянными, бетонными или из керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, в помещении следует поддерживать относительную влажность, по крайней мере, 30%.</p> <p>Качество напряжения должно соответствовать качеству напряжения в сетях электропитания коммерческих зданий и (или) медицинских учреждений. Если пользователю требуется обеспечить бесперебойную работу оборудования при сбоях электропитания, рекомендуется подключить систему к источнику бесперебойного питания или к аккумуляторной батарее.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: обычные условия эксплуатации предполагают наличие сетевого напряжения на источнике питания перед подачей напряжения контрольного уровня. Магнитные поля с частотой сети электропитания должны иметь уровни, типичные для коммерческих зданий и медицинских учреждений. Расстояние от системы до радиооборудования должно определяться описанным ниже способом. Если оборудование помечено следующим символом, то вблизи него могут возникать помехи:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Возможно ухудшение качества изображения или появление помех вследствие наведенного радиочастотного шума в шнурах питания оборудования или других сигнальных кабелях. Такие помехи легко распознаются и отличаются от изображения анатомических структур пациента или кривых физиологических параметров. Помехи такого типа могут увеличить время проведения обследования, однако они не влияют на диагностическую точность. При частом возникновении таких помех может потребоваться дополнительная изоляция шнура питания и сигнальной проводки.</p>
IEC 61000-4-4 Быстрые переходные процессы и выбросы напряжения	±2 кВ для сети электропитания ±1 кВ для входа/выхода системы	±2 кВ для сети электропитания ±1 кВ для входа/выхода системы	
IEC 61000-4-5: Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения	±1 кВ дифф. ±2 кВ общ.	±1 кВ дифф. ±2 кВ общ.	
IEC 61000-4-11 Понижение напряжения, кратковременные сбои по напряжению и изменения напряжения в сети	< 5% U_T (> 95% понижение U_T) за 0,5 цикла; 40% U_T (60% понижение U_T) за 5 циклов; 70% U_T (30% понижение U_T) за 25 циклов; < 5% U_T (> 95% понижение U_T) за 5 сек;	< 5% U_T (> 95% понижение U_T) за 0,5 цикла; 40% U_T (60% понижение U_T) за 5 циклов; 70% U_T (30% понижение U_T) за 25 циклов; < 5% U_T (> 95% понижение U_T) за 5 сек;	
IEC 61000-4-8 Напряженность магнитного поля с частотой сети электропитания (50/60 Гц)	3 А/м	3 А/м	
IEC 61000-4-6 Наведенные РЧ-помехи	3 В _{эффективное} 150 кГц – 80 МГц	3 В _{эффективное} 150 кГц – 80 МГц	
IEC 61000-4-3 РЧ-излучение	3 В/м 80 МГц – 2,5 ГГц	3 В/м 80 МГц – 2,5 ГГц	
<p>ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные указания применимы не ко всем ситуациям. На распространение электромагнитного излучения оказывают влияние поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей, находящихся вблизи системы. Если излучение других электронных приборов совпадает со средней частотой датчика, на изображении могут появиться шумы. Необходимо обеспечить правильную изоляцию силовой линии.</p>			

Устройства, используемые вблизи пациента



Рис. 4-1. Устройства, используемые вблизи пациента LOGIQ F

1. Слева: 3 USB-порта
 - Один порт для черно-белого принтера
 - Два другие порта назначаются пользователем: периферийные устройства, принтер Officejet, карта памяти, педальный переключатель, USB-жесткий диск, устройство для проведения ЭКГ
2. Встроенное печатное устройство
3. Справа: порт датчика
4. Задняя панель:
 - 1 выделенный USB-порт — только для принтера, подключаемого к сети переменного тока
 - 2 USB-порта - периферийные устройства, принтер Officejet, карта памяти, педальный переключатель, USB-жесткий диск, устройство для проведения ЭКГ
 - 1 порт VGA
 - 1 порт S-Video
 - 1 комбинированный порт
 - 1 порт Audio out
 - 1 порт DICOM
5. Передняя панель: держатель для датчика

Разрешенные для эксплуатации устройства

Устройства, показанные на предыдущей странице, предназначены для использования в СРЕДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ПАЦИЕНТА.



НЕ допускается подключать датчики и принадлежности в окружении пациента без разрешения компании GE.

Более подробную информацию см.: 'Расходные материалы/Принадлежности' на *стр. 3-43*.

Нерекомендованные устройства



НЕ используйте нерекомендованные устройства.

Если такие устройства были подсоединены к системе без ведома и согласия компании GE, гарантия становится НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Всякое устройство, подключаемое к системе LOGIQ F, должно удовлетворять требования МЭК или равнозначных стандартов, соответствующих этим устройствам.

Дополнительные принадлежности, компоненты по отдельному заказу, поставляемые компоненты



Использование нерекомендованных устройств может привести к сбоям в работе оборудования и нарушению безопасности. Используйте только принадлежности, опции и поставляемые компоненты, разрешенные или рекомендованные в настоящих инструкциях.

Мощность акустического выходного сигнала



Если устройство испускает акустические сигналы, в то время как датчик не используется (или находится в держателе), оно может нагреться. Всегда снижайте акустическую мощность или переводите систему в режим стоп-кадра, когда она не используется.

На экране выходных акустических сигналов, размещенном в верхней правой области экрана системного монитора, в реальном масштабе времени для оператора отображаются акустические сигналы, формируемые в системе. Подробные сведения приведены в главе *Акустическая мощность в полном справочном руководстве*. Экран соответствует стандарту NEMA/AIUM по отображению в реальном времени выходных тепловых и механических индексов выходной акустической мощности ультразвукового диагностического оборудования.

Технические характеристики выходных акустических сигналов

Экран состоит из трех частей: области отображения теплового индекса (TI), области отображения механического индекса (MI) и области отображения относительной величины выходного акустического сигнала (АО). Несмотря на то, что величина АО не определена в стандарте NEMA/AIUM, с ее помощью можно определить, когда система работает в приемлемом диапазоне уровней выходного сигнала.

Индексы TI и MI отображаются постоянно. Значения индексов TI и MI начинаются с 0 и изменяются с шагом 0,2.

Всегда контролируйте уровень выходной акустической мощности, который отображается на экране "Acoustic Output" (Выходная акустическая мощность). Необходимо досконально изучить интерфейс данного экрана, а также элементы управления выходной мощностью.

Тепловой индекс (TI)

В зависимости от типа исследования и типа исследуемой ткани используется параметр TI одного из трех типов.

Тепловой индекс (ТИ) (продолжение)

- **Тепловой индекс мягких тканей (TIS)**. Используется при отображении только мягких тканей; определяет возможность генерации тепла в мягких тканях.
- **Тепловой индекс костной ткани (TIB)**. Используется при нахождении костной ткани около фокуса изображения, как, например, при акушерском обследовании в третьем триместре беременности; определяет возможность генерации тепла в фокусе луча при фокусировке на или вблизи костной ткани, находящейся рядом с очень чувствительной тканью.
- **Тепловой индекс черепной ткани (TIC)**. Используется для определения возможности генерации тепла в ближней зоне, когда луч проходит через костную ткань, расположенную близко к кожному покрову, при исследованиях черепа.

Технические характеристики выходных акустических сигналов (продолжение)

Механический индекс

Индекс MI указывает на наличие нетепловых процессов, в частности кавитации, и позволяет определить вероятность их возникновения в тканях.

Изменение типа теплового индекса

Чтобы изменить отображаемый индекс TI, выберите "Utility" (Утилиты) -> "Imaging" (Визуализация) -> "B-Mode" (B-режим). Для каждого приложения можно указывать разные настройки индекса TI.

Точность отображения значений TI и MI

При значении индекса $MI \geq 0,6$, $TI \geq 3,6$ отображаемое значение MI и TI будет не ниже 50% и не выше 150% измеренного значения.

При значении индекса $MI < 0,6$, $TI < 3,6$ абсолютная погрешность $MI \leq 0,3$, $TI \leq 1,8$.

Элементы управления, влияющие на выходную акустическую мощность

Напряжение для создания механических (MI) или тепловых биологических (TI) воздействий можно регулировать с помощью определенных элементов управления.

Элементы прямого управления. Регулятор акустической мощности напрямую регулирует интенсивность ультразвукового излучения.

Элементы косвенного управления. Косвенное влияние на мощность излучения может оказывать настройка элементов управления. Элементы управления, использование которых может повлиять на индексы MI и TI, указаны в разделе "Оптимизация изображения" (см. биоэффекты для каждого элемента управления).

Для отслеживания возможных эффектов постоянно наблюдайте за отображением излучаемого ультразвукового сигнала на дисплее.

Практические рекомендации по оптимальному сканированию



Полезные
советы

Повышайте интенсивность акустического сигнала только после предшествующих попыток оптимизации изображения с помощью других элементов управления, не меняющих мощности сигнала, например "Gain" (Усиление) и "TGC" (Компенсация усиления).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробное описание каждого элемента управления приводится в разделе "Оптимизация изображения".



ОСТОРОЖНО!

Прежде чем пытаться напрямую настроить регулятор акустической мощности или увеличить мощность сигнала посредством косвенного управления, прочитайте и усвойте пояснения функционального назначения всех элементов управления режимами сканирования.



Опасность
получения
травм при УЗИ

Для получения более качественного изображения или измерения при диагностическом исследовании используйте минимальную мощность излучения, дающую эффективный результат. Начинайте исследование с датчиком, обеспечивающим оптимальную глубину фокуса и проникновение сигнала через ткани.

Уровни выходной акустической мощности по умолчанию

Во избежание высокой выходной мощности сигнала в самом начале исследования система LOGIQ F начинает сканирование при ограниченной интенсивности излучения, которая установлена в заводских настройках по умолчанию. Эта установка предварительно запрограммирована и зависит от категории исследования и выбранного датчика. Установка активизируется при включении питания системы или при выборе пункта **Patient** (Пациент) в программном меню.

Для изменения акустического выходного сигнала необходимо настроить уровень выходной мощности.

Общие предупреждения



Стандартное техническое обслуживание должно производиться уполномоченным обслуживающим персоналом в течение срока службы изделия (7 лет).



Будьте осторожны при прохождении через пороги дверей и лифтов. Для перемещения системы используйте ручки системы, но ни в коем случае не ЖК-дисплей. Несоблюдение этих требований может привести к тяжелой травме или поломке системы.



Максимально возможная нагрузка на лоток принтера (1), лоток для хранения бумаги (2) и лоток хранения кабелей (3) составляет 1,5 кг. См. соответствующее изображение.



Рис. 4-2. Максимальная нагрузка

Содержание опасных веществ в системе LOGIQ F согласно директиве RoHS

Приводится нижеследующая информация касательно возможного загрязнения продуктом окружающей среды согласно директиве SJ/T11364-2006: Маркировка контроля загрязнения окружающей среды электронным ИТ-оборудованием.



Этот символ означает, что изделие содержит опасные материалы в количестве, превышающем пределы, установленные требованиями китайского стандарта SJ/T11363-2006 в отношении предельной концентрации некоторых опасных веществ в электронном ИТ-оборудовании. Число на символе указывает на период экологически безопасного использования, то есть период, в течение которого токсические или опасные вещества или элементы, содержащиеся в ИТ-оборудовании, не попадут во внешнюю среду и не изменятся при нормальных условиях эксплуатации, так что использование такого ИТ-оборудования не приведет к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, вреду для здоровья или ущербу имуществу. Период измеряется в годах.

Для поддержания заявленного периода экологически безопасного использования необходимо обеспечить нормальную эксплуатацию изделия согласно инструкциям и требованиям к окружающим условиям, приведенным в руководстве по эксплуатации изделия, и строго соблюдать графики периодического технического обслуживания, указанные в описании процедур технического обслуживания изделия.

Расходные материалы или определенные компоненты могут иметь собственные этикетки со значением EFUP, которое меньше значения, указанного для всего изделия. Для поддержания заявленного периода экологически безопасного использования следует периодически производить замену этих расходных материалов или деталей согласно процедурам технического обслуживания изделия. После вывода из эксплуатации настоящее изделие должно храниться отдельно от бытовых отходов и утилизироваться надлежащим образом.

Название и концентрация опасных веществ

Таблица 4-5: Таблица названий и концентрации опасных веществ, содержащихся в LOGIQ F

Название компонента	Название опасного вещества					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
ЖК-панель	X	X	O	O	O	O
Детали печатной платы	X	O	O	O	O	O
Детали клавиатуры	X	O	O	O	O	O
Детали блока питания	X	O	O	O	O	O
Корпус консоли	O	O	O	O	O	O
Ультразвуковые датчики	X	O	O	O	O	O
Колеса	O	O	O	O	O	O

O: Содержание токсичного или опасного вещества во всех однородных материалах этой детали ниже предельного значения, установленного стандартом SJ/T11363-2006.
X: содержание токсичного или опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов, используемых в этой детали, выше предельного значения, установленного стандартом SJ/T11363-2006.

- В таблице приведена самая полная и свежая информация на момент публикации.
- Применение опасных веществ в данном медицинском устройстве необходимо для обеспечения его использования по клиническому назначению и (или) для улучшения защиты людей и (или) окружающей среды ввиду отсутствия других приемлемых (с экономической или технической точки зрения) веществ. Например: 1) свинец может использоваться в припое печатной платы; 2) ртуть может использоваться в ЖК-панели.

Наклейки на устройстве

Описание наклеек и значков

В приведенной ниже таблице описано назначение и расположение условных обозначений и надписей по технике безопасности, а также других важных сведений, указанных на самом оборудовании.

Таблица 4-6: Наклейки

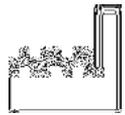
Наклейка/значок	Назначение/значение	Локализация
<p>Табличка идентификации устройства и параметров сетевого питания.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Наименование и адрес производителя • Дата изготовления • Номер модели и серийный номер изделия • Параметры переменного тока (вольты, амперы, фаза и частота) 	
<p>Табличка идентификации устройства и параметров сетевого питания.</p> 	<p>Дата выпуска: в качестве даты может использоваться год, год и месяц или год, месяц и день. Форматы даты в соответствии со стандартом ISO 8601.</p>	Табличка с техническими данными
	Серийный номер	Табличка с техническими данными
	Номер по каталогу	Табличка с техническими данными
Наклейка типа/класса	Обозначает степень безопасности или уровень защиты.	
<p>IP-код (IPX8) IPX8: FSU-1000, MKF 2-MED GP26</p>	Обозначает степень защиты в соответствии со стандартом IEC60 529.	Нижняя поверхность педального переключателя
	Символ контактного элемента типа BF (фигура человека в рамке), соответствующий стандарту IEC60878-02-03.	Около разъема датчика

Таблица 4-6: Наклейки (продолжение)

Наклейка/значок	Назначение/значение	Локализация
	Общее предостережение	Разное
	"Предупреждение - опасное напряжение": указывает на опасность поражения электрическим током.	Разное
	Обозначает положение "Вкл." и "Выкл." выключателя питания. ВНИМАНИЕ: этот выключатель НЕ ОТКЛЮЧАЕТ СИСТЕМУ от сети электропитания.	Информация о расположении содержится в разделе "Обзор консоли".
	Этот символ обозначает клемму "Защитное заземление".	Внутри блока питания и на пульте управления
	Этот символ означает, что отходы данного электрического и электронного оборудования следует собирать отдельно от неотсортированных бытовых отходов и утилизировать соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации.	Задняя панель и разъем датчика

Таблица 4-6: Наклейки (продолжение)

Наклейка/значок	Назначение/значение	Локализация
	<p>Обозначает, что концентрация опасных веществ превышает предельно допустимый уровень. В соответствии с требованиями стандарта электронной промышленности Китайской Народной Республики SJ/T11364-2006 предельно допустимый уровень концентрации опасных веществ для электронного оборудования распространяется на следующие опасные вещества: свинец, ртуть, шестивалентный хром, кадмий, полибромбифенил (PBB) и полибромдифенил эфир (PBDE). Цифра, заключенная в круг, обозначает, что в течение указанного числа лет гарантируется отсутствие мутации или утечки опасных веществ. Как следствие этого, использование данного оборудования не приведет к серьезному загрязнению окружающей среды, травмам или порче имущества.</p>	<p>Датчик и задняя панель, табличка идентификации устройства и параметров сетевого питания (для Китая).</p>
	<p>Символ контактного элемента типа CF, обеспечивающего защиту от разрядов дефибриллятора (сердце в рамке с лопастями), соответствующий стандарту IEC 60878-02-06.</p>	<p>Модуль ЭКГ</p>
	<p>Не помещайте никакие предметы на монитор.</p>	<p>Задняя панель ЖК-монитора</p>
	<p>Не прикасайтесь к поверхности экрана ЖК-монитора руками.</p>	<p>Задняя панель ЖК-монитора</p>

Таблица 4-6: Наклейки (продолжение)

Наклейка/значок	Назначение/значение	Локализация
	На поверхности ЖК-монитора имеется острый выступ. Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить руки или пальцы при складывании ЖК-монитора.	Задняя панель ЖК-монитора
	Для горизонтального перемещения используйте только задние ручки.	Задняя панель ЖК-монитора
	Наклейка "Обратитесь к сопроводительной документации" предупреждает пользователя о необходимости обратиться к руководству по эксплуатации или другим документам в случаях, когда на наклейке невозможно поместить всю необходимую информацию.	Разное
	НЕ помещайте пальцы, руки или какие-либо предметы на соединение монитора или его манипулятор во избежание травмы при перемещении монитора или его кронштейна.	Перемещаемый кронштейн
	НЕ помещайте пальцы, руки или какие-либо предметы в место фиксации манипулятора монитора во избежание травмы при креплении манипулятора.	Перемещаемый кронштейн
	Крепление кронштейна • Потяните и немного поверните зажим, чтобы разблокировать кронштейн • Немного поверните зажим и отпустите его, чтобы закрепить манипулятор.	Крышка клавиатуры
	Предупреждение: берегите пальцы	Верхняя часть сенсорной панели

Таблица 4-6: Наклейки (продолжение)

Наклейка/значок	Назначение/значение	Локализация
	<p>Максимально возможная нагрузка составляет 1,5 кг.</p>	<p>Разное</p>
	<p>Не толкайте систему.</p>	<p>Задняя панель ЖК-монитора</p>
	<p>Знак ГОСТ — обозначает соответствие государственным стандартам Российской Федерации.</p>	<p>Табличка с техническими данными Примечание: данная маркировка помещается на консоли таблички с техническими данными только после завершения регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
	<p>Сертификация INMETRO: TUV Rheinland Brazil</p>	<p>Табличка с техническими данными Примечание: данная маркировка помещается на консоли таблички с техническими данными только после завершения регистрации в соответствии с законодательством Бразилии.</p>

Расположение предупреждающих наклеек

Информация на предупреждающих наклейках системы LOGIQ F приведена на английском языке.

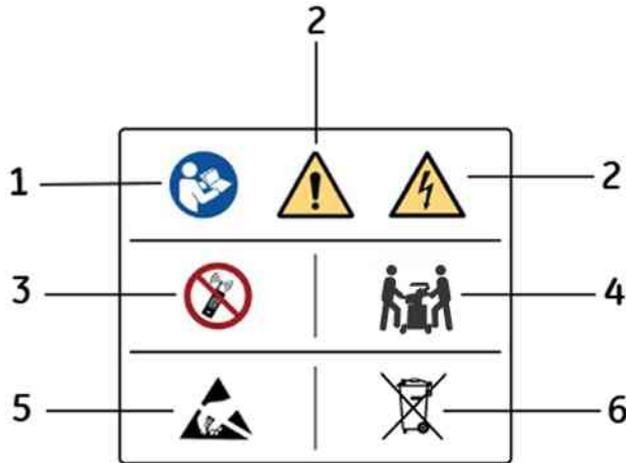


Рис. 4-3. Сведения о местоположении наклеек

Таблица 4-7: Пояснение информации на наклейке

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Наклейка "Обратитесь к сопроводительной документации" предупреждает пользователя о необходимости обратиться к руководству пользователя или другим инструкциям, если наклейка содержит неполную информацию. 2. Опасность поражения электрическим током. Не снимайте крышку и панели. Внутри устройства нет компонентов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Обратитесь за помощью к квалифицированному техническому персоналу. 3. Не используйте вблизи данного оборудования следующие устройства: сотовые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики для мобильной связи, радиоуправляемые игрушки т.д. Использование таких устройств вблизи оборудования может повлиять на заявленные технические характеристики устройства. Если перечисленные устройства находятся вблизи оборудования, следует выключить их источники питания. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Вес оборудования составляет приблизительно 65 кг. Во избежание получения травм и повреждения оборудования при транспортировке системы соблюдайте следующие правила: <ul style="list-style-type: none"> • убедитесь, что на пути нет препятствий; • перемещайте оборудование медленно и осторожно; • При перемещении оборудования по наклонной поверхности или на большое расстояние передвигайте его по меньшей мере вдвоем. 5. Избегайте статического электричества 6. Наклейка WEEE |
|--|--|

Расположение предупреждающих наклеек (продолжение)



Рис. 4-4. Расположение таблички с техническими данными системы LOGIQ F3

Расположение предупреждающих наклеек (продолжение)

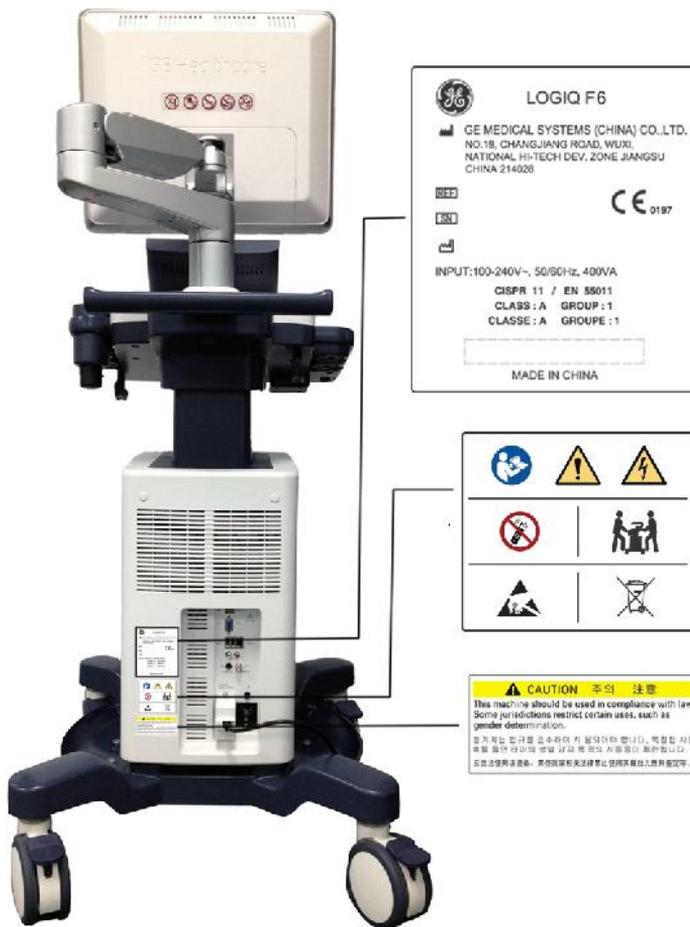


Рис. 4-5. Расположение таблички с техническими данными системы LOGIQ F6

Расположение предупреждающих наклеек (продолжение)



Рис. 4-6. Расположение таблички с техническими данными системы LOGIQ F8

Глава 5

Датчики и биопсия

В данной главе содержится информация о каждом датчике и особых типах рисков, связанных с биопсией; описываются наборы инструментов и дополнительных принадлежностей для проведения биопсии; а также даются инструкции по прикреплению биопсийной направляющей к датчикам различных типов.

Обзор датчиков

Эргономика

Эргономичный дизайн датчиков обеспечивает следующее:

- легкость манипулирования датчиком
- возможность подключения датчика к системе одной рукой
- легкость и устойчивость датчиков
- закругленность краев и гладкость поверхности датчиков.
- устойчивость датчиков к износу при воздействии на них стандартных чистящих и дезинфицирующих веществ, при контакте с рекомендованным к употреблению гелем и т. п.

Для кабелей предусмотрено следующее:

- Надлежащая длина кабеля при подключении к системе

Использование кабелей

При использовании кабелей соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Следите за тем, чтобы колеса тележки не наезжали на кабели.
- Не допускайте сгибания кабелей под острыми углами.
- Избегайте перекрещивания кабелей разных датчиков.

Ориентация датчика

Каждый датчик имеет маркер ориентации. Этим маркером отмечен конец датчика, соответствующий стороне изображения на экране, также помеченной маркером ориентации.

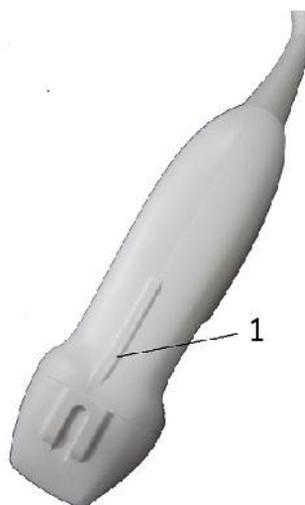


Рис. 5-1. Расположение маркера ориентации на датчике (пример)

1. Маркер ориентации

Маркировка

На каждом датчике указываются следующие данные:

- Наименования продавца и производителя
- Номер изделия по каталогу GE
- Серийный номер датчика
- Месяц и год изготовления
- Наименование датчика — указывается на рукоятке датчика и в верхней части корпуса разъема (благодаря чему легко читается при подключении датчика к системе), а также автоматически отображается на экране при выборе датчика.



Рис. 5-2. Отображаемая информация о датчике

Принципы присвоения наименований датчикам

Таблица 5-1: Принципы присвоения наименований датчикам

Real Time 4D (Объемное сканирование в режиме реального времени)	Тип	Частота	Тип разъема
"R"	C — конвексный L — линейный S — секторный	"1-5"	RS

Эксплуатация датчиков

Подробнее о подсоединении, включении, отключении, отсоединении, а также транспортировке и хранении датчиков см. в разделе Более подробную информацию см.: 'Датчик' на *стр. 1-31.*

Техническое обслуживание и уход

Осмотр датчиков



В случае обнаружения повреждений не используйте датчик, пока он не будет осмотрен и разрешен для дальнейшего использования представителем сервисной службы GE.

Перед каждым использованием

1. Осмотрите линзу, кабель, корпус и разъем датчика на наличие трещин, порезов, разрывов и других признаков физического повреждения.
2. Проверьте функционирование датчика.

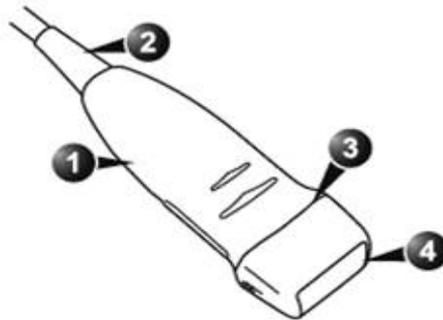


Рис. 5-3. Детали датчика

1. Корпус
2. Компенсатор натяжения
3. Уплотнение
4. Линза

После каждого использования

1. Осмотрите линзу, кабель, корпус и разъем датчика на наличие трещин, порезов, разрывов и других признаков физического повреждения.
2. Осмотрите датчик на предмет наличия повреждений, из-за которых в него может проникать жидкость.

Требования к окружающей среде

При эксплуатации, хранении и транспортировке датчиков следует соблюдать требования, указанные ниже.



Убедитесь, что температура поверхности датчика не превышает нормальный рабочий температурный диапазон.

Таблица 5-2: Требования к условиям эксплуатации датчиков

	Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура	3 - 40° C 37 - 104° F	-5°-50° C 23 - 122° F	-5°-50° C 23 - 122° F
Влажность	30 - 80% без конденсации	10-90% без конденсации	10-90% без конденсации
Давление	От 700 до 1060 гПа	От 700 до 1060 гПа	От 700 до 1060 гПа



Перед использованием датчиков проверьте температуру в помещении.


Безопасность эксплуатации датчиков

Меры предосторожности при эксплуатации



Ультразвуковые датчики - очень чувствительные медицинские инструменты, которые могут легко повреждаться при неправильном обращении. Обращайтесь с ними осторожно и оберегайте от повреждений, когда они не используются. НЕ допускается использование поврежденных или неисправных датчиков. Нарушение этих инструкций может привести к тяжелым травмам и поломке оборудования.

Опасность поражения электрическим током

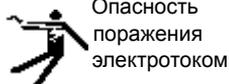

Датчик является электрическим прибором. При контакте его внутренних частей, находящихся под напряжением, с проводящим раствором пациент или пользователь может получить электротравму:

- **НЕ** погружайте датчик в жидкость дальше уровня, указанного на диаграмме уровней погружения. См. иллюстрацию к инструкциям по погружению датчиков в жидкость в разделе "Процедура очистки датчика". Не погружайте ни в какие жидкости разъемы и адаптеры для датчиков.
- **НЕ** роняйте датчики и не подвергайте их другим видам механического воздействия, так как это может привести к ухудшению работы датчика и появлению трещин или сколов на его корпусе.
- Перед каждым использованием произведите осмотр линзы и корпуса датчика на предмет наличия трещин, борозд, разрывов или других признаков механических повреждений. **НЕ** используйте датчик, имеющий видимые повреждения, до проверки его функционирования и безопасности работы с ним. При каждой чистке необходимо производить более тщательный осмотр датчика, включая его кабель, зажим кабеля, а также разъем.
- Перед подключением разъема к порту датчика проверьте штыри разъема датчика. Если какой-либо из штырей согнут, не используйте датчик, пока он не будет проверен и отремонтирован или заменен представителем сервисной службы GE.
- **НЕ** перегибайте кабель датчика, не сматывайте его плотно и не подвергайте иной избыточной механической нагрузке. Это может привести к нарушению изоляции кабеля.
- Необходима регулярная проверка датчиков на предмет утечки тока представителями сервисной службы GE или квалифицированным персоналом медицинского учреждения. См. информацию о проверке на предмет утечки тока в руководстве по техническому обслуживанию.

Возможности механического повреждения



Использование неисправного датчика или применение избыточного усилия могут привести к травме пациента или повреждению датчика:

- Проверьте отметки глубины погружения и не прилагайте избыточного усилия при введении внутрисполостных датчиков или работе с ними.
- Проверьте датчики на наличие острых заусенцев и прочих грубых дефектов поверхности, которые могут повредить чувствительные ткани.
- **ИЗБЕГАЙТЕ** применения избыточного усилия при подключении разъема к порту датчика. Контакт разъема датчика может погнуться.

Особые инструкции

Использование защитных оболочек



В целях минимизации риска передачи инфекции может потребоваться использование защитных средств. Оболочки для датчиков могут использоваться во всех клинических ситуациях, когда присутствует риск заражения. При выполнении внутрисполостных и интраоперационных процедур настоятельно рекомендуется использовать стерильные серийно выпускаемые оболочки. При выполнении нейрохирургических интраоперационных процедур НЕОБХОДИМО использовать серийно выпускаемые стерильные апиrogenные оболочки для датчиков.

Инструкции. Для каждого датчика оболочка может быть изготовлена на заказ. В комплект поставки оболочки датчика, помимо самой эластичной оболочки, предназначенной для защиты датчика, входит кабель и резиновые ленты для крепления оболочки.

Стерильные оболочки для датчиков входят в комплекты для биопсии, предназначенные для датчиков, используемых при выполнении процедур биопсии. Помимо оболочки и резиновых лент в комплект входят дополнительные принадлежности для биопсии. Подробнее об этом см. в инструкциях по биопсии для конкретных датчиков в разделе "Пояснения" данной главы.

Повторный заказ. Для повторного заказа оболочек для датчиков обращайтесь к региональному дистрибьютору или в соответствующую службу поддержки.

Использование защитных оболочек (продолжение)



Контакт с изделиями, содержащими латекс, может привести к тяжелым аллергическим реакциям у некоторых пациентов. См. инструкцию FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США) от 29 марта 1991 года относительно изделий из латекса.



Не используйте в качестве оболочки презервативы со смазкой. В некоторых случаях это может привести к повреждению датчика. Компоненты, входящие в состав смазки, могут быть несовместимы с конструкцией датчика.



НЕ допускается использование оболочки для датчика с истекшим сроком хранения. Перед использованием оболочки для датчика убедитесь, что срок ее хранения не истек.

Меры предосторожности при использовании внутриполостных датчиков

Если раствор для стерилизации вытекает из внутриполостного датчика, следует выполнить приведенные ниже меры предосторожности.



При обследовании пациента необходимо использовать стерильные защитные оболочки для датчиков. Надевайте перчатки для защиты пациента и личной защиты.



Воздействие на пациента стерилизующего раствора (например, Cidex): контакт стерилизующего вещества с кожей или слизистой оболочкой пациента может вызвать воспаление. Если это происходит, обратитесь к руководству по стерилизации.

Воздействие на пациента стерилизующего вещества с разъема/ручки датчика (например, Cidex): НЕ допускайте попадания стерилизующего вещества на пациента. Погружайте датчик до указанного уровня. Перед сканированием пациента убедитесь, что раствор не попал на разъем/ручку датчика. Если стерилизующее вещество вступает в контакт с пациентом, обратитесь к руководству по стерилизации.

Внутриполостной датчик: обратитесь к инструкции по использованию стерилизующего раствора.

Использование датчиков и инфекционный контроль

Данная информация предназначена для предупреждения пользователя об опасности заражения, связанной с эксплуатацией оборудования, и содержит указания для принятия решений, способных повлиять на безопасность как пациента, так и пользователя данного оборудования.

Система ультразвуковой диагностики использует ультразвуковую энергию, которая сопряжена с прямым физическим контактом с пациентом. В зависимости от типа исследования происходит контакт с разными тканями, от неповрежденной кожи в повседневных исследованиях до циркулирующей крови при хирургических вмешательствах. Уровень риска занесения инфекции в значительной степени зависит от типа контакта.

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения передачи инфекции от одного пациента к другому является применение одноразовых датчиков. Однако ультразвуковые датчики – это достаточно сложные и дорогостоящие устройства, которые применяются многократно. Поэтому важно свести к минимуму риск передачи инфекции за счет применения защитных средств и надлежащей обработки датчиков между исследованиями.



Опасность заражения: ВСЕГДА очищайте и дезинфицируйте датчики между исследованиями способом, соответствующим типу проводимого обследования и при необходимости используйте защитные оболочки.

Использование датчиков и инфекционный контроль (продолжение)



Во избежание передачи инфекционных заболеваний необходимо должным образом выполнять чистку и дезинфекцию. Пользователь оборудования отвечает за проверку и обеспечение эффективности процедур профилактики инфекционных заболеваний. При выполнении внутриполостных и интраоперационных процедур обязательно используйте стерильные серийно выпускаемые оболочки.

Для нейрохирургических интраоперационных процедур НЕОБХОДИМО использовать серийно выпускаемые стерильные датчики, не содержащие пирогенных веществ. Стерилизацию датчиков для нейрохирургических интраоперационных процедур нельзя выполнять при помощи жидких химических стерилизаторов, поскольку на датчике могут оставаться нейротоксичные осадки.

Процедура очистки датчика

Очистка датчиков

Для того чтобы очистить датчик, необходимо:

ПРИМЕЧАНИЕ: *Не погружайте датчик в жидкость выше уровня, указанного для данного датчика (Рис. 5-4 на стр. 5-16). Никогда не погружайте разъем датчика ни в какую жидкость.*

1. Осмотрите линзу, кабель, корпус и разъем датчика на наличие трещин, порезов, разрывов и других признаков физического повреждения.
2. Отсоединить датчик от панели управления и удалить весь контактный гель при помощи мягкой ткани и промывания в проточной воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: *НЕ протирайте датчик сухой тканью.*

3. Намочите головку датчика в воде. Для механического удаления видимых остатков вещества с поверхности датчика по мере необходимости можно пользоваться мягкой губкой, марлей или тканью.



С поверхностью линз ультразвукового датчика следует обращаться с особой осторожностью. Поверхность линз очень чувствительна, и ее можно легко повредить при грубом обращении. НЕ прилагайте избыточных усилий при очистке поверхности линз.

4. Ополосните датчик достаточным количеством чистой питьевой воды.
5. Высушите поверхность датчика на воздухе или вытрите ее насухо мягкой чистой тканью.
6. После чистки проверьте линзу, кабель, корпус и разъем датчика. Осмотрите датчик на предмет наличия повреждений, из-за которых в него может проникать жидкость. Также проверьте работоспособность датчика при сканировании в режиме реального времени. В случае обнаружения повреждений не используйте датчик, пока он не будет осмотрен и отремонтирован или заменен представителем сервисной службы GE.

Очистка датчиков (продолжение)

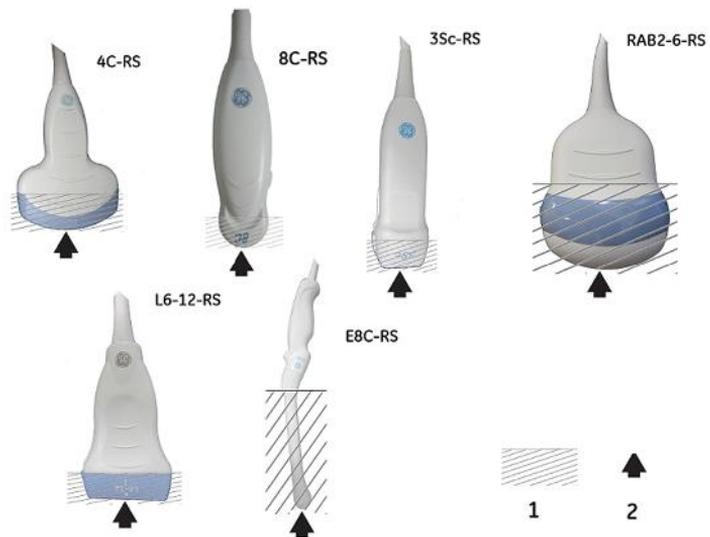


Рис. 5-4. Уровни погружения датчика

1. Уровень жидкости
2. Апертура

Дезинфекция датчиков

Осуществляется после каждого использования

Для дезинфекционной обработки датчиков можно применять жидкие бактерицидные средства. Степень дезинфекции напрямую зависит от длительности контакта бактерицидного средства с поверхностью датчика. Увеличение продолжительности обработки усиливает дезинфицирующий эффект.

Таблица 5-3: Описание пиктограмм на карточке по уходу за датчиком

Пиктограмма	Описание
	"ВНИМАНИЕ! Обратитесь к сопроводительной документации": сообщает пользователю о том, что нужно обратиться к документации, если на наклейке указана неполная информация.
	"CAUTION" - Dangerous voltage (Предупреждение - опасное напряжение) (значок с молнией) указывает на опасность поражения электрическим током.
	"Биологическая опасность": опасность заражения пациента/пользователя при контакте с загрязненным оборудованием. Использовать <ul style="list-style-type: none"> • Инструкции по чистке и уходу • Рекомендации по использованию оболочек и перчаток
	Ультразвуковые датчики - очень чувствительные медицинские инструменты, которые могут легко повреждаться при неправильном обращении. Обращайтесь с ними осторожно и оберегайте от повреждений, когда они не используются.
	Не погружайте датчик в жидкость выше уровня, отмеченного на корпусе датчика. См. руководство по эксплуатации ультразвуковой системы.
	Соблюдайте время обработки бактерицидным раствором, рекомендованное его производителем, иначе это может негативно сказаться на работе датчика. Не погружайте датчик в жидкие химические бактерицидные растворы на большее время, чем указано в карточке по уходу за датчиком.
	"Consult accompany document" (Ознакомьтесь с сопроводительной документацией) - обратитесь к руководству пользователя ультразвуковой системы для получения инструкций касательно обслуживания и очистки датчика.

Дезинфекция датчиков (продолжение)



Ознакомьтесь с картой обслуживания датчика, поставляемой с каждым датчиком. Ознакомьтесь с картой обслуживания датчика для получения информации о дезинфицирующих средствах, одобренных компанией GE.



Чтобы обеспечить эффективное воздействие жидких химических бактерицидных препаратов, в процессе механической очистки необходимо полностью удалять с поверхностей датчиков все видимые остатки вещества. Перед тем как приступить к дезинфекции, тщательно очистите датчик, как описано выше.

НЕОБХОДИМО отключить датчик от LOGIQ F перед очисткой/дезинфекцией датчика. В противном случае вы можете повредить систему.

НЕ выдерживайте датчики в жидких химических бактерицидных препаратах дольше указанного в инструкциях времени. Более продолжительное выдерживание может вызвать повреждение датчика и преждевременное повреждение оболочки датчика, что может привести к поражению электрическим током.

Дезинфекция датчиков (продолжение)

1. Готовьте бактерицидный раствор в соответствии с инструкциями производителя. Неукоснительно соблюдайте все рекомендации и требования по хранению, использованию и утилизации.
2. Поместите очищенный датчик в бактерицидный раствор на указанное производителем время. Интенсивная дезинфекция рекомендуется для поверхностных датчиков и требуется для внутрисполостных и интраоперационных датчиков (следуйте рекомендациям производителя бактерицидного вещества).



Датчики, используемые в нейрохирургии, НЕЛЬЗЯ стерилизовать в жидких химических растворах, так как на датчике может остаться нейротоксичный осадок. При выполнении нейрохирургических процедур необходимо использовать только официально зарегистрированные стерильные апиrogenные оболочки для датчиков.

3. После удаления бактерицидного вещества промойте датчик, следуя инструкциям производителя по промыванию от бактерицидного вещества. Смойте с датчика все видимые остатки бактерицидного раствора и дайте ему высохнуть.

Дезинфекция датчиков (продолжение)



БОЛЕЗНЬ КРЕЙТЦФЕЛЬДА - ЯКОБА

Датчики не следует использовать для исследований нервной системы у пациентов с данным заболеванием. В случае инфицирования датчика его надлежащая дезинфекция невозможна.



Ультразвуковые датчики легко повреждаются при неправильном обращении или при контакте с некоторыми химикатами. Нарушение этих инструкций может привести к тяжелым травмам и поломке оборудования.

- Не погружайте датчик в жидкость выше уровня, отмеченного на корпусе датчика. Запрещается погружать в жидкость разъемы и адаптеры датчиков.
- Не подвержайте датчик механическому воздействию и не сгибайте и не тяните кабель датчика с чрезмерным усилием.
- Повреждение датчика может произойти вследствие контакта с несовместимыми контактными или чистящими веществами:
 - Не допускается замачивать или смачивать датчики растворами, содержащими этиловый спирт, отбеливатель, хлорид аммония и пероксид водорода.
 - Не допускайте контакта датчиков с растворами или контактными гелями, содержащими минеральное масло или ланолин.
 - Настоятельно рекомендуется не подвергать систему воздействию температуры выше 50 °С.
- Проверяйте датчик на отсутствие повреждений или дефектов корпуса, снижение упругости, целостность линзы и герметичность перед и после использования. Не допускается использовать поврежденные или неисправные датчики.

Контактные гели



Не допускается использовать нерекомендованные гели (смазывающие вещества). Это может привести к повреждению датчика и потере гарантии. Ознакомьтесь с картой обслуживания датчика для получения информации о гелях, одобренных компанией GE.

Применение

Для обеспечения оптимальной передачи энергии между пациентом и датчиком перед началом сканирования рекомендуется нанести на поверхность кожи гель или контактное вещество, проводящее акустические сигналы.



Не допускайте попадания геля в глаза. При попадании геля в глаз тщательно промойте глаз водой.

Меры предосторожности

Контактные вещества не должны содержать перечисленные ниже ингредиенты, которые могут привести к повреждению датчиков:

- Метанол, этанол, изопропанол, а также любые спиртосодержащие вещества
- Минеральное масло
- Йод
- Лосьоны
- Ланолин
- Сок алоэ
- Оливковое масло
- Метилвые или этиловые парабыны (парагидроксибензойную кислоту)
- Диметилсиликон
- На основе полиэфиргликоля
- Бензин

Плановое техническое обслуживание

Для обеспечения оптимальной работы датчиков и безопасности их эксплуатации рекомендуется соблюдать следующий график их технического обслуживания:

Таблица 5-4: Программа планового технического обслуживания

Процедуры обслуживания	Ежедневно	После каждого использования	По мере необходимости
Осмотр датчиков	X	X	X
Чистка датчиков		X	X
Дезинфекция датчиков		X	X

Возврат/транспортировка датчиков и запасных частей

В соответствии с политикой Министерства транспорта США и компании GE, оборудование, отправляемое производителю для сервисного обслуживания, ДОЛЖНО быть очищено от крови и других загрязнений, являющихся потенциальными источниками инфекции.

В случае отправки датчика или какой-либо части оборудования (инженером по монтажу или клиентом) для сервисного обслуживания этот датчик или часть оборудования необходимо очистить от загрязнений и подвергнуть дезинфекции перед упаковкой и транспортировкой.

Строго соблюдайте инструкции по чистке и дезинфекции датчиков, изложенные в руководстве пользователя.

Это позволит защитить от инфицирования работников транспорта, а также персонал, принимающий грузы.

Пояснения по работе с датчиками

Введение

Система LOGIQ F поддерживает следующие типы датчиков:

- **Конвексный** Конвексные датчики.
- **Линейные** Линейные датчики
- **Секторный с фазированной решеткой.** Секторные датчики с фазированной решеткой.
- **Volume Probes (Объемные датчики).** 4D-датчик: конвексная решетка.



Датчики для трансвагинальных и трансректальных исследований требуют особого обращения. Трансвагинальные и трансректальные осмотры, а также ввод датчиков должны выполняться только должным образом подготовленными персоналом. См. документацию пользователя, входящую в комплект поставки этих датчиков.

Область применения

Таблица 5-5: Назначение датчиков

Области применения датчиков	4C-RS	8C-RS	3Sc-RS	L6-12-RS	E8C-RS	RAB2-6-RS
Брюшная полость	X	X	X			X
Акушерство	X				X	X
Гинекология	X				X	X
Поверхностно расположенные органы				X		
Васкулярные исследования/ исследования периферических кровеносных сосудов				X		
Транскраниальный			X			
Педиатрия	X	X	X	X		
Исследование костно-мышечных тканей				X		
Урология	X				X	X
Кардиология		X	X			
Трансвагинальное исследование					X	
Биопсия	X		X	X	X	X

ПРИМЕЧАНИЕ: Система LOGIQ F3 не поддерживает датчик RAB2-6-RS.

Функции

Таблица 5-6: Функции датчиков

Области применения датчиков	4C-RS	8C-RS	3Sc-RS	L6-12-RS	E8C-RS	RAB2-6-RS
LOGIQ View (Режим панорамного сканирования)	X	X	X	X	X	X
Easy 3D	X	X	X	X	X	
4D						X
Непрерывно-волновой доплер (CWD)			X			
Эластография				X		
TVI/TVD			X			
CrossXBeam	X	X		X	X	X
SRI-HD	X	X	X	X	X	X
Scan Coach (Консультант)	X	X	X	X	X	X
Виртуальный конвекс			X	X		

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все функции системы, изделия, датчики или периферийные устройства, описанные в данном руководстве, могут иметься в наличии или быть разрешенными к продаже на всех рынках. За свежей информацией обращайтесь к представителю компании GE Ultrasound.

Технические характеристики

Таблица 5-7: Характеристики датчиков системы

Наименование датчика	Центральная частота кадров (МГц)	Допплеровская частота (МГц)	
		Номинальное значение	Проникновение
4C-RS	3,10 ± 10%	2,8	2,0
8C-RS	6,5 ± 20%	5,0	4,2
3Sc-RS	2,75 ± 10%	2,5	1,7
L6-12-RS	7,75 ± 20%	5,0	4,0
E8C-RS	6,5 ± 20%	5,0	4,2
RAB2-6-RS	3,30 ± 10%	3,0	2,0

Изображение датчика

Конвексный датчик

Таблица 5-8: Изображение конвексного датчика

Датчики	Иллюстрация	Датчики	Иллюстрация
4C-RS		8C-RS	
E8C-RS			

Линейный датчик.

Таблица 5-9: Изображение линейного датчика

Датчики	Иллюстрация
L6-12-RS	

Секторный датчик

Таблица 5-10: Изображение секторного датчика

Датчики	Иллюстрация
3Sc-RS	 A white, elongated, tapered medical probe with a blue circular logo near the tip and the text '3Sc' at the base.

4D-датчик

Таблица 5-11: Изображение 4D-датчика

Датчики	Иллюстрация
RAB2-6-RS	 A white medical probe with a bulbous, rounded base and a blue band around the middle section.

Особые типы рисков, связанные с биопсией

Меры предосторожности при выполнении процедуры биопсии



Во время процедуры биопсии не переводите систему в режим стоп-кадра. Необходима визуализация в режиме реального времени. Это позволит избежать ошибки расположения иглы.

Функция определения направлений биопсии позволяет найти оптимальное положение датчика и определить приблизительную траекторию движения иглы. Фактическая траектория движения иглы может, тем не менее, отклоняться от заданной. Во время процедуры постоянно контролируйте относительное положение биопсийной иглы и окружающих тканей.



Использование устройств и принадлежностей для биопсии, не прошедших проверку на совместимость с данным оборудованием, может привести к травмам.



Инвазивный характер процедуры биопсии диктует необходимость надлежащей подготовки и точное следование методике в целях предупреждения инфицирования и распространения заболеваний. Перед выполнением процедуры необходимо произвести надлежащую чистку оборудования.

- Чтобы правильно подготовить датчик к процедуре, следуйте инструкциям по его очистке и дезинфекции, соблюдая указанные меры предосторожности.
- Выполняйте инструкции производителя по очистке устройств и принадлежностей для биопсии.
- Используйте средства защиты (перчатки, оболочки для датчиков и т. п.).
- После использования оборудования выполняйте необходимые процедуры дезинфекции, очистки и удаления отходов.

Меры предосторожности при выполнении процедуры биопсии (продолжение)



Неправильная чистка оборудования, а также применение некоторых чистящих и дезинфицирующих средств может привести к повреждению пластмассовых деталей, в результате чего может понизиться качество визуализации или возрасти риск поражения электрическим током.

Более подробную информацию см.: 'Безопасность эксплуатации датчиков' на *стр. 5-7*.



НИКОГДА не используйте повторно одноразовую насадку для биопсии TR5° и стерильные комплекты направляющих для игл.

Подготовка к проведению биопсии

Отображение направления биопсии

Активируйте набор для биопсии, выбрав его в В-режиме.

Доступные опции биопсии отобразятся после того, как набор для биопсии будет выбран. В зависимости от датчика для системы LOGIQ F выпускаются наборы для биопсии с постоянным и регулируемым углом, а также пластиковые/ одноразовые и многоразовые направляющие для биопсии. Выберите необходимый набор для биопсии.

Отображение направления биопсии (продолжение)

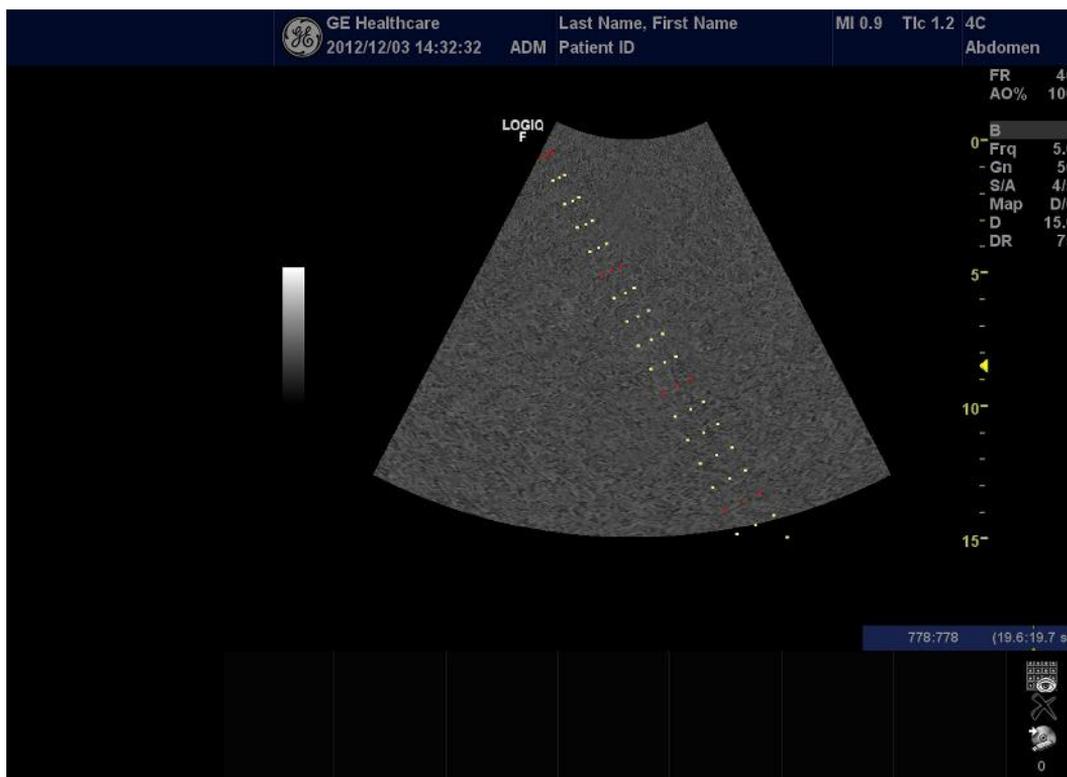


Рис. 5-5. Направления биопсии для датчика 4C-RS

Направление биопсии представляет собой траекторию иглы. Точки, формирующие направление, - это значения глубины, где:

- желтые точки равны шагу в 1 см;
- красные точки равны шагу в 5 см.

Следует внимательно наблюдать за изображением на экране, чтобы отследить малейшее отклонение иглы от центральной линии или направления.

Перед сканированием убедитесь, что игла выводится в плоскости визуализации. Используйте иглу подходящей длины для достижения нужной области.

Отображение направления биопсии (продолжение)

Отображение направления биопсии корректируется в соответствии с настройкой изображения (инверсией/ поворотом, масштабированием, изменением глубины).

Существует несколько причин отклонения иглы от центральной линии или направления:

- Зазор либо трение между иглой и насадкой для игл.
- Производственный допуск многоразовой насадки.
- Отклонение иглы из-за сопротивления тканей.
- Выбранный размер иглы. Тонкие иглы характеризуются большим отклонением.

Таблица 5-12: Направляющие устройства для биопсии

Датчики	Фиксированный угол	Регулируемый угол		
		MBX1	MBX2	MBX3
E8C-RS	15,3 (TR5) 15200 (многоразовый)			
4C-RS		4,0	6,0	10,0
3Sc-RS		4,2	5,7	8,2
L6-12-RS		1,5	2,5	3,5
RAB2-6-RS		4,0	6,0	8,0



В случае несоблюдения направления биопсии, указанного для выбранного направляющего устройства, игла может выйти за пределы траектории.

При использовании направляющего устройства для биопсии с регулируемым углом чрезвычайно важно, чтобы угол, отображающийся на экране, совпадал с углом, установленным на направляющем устройстве. В противном случае игла выйдет за пределы указанной траектории, что может привести к необходимости повторной биопсии или травме пациента.

Подготовка к подсоединению направляющего устройства для биопсии

Конвексные, секторные и линейные датчики оснащены специальными креплениями для направляющих устройств (приобретаются дополнительно). Направляющее устройство состоит из многоразовой насадки, закрепляемой на датчике, одноразового зажима для игл, закрепляемого на насадке, оболочки, геля (стерильного, если необходимо) и одноразовых насадок для игл.

Одноразовые насадки для игл выпускаются для игл разного размера.



См. инструкции производителя, входящие в комплект поставки набора для биопсии.

Насадка поставляется не стерильной и может использоваться повторно. Во избежание заражения пациента убедитесь, что насадка хорошо очищена, стерилизована и дезинфицирована перед каждым использованием.

Одноразовые компоненты поставляются стерильными и не могут использоваться повторно. Не используйте такие компоненты, если целостность упаковки нарушена или истек срок годности.

Направляющее устройство для биопсии с фиксированным углом



НЕ используйте иглу с катетером (мягкой трубкой). Существует вероятность того, что катетер обломится в теле пациента.



Перед установкой иглы выполните сканирование, чтобы точно определить глубину и место прокола. Только стерильные / санитарно обработанные оболочки и резиновые кольца находятся на датчике в процессе сканирования перед установкой иглы.

Подготовка

Для подготовки внутритростного датчика к использованию:

1. Выньте датчик из упаковки и аккуратно осмотрите его на наличие повреждений.
2. Если необходимо подсоединить направляющее устройство для биопсии, используйте инструмент для удаления прокладок, чтобы очистить область прикрепления на датчике.

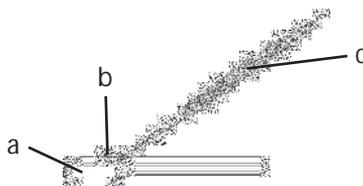


Рис. 5-6. Удаление прокладки в области прикрепления

- a. Датчик
 - b. Область прикрепления
 - c. Инструмент для удаления прокладок
3. Очистите и продезинфицируйте датчик.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно наденьте защитные перчатки.

Установка оболочки

Для установки оболочки:

1. Выньте оболочку из упаковки. Не раскручивайте оболочку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно смойте порошок с защитных оболочек для датчика перед тем, как надевать их на датчик. Порошок может ухудшить качество изображения.

2. Нанесите необходимое количество ультразвукового геля на внутренний конец оболочки (гель должен находиться между внутренней поверхностью оболочки и апертурой датчика).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что используется только акустический связующий гель.

3. Поместите конец оболочки на апертуру датчика и раскатайте оболочку по направлению к рукоятке датчика.
4. Проверьте оболочку на наличие разрезов и разрывов.

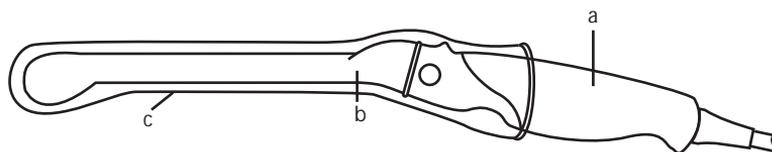


Рис. 5-7. Датчик E8C-RS в оболочке

- a. Рукоятка датчика
 - b. Корпус датчика
 - c. Защитная оболочка
5. Потрите пальцами кончик датчика, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха.

Подготовка к биопсии

1. Если необходимо выполнить процедуру биопсии, закрепите металлическое или пластиковое направляющее устройство для биопсии на датчике поверх оболочки.



Это может привести к повторной биопсии или травме пациента. Если направляющее устройство для биопсии не установлено и не зафиксировано надлежащим образом, положение иглы будет неправильным.

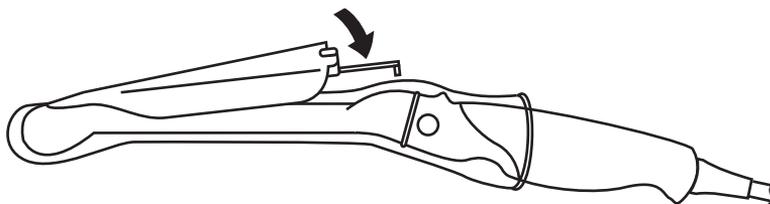


Рис. 5-8. Одноразовая направляющая для биопсии с углом 5 градусов

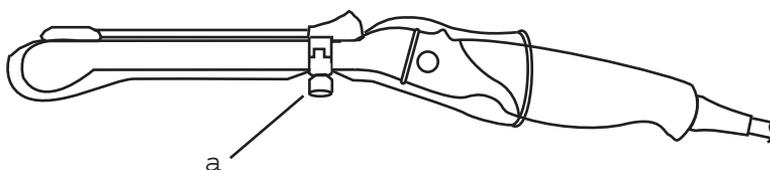


Рис. 5-9. Одноразовая направляющая для биопсии

- a. Закрепите с помощью винта
2. Нанесите необходимое количество ультразвукового геля на внешнюю сторону конца оболочки, заполненного гелем.
 3. Убедитесь, что направляющее устройство надежно установлено и зафиксировано: протолкните конец для ввода иглы вперед таким образом, чтобы крепление плотно встало в предназначенное для него гнездо.

Направляющее устройство для биопсии с регулируемым углом



НЕ пытайтесь использовать насадку или направляющее устройство для биопсии до тех пор, пока не прочтете и не поймете инструкции производителя, входящие в комплект поставки насадки и направляющего устройства.

1. Выполните сканирование пациента и определите участок для проведения биопсии. Переместите датчик таким образом, чтобы исследуемая область находилась в центре изображения. Включите функцию определения направления биопсии и установите углы от MBX1 до MBX3, чтобы найти наиболее подходящий угол для траектории иглы.



Рис. 5-10. Пример

2. Потяните регулятор (Рис. 5-11 а), чтобы свободно перемещать крепление направляющей. Совместите ручку с выбранным положением крепления направляющей иглы.

Вставьте регулятор (Рис. 5-11 б) в нужное гнездо, чтобы зафиксировать положение угла крепления направляющей.



Рис. 5-11. Потяните ручку вверх и нажмите на нее

Направляющее устройство для биопсии с регулируемым углом (продолжение)

3. Установите выпуклую часть насадки для биопсии (a) в углубление датчика (b).

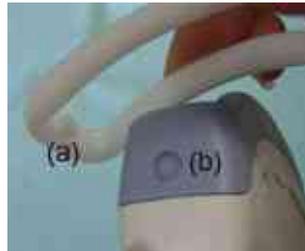


Рис. 5-12. Совмещение датчика и насадки

Удерживайте сторону (a) и подоткните направляющую иглы со стороны (b), пока она не встанет на место и не зафиксируется со щелчком.



Рис. 5-13. Выравнивание датчика и насадки с регулируемым углом 2

4. Нанесите необходимое количество контактного геля на поверхность датчика.

**Направляющее устройство для биопсии с регулируемым углом
(продолжение)**

5. Плотно наденьте соответствующую защитную оболочку на датчик и насадку для биопсии. Закрепите оболочку с помощью резиновых лент, входящих в комплект поставки.

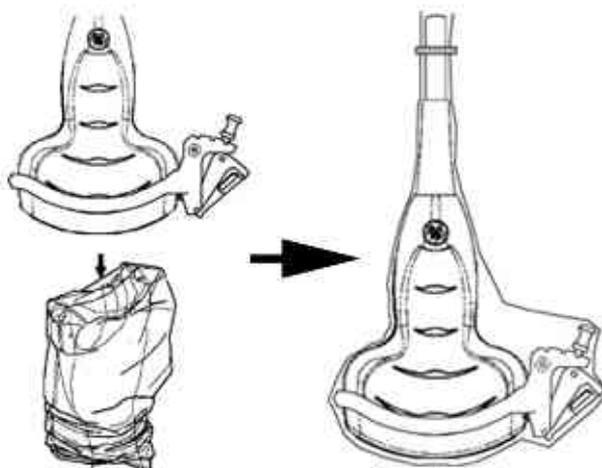


Рис. 5-14. Надевание защитной оболочки

6. Вставьте направляющую иглы до щелчка в направляющую насадку для биопсии.

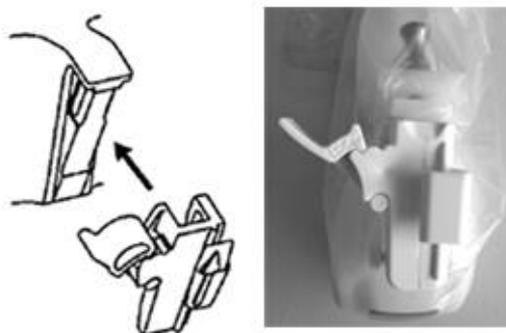


Рис. 5-15. Вставьте направляющую иглы до щелчка

Направляющее устройство для биопсии с регулируемым углом (продолжение)

- Надавите на запорный механизм по направлению к насадке, чтобы зафиксировать зажим (а). Убедитесь, что направляющая для иглы надежно закреплена на насадке.

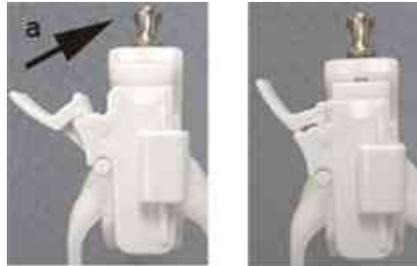


Рис. 5-16. Зафиксируйте направляющую иглы

- Выберите насадку для игл нужного калибра (размера). Поверните ее вперед-назад, чтобы извлечь из пластиковой упаковки.

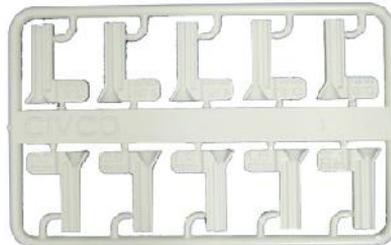


Рис. 5-17. Насадка для игл

- Поместите насадку в зажим для игл таким образом, чтобы она была повернута маркировкой калибра в сторону зажима, а затем со щелчком зафиксируйте.



Рис. 5-18. Установка насадки для игл

Направляющее устройство для биопсии с регулируемым углом (продолжение)

Снимите направляющую для биопсии

1. Удерживайте другую сторону и вытолкните фиксируемый зажим для игл. См. Рис. 5-19.



Рис. 5-19. Снимите направляющую для биопсии



Не повредите линзы датчика ногтями.

Отсоединение иглы

Следуя процедуре, описанной ниже, вы сможете отсоединить иглу от датчика и устройства, не изменяя ее положения.

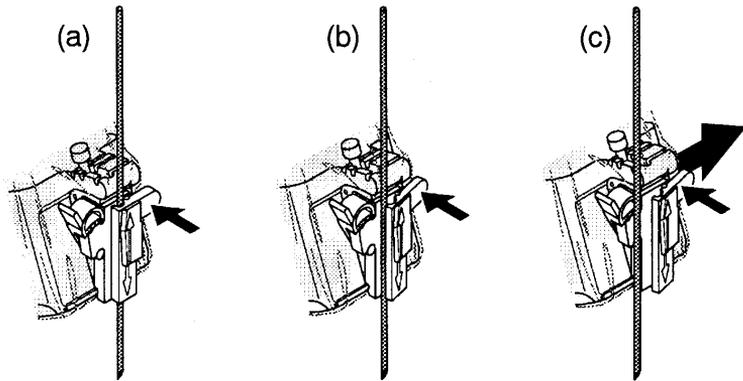


Рис. 5-20. Отсоедините иглу от устройства

- a. Надавите на регулятор футляра в направлении стрелки.
- b. Игла будет отсоединена от устройства.
- c. Надавите на датчик и устройство в направлении большой стрелки, чтобы удалить иглу.

4D-направляющая для биопсии в сборе - репрезентативный пример

4D-датчик



Рис. 5-21. Установка направляющей для биопсии на 4D-датчик

1. Разместите направляющую иглы на датчике.
2. Нажимайте иглу до тех пор, пока она не будет зафиксирована зажимом.
3. Закрепите направляющую для биопсии с помощью рамки на противоположной стороне.
4. Осторожно потяните и поверните контейнер для иглы для совмещения с отверстием иглы на передней части.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Допускается стерилизация и автоклавирование направляющей для иглы.*

Выбор пути иглы для биопсии 4D-датчика

Перед использованием иглы для выбора ее траектории и проверки правильности отображения траектории на экране выполните следующие действия:

1. Установите насадку и направляющее устройство должным образом.
2. Выполните сканирование в сосуде с водой (47° C).
3. Выберите **Biopsy kit** (Набор для биопсии). Доступные параметры биопсии на Сенсорная панель.

Выберите направление биопсии, при котором эхо-сигналы от кончика иглы проходят через его центр. Используйте выбранное направление при проведении биопсии.

Проверка траектории иглы для биопсии

Чтобы убедиться в том, что траектория иглы правильно отображается в пределах направления биопсии на экране монитора, выполните следующие действия:

- Установите насадку и направляющее устройство должным образом.
- Выполните сканирование в сосуде с водой (47° C).
- Выведите направление биопсии на экран монитора.
- Убедитесь в том, что эхосигналы иглы не выходят за пределы маркеров направления.

Процедура биопсии



Процедура биопсии выполняется только с использованием изображений, полученных в режиме реального времени.

1. Нанесите контактный гель на сканирующую поверхность датчика/оболочку/направляющее устройство для биопсии.
2. Активируйте направление биопсии в меню В-режима системы. При использовании направляющих устройств с регулируемым углом убедитесь, что отображается правильный угол направления.
3. Выполните сканирование, чтобы определить местоположение исследуемой области. Поместите исследуемую область в центре электронной траектории.
Включение режима цветового потока позволит визуализировать сосудистую структуру вокруг участка биопсии.
4. Установите иглу в направляющее устройство между насадкой и зажимом для игл. Направьте иглу в исследуемую область для взятия образца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Действия после процедуры биопсии

По завершении процедуры биопсии удалите насадку и зажим для игл и оболочку датчика. Утилизируйте эти компоненты в соответствии с действующими правилами, принятыми в вашем учреждении.

Очистите и продезинфицируйте датчик. Более подробную информацию см.: 'Процедура очистки датчика' на *стр. 5-15*.

Насадку для биопсии можно очистить и продезинфицировать в рекомендованном дезинфицирующем средстве и использовать повторно.



После вскрытия набора для биопсии все его компоненты должны быть уничтожены вне зависимости от того, были они использованы или нет.

Использование в хирургии/в интраоперационных процедурах

Подготовка к проведению хирургических/интраоперационных процедур

Подготовка датчика к интраоперационной процедуре предполагает выполнение тех же операций в режиме стерильности, что и подготовка к биопсии, за исключением того, что в этом случае не используются насадки для биопсийной направляющей. Более подробную информацию см.: 'Подготовка к подсоединению направляющего устройства для биопсии' на *стр. 5-34*. На поверхность датчика наносится стерильный гель; датчик и кабель полностью закрываются стерильной оболочкой, предварительно прошедшей полную процедуру очистки, а также интенсивную дезинфекцию.

Инвазивный характер процедуры биопсии диктует необходимость надлежащей подготовки и точное следование методике в целях предупреждения инфицирования и распространения заболеваний. Перед выполнением процедуры необходимо произвести надлежащую чистку оборудования.



Для хирургии/интраоперационных процедур требуется стерильная среда. Поэтому одежда оператора и датчик должны быть стерильными.

Подготовка к проведению хирургических/интраоперационных процедур (продолжение)

Для обеспечения стерильности во время выполнения процедуры рекомендуется работать вдвоем.

1. Проведите интенсивную дезинфекцию датчика.
2. Одежда оператора, выполняющего сканирование (хирурга, специалиста по ультразвуковой эхографии и т. п.) должна быть стерильной; необходимо работать в перчатках.
3. Нанесите необходимое количество стерильного контактного геля на поверхность датчика.
4. Наденьте соответствующую стерильную оболочку на датчик и кабель.

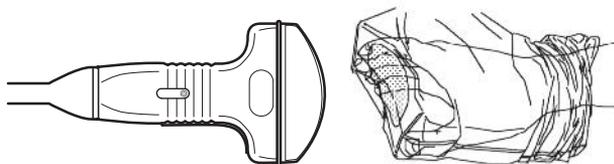


Рис. 5-22. Надевание стерильной оболочки на датчик

5. В зависимости от типа процедуры нанесите на защитную оболочку стерилизованную воду или стерильный гель.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Соблюдайте действующие в вашем медицинском учреждении инструкции по чистке и дезинфекции датчиков после хирургических/интраоперационных процедур.*

Алфавитный указатель

Е

EZBackup/Move, использование, 3-10

Т

TAMAX и TAMEAN, измерение в доплеровском режиме

выполнение трассировки вручную, 2-52

А

автоматический выключатель

описание, 1-27

аккуратное использование, 4-3

Б

безопасность

датчики

меры предосторожности при манипуляциях, 5-13

значки предосторожности, определение, 4-3

наклейки, 4-40

оборудование, 4-11

обучение пациентов, принцип ALARA (РЭМ), 4-10

опасность, 4-4

пациент, 4-7

воздействие акустических сигналов
риск, тип

акустические сигналы, 4-10

возможности механического

повреждения, 4-9

идентификатор пациента, 4-7

риск поражения электрическим током,
4-9

риск, 4-12, 4-13, 4-15, 4-36, 5-8, 5-9, 5-10

биологический, 5-20

пламя и дым, 4-13

уровни опасности, определение, 4-3

электромагнитная совместимость (ЭМС),
4-20

безопасность оборудования, 4-11

безопасность пациента, 4-7

безопасность персонала, 4-11

безопасность эксплуатации

датчики, 5-7

биологический риск, 4-13, 4-15

В

воздушный фильтр

снятие, 3-40

Временной интервал

измерение в доплеровском режиме, 2-54

измерение в М-режиме, измерения в

М-режиме, режим

временной интервал, 2-56

временной интервал и скорость, измерения в М-режиме, 2-56

выходная акустическая мощность

уровни по умолчанию, 4-36

Г

Гели, контактные, 5-21

Глубина тканей, измерение в М-режиме, 2-55

Д

Датчики

подсоединение, 1-31

датчики

безопасность

использование защитных оболочек,
5-10

безопасность эксплуатации, 5-7

включение, 1-34

дезинфекция, 5-17

использование кабелей, 1-34, 5-2

контактные гели

контактные гели, датчики, 5-21

маркировка, 5-3

ориентация датчика, 5-3

отсоединение, 1-34

очистка, 5-15

плановое техническое обслуживание, 5-22

техническое обслуживание и уход, 5-5

требования к окружающей среде, 5-6

эргономика, 5-2

Дезинфекция датчиков, 5-17

дезинфицирующие растворы, датчики, 5-17

дополнительное устройство

панель разъемов, 1-9

дополнительные принадлежности

заказ, 3-45
заказ каталога, 3-45
Допплеровский режим, общие измерения, 2-51

З

Значок опасности, определение, 4-3
Значок предостережения, определение, 4-3
Значок предупреждения, определение, 4-3

И

измерение в В-режиме
уровень эхо-сигнала, 2-50
измерение площади
эллипс, 2-44
измерение расстояния
общее, 2-43
измерение с помощью эллипса, общее, 2-44
Измерение уровня эхо-сигналов, 2-50
Измерения в В-режиме
окружность и площадь (методом
трассировки), 2-45
Измерения в В-режиме, общие, 2-42
Измерения в В-режиме, режим
окружность и площадь (сплайн-трассировка),
2-47
измерения в В-режиме, режим
окружность и площадь (эллипс), 2-44
расстояние, 2-43
Измерения в доплеровском режиме, режим
ТАМАХ и ТАМЕАН, 2-52
скорость, 2-51
измерения в доплеровском режиме, режим
временной интервал, 2-54
Измерения в М-режиме, режим
временной интервал и скорость, 2-56
измерения в М-режиме, режим
глубина тканей, 2-55
измерения окружности
сплайн, 2-47
трассировка, 2-45, 2-47
эллипс, 2-44
измерения площади
сплайн, 2-47
трассировка, 2-45, 2-47
иллюстрация панели разъемов для подключения
дополнительных устройств, 1-10
информация, запрос, 3-45

К

клавиатура
специализированные клавиши, 1-13
Клинические
погрешность измерений, 2-61
колеса, панель управления, 1-20
Корпус системы, 3-36

М

маркировка датчиков, 5-3
Масштабирование при записи, активация, 2-22
М-режим, общие измерения, 2-55

Н

наклейки на устройстве, 4-40
новый пациент
сканирование, 1-38

О

оборудование по предписанию, предупреждение,
1-3
Обращение с датчиками и инфекционный
контроль, 5-13
опасность, предупреждающие знаки, 4-4
очистка датчиков, 5-15

П

панель управления
колеса, 1-20
перемещение системы, 1-18, 1-22
колеса, 1-20
периферийные устройства
иллюстрация панели разъемов, 1-10
панель разъемов, 1-9
Пиктограммы, 2-25
Питание
автоматический выключатель, 1-27
включение/выключение, 1-28
Шнур, 1-19
питание, 1-24
выключатель, местоположение, 1-28
отключение, 1-29
подключение
США, 1-24
погрешность
клинические измерения, 2-61
Подключение
настройка, 3-26
обзор экранов, 3-26
предварительные настройки, 3-26
показания к применению, 1-4
предварительные настройки, изменение
Подключение, 3-26
предустановленные параметры, обзор, 3-2
противопоказания, 1-3

Р

Рабочая таблица
изменение данных, 2-59
просмотр, 2-57
Режим кинопетли
активация, 2-24

резервное копирование данных
EZBackup/Move, см. EZBackup/Move,
использование, 3-10

риск, 5-20

биологический, 5-10

механический, 5-9

электрический, 5-8

риск взрыва, 4-13

риск поражения электрическим током, 4-12

риск, тип

биологический, 4-13, 4-15

взрыв, 4-13

механический, 4-9

электрический, 4-9, 4-12

РЭМ (разумно эффективный минимум),

биоэффекты, 4-4

С

связь

вопросы сервисного обслуживания, 3-45

клинические вопросы, 3-45

через Интернет, 3-45

сервисное обслуживание, запрос, 3-45

система

отключение, 1-29

требования к окружающей среде, 1-7

электрические конфигурации, 1-6

Система LOGIQ

показания к применению, 1-4

система LOGIQ

противопоказания, 1-3

Скорость, измерение в доплеровском режиме,
2-51

стоп-кадр изображения, 2-23

Т

Трассировка, общие сведения, 2-45, 2-47

Требования к окружающей среде

датчики, 5-6

требования к окружающей среде, 1-7

требования к рабочему месту, до доставки

оборудования, 1-6

У

устройства

нерекомендованные, 4-32

разрешенные для эксплуатации, 4-32

Уход и техническое обслуживание

график технического обслуживания, 3-35

очистка системы, 3-36

педальный выключатель, 3-38

проверка системы, 3-34

чистка системы

корпус системы, 3-36

элементы управления пульта
оператора, 3-37

Ф

федеральный закон (США), требования, 1-3

Э

Экраны 'Utility' (Утилиты)

подключение, 3-26

Эластография, 2-17

электрические

конфигурации, 1-6

электромагнитная совместимость (ЭМС), 4-20

элементы управления

клавиатура, 1-13

элементы управления измерением,

местоположение, 2-41

Элементы управления пульта оператора, 3-37

ЭМС (электромагнитная совместимость), 4-20

